

# Guia Rápido de Operação Logic - Descrição das Partes e Comandos do Equipamento



Antes de utilizar o equipamento, leia com atenção o *Manual do Usuário Linha Odontológica*.




A função deste guia é identificar comandos, partes e instrumentos que podem ser disponibilizados no equipamento, incluindo itens opcionais. Este guia não define a configuração do equipamento que pode variar de acordo com o pedido do cliente.



Em caso de perda do *Manual do Usuário* e/ou *Guia de Operação*, entre em contato com o Pós Venda da Olsen (posvenda@olsen.odo.br) informando o número de série do seu equipamento.

## Equipo

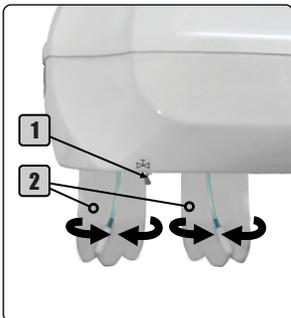

### Antes de ligar o equipamento:

- 1 - Válvula de Pressurização
- 2 - Tanques de Água

1º - Verifique se o equipamento se encontra devidamente instalado, conforme instruções do capítulo 6 (*Instalação*) do *Manual do Usuário Linha Odontológica*;  
2º - Ligue o compressor que abastece o equipamento;  
3º - Abra o registro de alimentação de água do equipamento;  
4º - Ligue o disjuntor de alimentação elétrica do equipamento.

### Ligando o equipamento:

- 1 - Chave Stop de Emergência
- 2 - Voltímetro
- 3 - Porta-Fusível
- 4 - Interruptor On/Off da Cadeira



1º - Ligue o interruptor On/Off na base da cadeira;  
2º - Acione o comando "Sobe Assento" no pedal até a cadeira atingir seu limite de altura máxima;  
3º - Feche a válvula de pressurização;  
4º - Verifique se os tanques de água estão cheios. Se necessário, remova-os e encha-os com água mineral ou filtrada até o limite indicado em cada tanque e acople-os novamente à plataforma. Se desejar coloque produtos profiláticos (de baixa concentração);  
5º - Abra a válvula de pressurização e verifique se os tanques de água estão bem acoplados e sem vazamentos;  
6º - Antes de iniciar o uso do equipamento, verifique o funcionamento de todos os instrumentos e comandos disponíveis e realize a limpeza e esterilização dos instrumentos (*capítulo 7 do Manual do Usuário Linha Odontológica – Limpeza e Desinfecção*).

## Pedal Remoto



- 1 - Sobe Assento/Posição 1
- 2 - Sobe Encosto/Posição 2
- 3 - Desce Assento/Posição 3
- 4 - Desce Encosto/Posição de Cuspir
- 5 - Posição de Trabalho
- 6 - Volta à Zero
- 7 - Pedal de Propulsão/Acionamento
- 8 - Água na Cuba
- 9 - On/Off do Refletor
- 10 - On/Off Sugador Elétrico
- 11 - Água no Porta-Copo
- 12 - Alça de metal

### Para gravar uma posição de trabalho:

1º - Pressione o comando Volta à Zero;  
2º - Ajuste o encosto na posição desejada;  
3º - Ajuste o assento na posição desejada;  
4º - Pressione por 5 segundos o comando Posição de Trabalho. O equipamento emitirá 2 bipes longos;  
5º - Pressione o comando (Sobe Assento) enquanto o equipamento está emitindo o bipe; O equipamento emitirá 2 bipes curtos para confirmar o procedimento.  
6º - Pressione o comando Volta à Zero.

## Refletores

### Refletor Concept LED Plus



### Refletor Premium LED




- 1 - Botão de Controle
- 2 - Haste de Controle
- 3 - Sensor

1º - Para ativar o refletor pressione o botão de On/Off do refletor na base da cadeira (*seção Pedal Remoto - 9*), essa ação também habilita o sensor (3) e o botão/haste de controle (2);

2º - Para ligar ou desligar os refletores Concept Plus e LED Premium, passe a mão na frente do sensor (3) a aproximadamente 5 cm de distância ou segure a haste de controle (2), no caso do Concept Plus, ou gire o botão de controle (1), no caso do refletor LED Premium;


3º - Para mudar a intensidade de iluminação dos refletores Concep Plus e LED Premium, mantenha a mão na frente do sensor (3) ou segure a haste de controle (2), no caso do Concept Plus ou gire o botão de controle (1), no caso do refletor LED Premium.

## Módulo Auxiliar

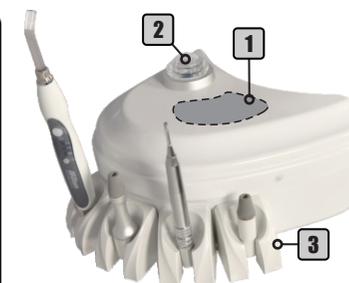

- 1 - Painel Blue Touch Módulo
- 2 - Reservatório de Bicarbonato
- 3 - Suporte de Instrumentos

### Painel Blue Touch Módulo

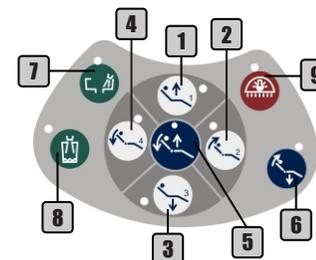


- 1 - Sobe Assento/Posição 1
- 2 - Sobe Encosto/Posição 2
- 3 - Desce Assento/Posição 3
- 4 - Desce Encosto/Posição de Cuspir
- 5 - Posição de Trabalho
- 6 - Volta à Zero
- 7 - Água na Cuba
- 8 - Água no Porta-Copo
- 9 - On/Off do Refletor


# Guia Rápido de Operação Logic - Descrição das Partes e Comandos do Equipamento

Mesas Odontológicas

Mesa Logic

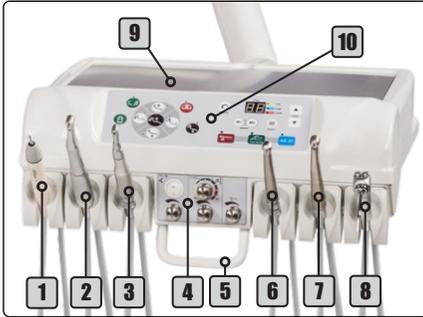

Mesa Cross Flex

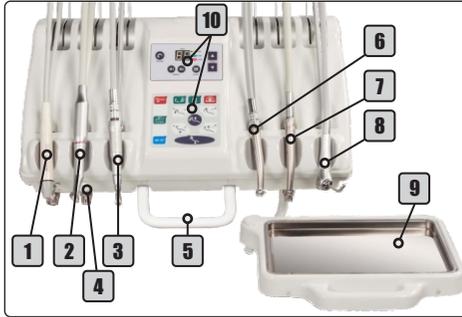

As mesas odontológicas podem apresentar algumas configurações de painéis de comando, variando conforme instrumentos disponíveis.




- 1 - Ultrassom com LED
- 2 - Acoplamento Micromotor Brushless
- 3 - Acoplamento Micromotor Pneumático
- 4 - Painel de Instrumentos
- 5 - Alça Capacitiva
- 6 - Acoplamento para Alta Rotação
- 7 - Acoplamento para Fibra Ótica
- 8 - Seringa Tríptica
- 9 - Bandeja Inox
- 10 - Painéis de Comando





Somente movimente a mesa através da alça capacitiva

Painéis de Comando


Painéis de Comando Blue Touch

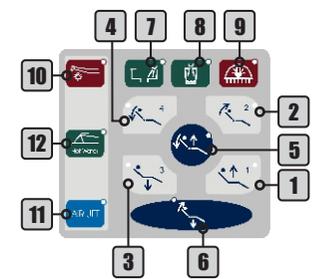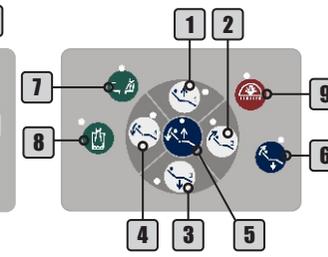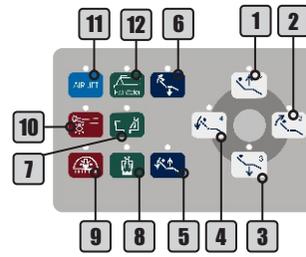

Painel de Comandos - Negatoscópio

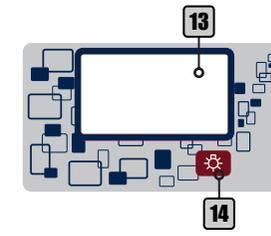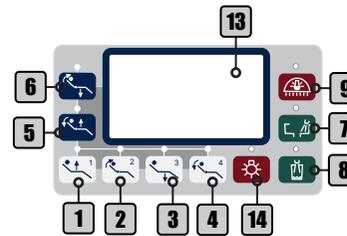

Painel de Comando Sistema ChronoLub

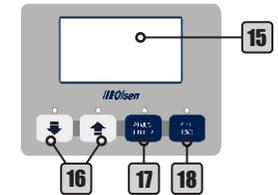

Painéis de Instrumentos






- 1 - Controle de Velocidade do Micromotor Elétrico
- 2 - Inversor de Rotação do Micromotor Elétrico
- 3 - Controle de potência do Ultrassom e Seletor de Funções Geral-Pério/Endo
- 4 - Controle de água do Ultrassom
- 5 - Controle de Água do Micromotor Brushless
- 6 - Controle de Água da Fibra Ótica
- 7 - LED On/Off Thermo Comfort

Braço da Mesa



O Braço Flex apresenta 2 articulações (1) e sistema de freio pneumático que é desativado através do toque na alça capacitiva (2) liberando a movimentação da mesa.

Painel de Comandos - Micromotor Brushless

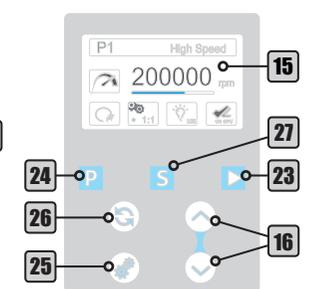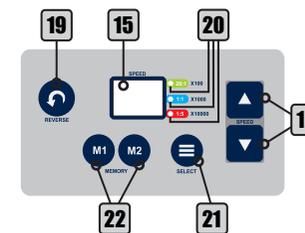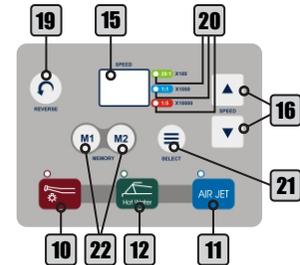

- 1 - Sobe Assento/Posição 1
- 2 - Sobe Encosto/Posição 2
- 3 - Desce Assento/Posição 3
- 4 - Desce Encosto/Posição de Cuspir
- 5 - Posição de Trabalho
- 6 - Volta à Zero
- 7 - Comando de Água na Cuba
- 8 - Comando de Água no Porta-Copo
- 9 - On/Off do Refletor
- 10 - On/Off Luz da Fibra Ótica
- 11 - On/Off Air Jet
- 12 - On/Off Thermo Comfort
- 13 - Negatoscópio
- 14 - On/Off Negatoscópio
- 15 - Display
- 16 - Teclas de Ajuste
- 17 - Adjust/Enter (Tecla Ajuste/Entra)
- 18 - Reset/Esc (Tecla para Restabelecer/Sair)
- 19 - Reverse (Tecla de Reverso)
- 20 - Indicadores de Transmissão
- 21 - Select (Tecla de Seleção)
- 22 - Memory (Teclas de Memória)
- 23 - Manual Star (Partida Manual)
- 24 - Program (Programa)
- 25 - Gear Ratio (Relação de Transmissão)
- 26 - Direcional
- 27 - Setting (Configuração)