

# Guia Rápido de Operação Siena - Descrição das Partes e Comandos do Equipamento



Antes de utilizar o equipamento, leia com atenção o *Manual do Usuário Linha Odontológica*.




A função deste guia é identificar comandos, partes e instrumentos que podem ser disponibilizados no equipamento, incluindo itens opcionais. Este guia não define a configuração do equipamento que pode variar de acordo com o pedido do cliente.



Em caso de perda do *Manual do Usuário* e/ou *Guia de Operação*, entre em contato com o Pós Venda da Olsen (posvenda@olsen.odo.br) informando o número de série do seu equipamento.

## Equipo

### Antes de ligar o equipamento:

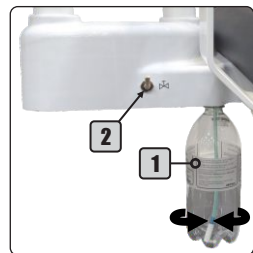

- 1 - Tanque de Água
- 2 - Válvula de Pressurização

1º - Verifique se o equipamento se encontra devidamente instalado, conforme instruções do capítulo 6 do *Manual do Usuário Linha Odontológica*;  
2º - Ligue o compressor que abastece o equipamento;  
3º - Abra o registro de alimentação de água do equipamento;  
4º - Ligue o disjuntor de alimentação elétrica do equipamento.

## Refletores


### Evolution Plus



### LED Premium



### Concept Plus

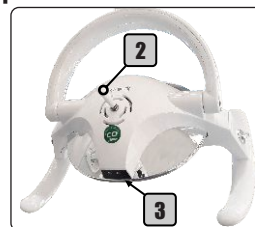

- 1 - Botão de Controle
- 2 - Haste de Controle
- 3 - Sensor

## Unidade de Água



- 1 - Comando Água no Porta Copo
- 2 - Comando Água na Cuba
- 3 - Registro de Fluxo de Água
- 4 - Área para Instrumentos

A unidade de água pode apresentar comandos de água da cuba (1) e do portacopo (2), na lateral da Unidade de Água, na Base de Comandos ou no Pedal Remoto, conforme a configuração do equipamento. Caso possua porta-copo, o acionamento pode ser manual ou temporizado e o duto é removível.

Para controlar a vazão de água do portacopos e da cuba utilize o registro (3).

## Base da Cadeira

### Ligando o equipamento:



- 1 - Interruptor On/Off da Cadeira
- 2 - Porta-Fusível


1º - Ligue o interruptor On/Off na base da cadeira;  
2º - Acione o comando "Sobe Assento" na base da cadeira até que ela atinja seu limite de altura máxima;  
3º - Feche a válvula de pressurização - seção *Equipo* (2);

4º - Verifique se o tanque de água - seção *Equipo* (1) - está cheio. Se necessário, remova-o e encha-o com água mineral ou filtrada até o limite indicado e acople-o novamente à plataforma. Se desejar coloque produtos profiláticos (de baixa concentração);

5º - Abra a válvula de pressurização e verifique se o tanque de água está bem acoplado e sem vazamentos;

6º - Verifique o funcionamento dos instrumentos, negatoscópio, cuspeadeira, sugadores e refletor. Reponha o pó no reservatório de profilaxia (quando houver);

## Comandos

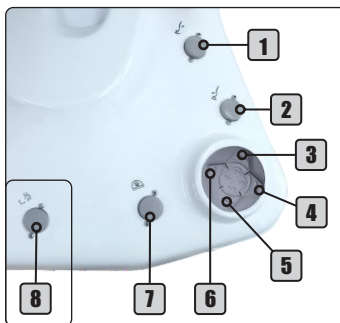


- 1 - Volta à Zero
- 2 - Posição de Trabalho
- 3 - Sobe Encosto (↗)
- 4 - Desce Assento (↓)
- 5 - Desce Encosto (↘)
- 6 - Sobe Assento (↑)
- 7 - On/Off do Refletor
- 8 - Água na Cuba
- 9 - On/Off Sugador Elétrico
- 10 - Pedal de Propulsão

### Para gravar uma posição de trabalho:

1º - Pressione Volta à Zero;  
2º - Ajuste o encosto na posição

desejada; 3º - Ajuste o assento na posição desejada; 4º - Pressione por 5 seg. o comando Posição de Trabalho. O equipamento emitirá 2 bipes longos; 5º - Pressione o comando Sobe Assento enquanto o equipamento está emitindo o bipe; O equipamento emitirá 2 bipes curtos para confirmar o procedimento. 6º - Pressione o comando Volta à Zero.

## Módulo Auxiliar

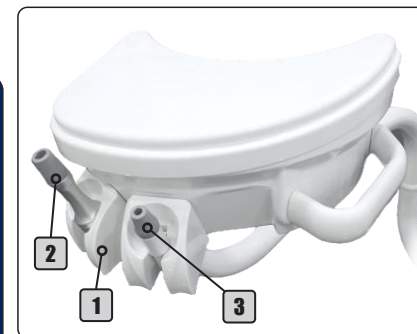

- 1 - Suporte de Instrumentos
- 2 - Sugador de Alta Potência Vórtice
- 3 - Sugador Venturi

1º - Para ativar o refletor pressione o botão de On/Off do refletor na base da cadeira (seção *Comandos* - 7), essa ação também habilita o sensor (3) e o botão/haste de controle (2);

2º - Para mudar a intensidade de iluminação do refletor Evolution Plus, mantenha o botão de comando - seção *Comandos* (7) - pressionado por mais de 2 segundos;

3º - Para ligar ou desligar os refletores Concept Plus e LED Premium, passe a mão na frente do sensor (3) a aproximadamente 5 cm de distância ou segure a haste de controle (2), no caso do Concept Plus, ou gire o botão de controle (1), no caso do refletor LED Premium;


4º - Para mudar a intensidade de iluminação dos refletores Concep Plus e LED Premium, mantenha a mão na frente do sensor (3) ou segure a haste de controle (2), no caso do Concept Plus ou gire o botão de controle (1), no caso do refletor LED Premium.



# Guia Rápido de Operação Siena - Descrição das Partes e Comandos do Equipamento

Mesas Odontológicas


Mesa Siena

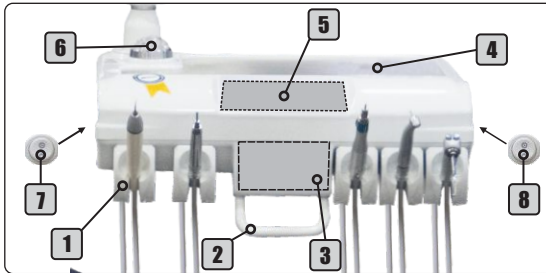


As mesas odontológicas podem apresentar algumas configurações de painéis de comando, variando conforme instrumentos disponíveis.

Painéis de Comando

Painéis de Comando Blue Touch

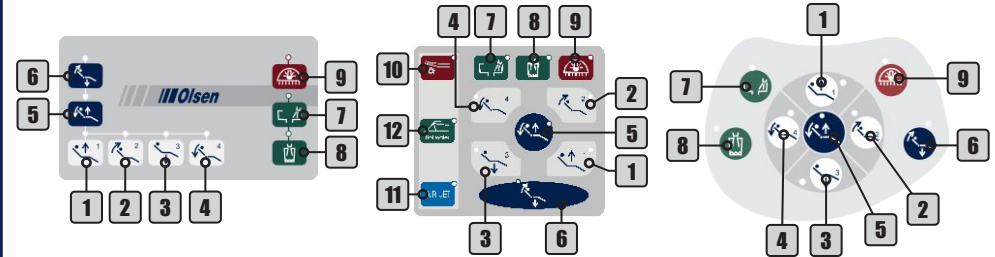

Mesa Cross Flex

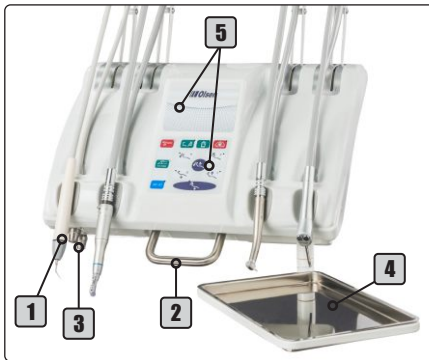


- 1 - Suportes para Instrumentos
- 2 - Alça Capacitiva
- 3 - Painel de Instrumentos
- 4 - Bandeja Inox
- 5 - Painel de Comandos
- 6 - Reservatório de Bicarbonato de Sódio
- 7 - On/Off Fibra Óptica/Air Jet
- 8 - On/Off Thermo Comfort




Somente movimente a mesa através da alça capacitiva

Painel de Comandos - Negatoscópico

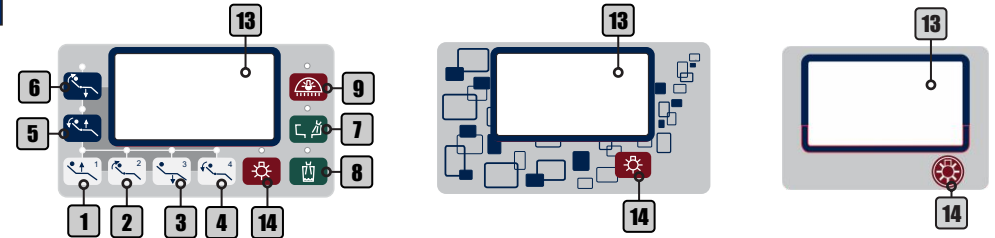

Painel de Comandos - Micromotor Brushless

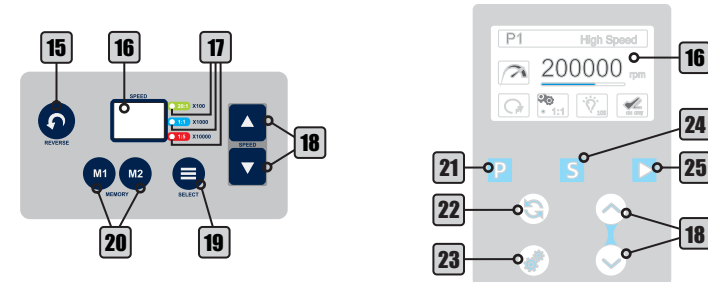


SIENA


Painéis de Instrumentos e Braço



- 1 - Controle de Velocidade do Micromotor Elétrico
- 2 - Inversor de Rotação do Micromotor Elétrico
- 3 - Controle de Potência do Ultrassom e Seletor de Funções Geral-Pério/Endo
- 4 - Controle de Água do Ultrassom

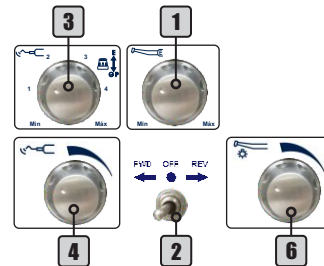

- 5 - Controle de Água do Micromotor Elétrico
- 6 - Controle de Água da Fibra Óptica
- 7 - Led do Thermo Comfort
- 8 - Válvula de Freio Pneumático

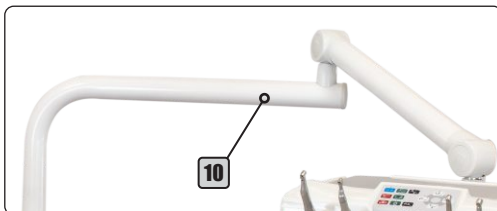

O Braço Flex apresenta 2 articulações (1) e sistema de freio pneumático que é desativado através do acionamento da válvula pneumática (2) ou por toque na alça capacitiva (3) liberando a movimentação da mesa.

- 1 - Sobe Assento/Posição 1
- 2 - Sobe Encosto/Posição 2
- 3 - Desce Assento/Posição 3
- 4 - Desce Encosto/Posição de Cuspir
- 5 - Posição de Trabalho
- 6 - Volta à Zero
- 7 - Comando de Água na Cuba
- 8 - Comando de Água no Porta-Copo
- 9 - On/Off do Refletor
- 10 - On/Off Luz da Fibra Óptica
- 11 - On/Off Air Jet
- 12 - On/Off Thermo Comfort
- 13 - Negatoscópico

- 14 - On/Off Negatoscópico
- 15 - Reverse
- 16 - Display
- 17 - Indicadores de Transmissão
- 18 - Teclas de Ajuste
- 19 - Select (Tecla de Seleção)
- 20 - Memory (Teclas de Memória)
- 21 - Program (Programa)
- 22 - Direcional
- 23 - Gear Ratio (Relação de Transmissão)
- 24 - Setting (Configuração)
- 25 - Manual Star (Partida Manual)

SIENA