

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Montagem da Cadeira Hemodiálise


A nova Cadeira Hemodiálise apresenta articulação independente do encosto, novidade em relação a Cadeira Hemodiálise Sincronizada, que faz a movimentação conjugada de assento e encosto. Esta Cadeira é fornecida com o encosto separado do assento. Confira abaixo o procedimento correto para instalação do encosto:



Após remover a cadeira da embalagem, conecte o equipamento a rede elétrica, observando tensão compatível com o equipamento.

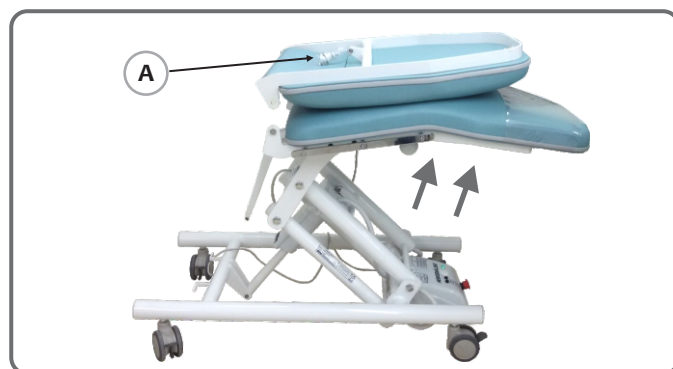


Ajuste o assento para a posição mais alta e separe o kit de acabamentos dos parafusos (A).

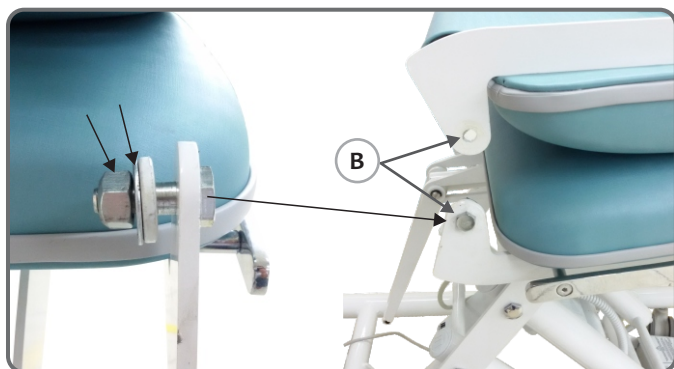


Com duas chaves de boca 19mm, retire apenas a porca e a arruela, e alinhe a base do encosto para fixação na estrutura do assento (B).



Passe o parafuso deixando o espaçador plástico (C) entre a o encosto e o assento, encaixe a arruela e a porca e aperte, com as chaves de boca 19mm.

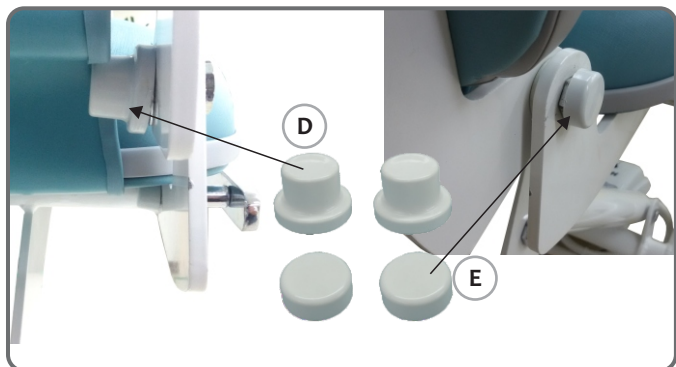

Após instalar os dois parafusos de fixação do encosto, coloque as capas dos parafusos, a maior cobre a porca (D) e a menor cobre a cabeça do parafuso (E).

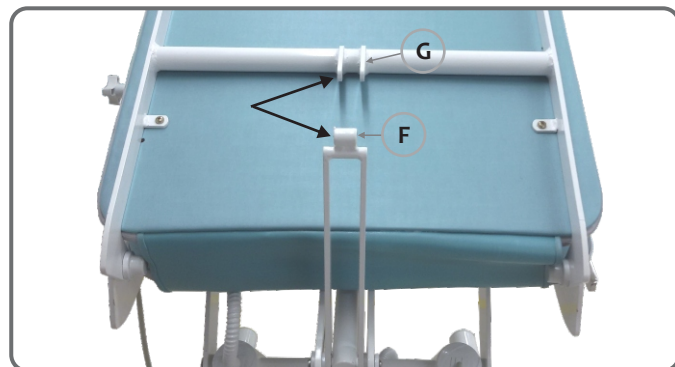


Levante o encosto e alinhe o articulador (F) com a estrutura do encosto (G)




Passe o pino pelo articulador e a estrutura do encosto e coloque a trava pino.



Após instalar o encosto, solte os parafusos de fixação das travas do assento (H), localizados na parte inferior do assento.

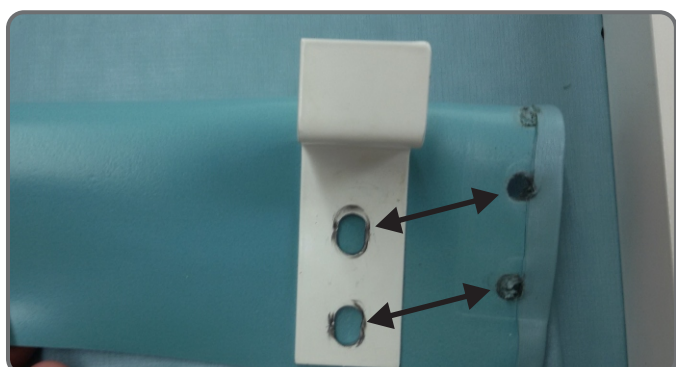

Alinhe o PVC de acabamento com os furos do assento e da trava.

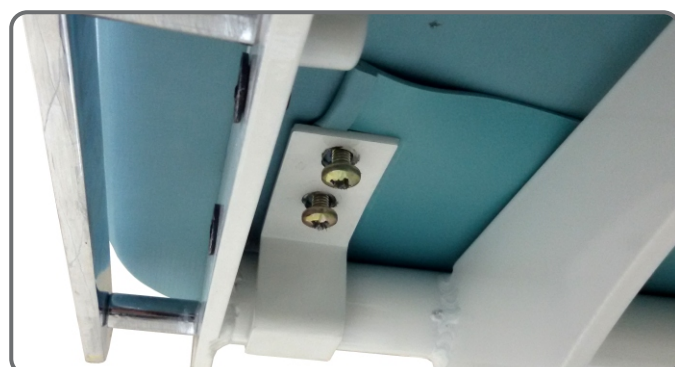

Fixe as travas com o acabamento de PVC sob o assento.

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA789/13 , em 26, setembro de 2014

Olsen Indústria de Equipamentos Odontomédicos
Av. Ivo Lucchi, 68 - Distrito Industrial - Palhoça - Santa Catarina - Brasil - Caixa Postal (P.O. Box) 59 - CEP 88133-510
Fone/Fax: + 55 48 2106 6000 - www.olsen.odo.br