


OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Atualização Placa Logic Infinity

Com a consolidação da eletrônica utilizada na Placa CPU Cadeira Infinity / Logic RS 232, foi possível fazer melhorias na placa, para torná-la ainda mais segura e eficiente. Confira as mudanças:

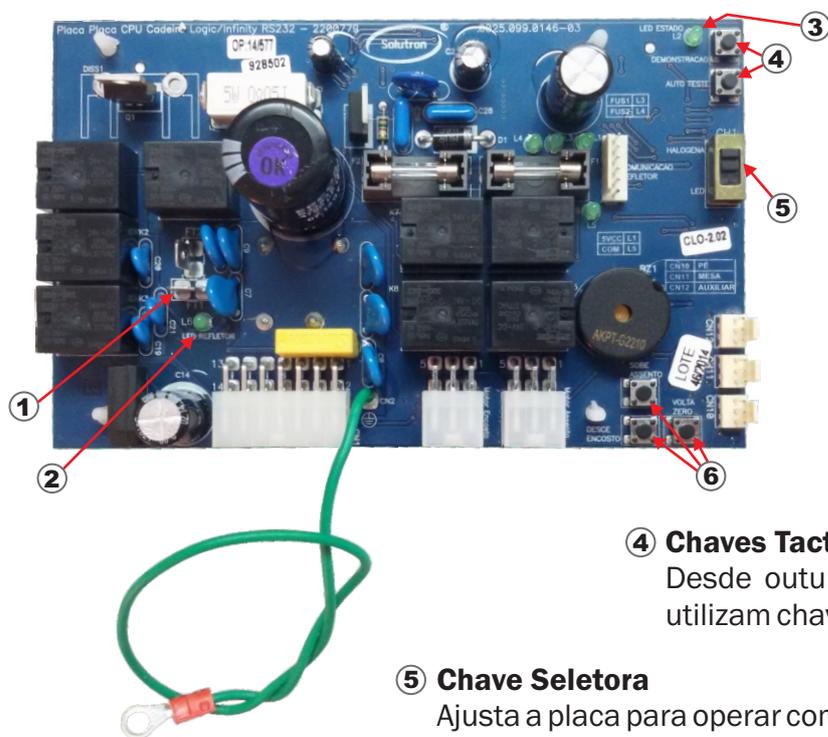

① **Ft1 e FT2 - Conector do refletor**
Implementado desde outubro de 2014, a conexão sobre a placa, dispensa o cabo soldado.

② **L6 - LED Refletor**
Quando este LED está aceso, indica que a placa está enviando tensão para o refletor.

③ **L2 - LED Estado**
Indica que a placa está operando com Refletor de LED. O LED L2 acende quando a placa recebe comandos para o refletor.

④ **Chaves Tactil**
Desde outubro de 2014 os comandos DEMO e AUTO TESTE utilizam chave Tactil no lugar de *jumpers* para o acionamento.

⑤ **Chave Seletora**
Ajusta a placa para operar com Refletor de lâmpada Halógena ou Refletor de LED.

⑥ Chaves Tactil para Comandos da Cadeira

Os comandos SOBE ASSENTO, DESCE ENCOSTO E VOLTA ZERO, agora podem ser executados diretamente na placa através das chaves Tact, sem necessidade de instalação do equipo.

A nova placa também conta com sistema de fonte chaveada incorporada, garantindo estabilidade na tensão de comunicação (5V), mesmo com variação de tensão na alimentação do equipamento, tornando a placa ainda mais resistente a ruídos na linha.

As placas Infinity / Logic terão como padrão a cor azul, enquanto as placas Siena continuam com a cor vermelha. Esta placa é compatível com o modelo anterior. Não há alteração no código e o chicote elétrico permanece o mesmo

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.