



Este documento substitui a **Olsen Tec 17 - Sobre as novas válvulas solenóides**.
Por favor, divulgue esta informação para todos os funcionários de sua empresa.

Novas Válvulas Solenóides

Informamos que a partir de fevereiro de 2015 os equipamentos produzidos com comando eletrônico de porta-copo e água na cuba receberão novas válvulas solenóides.

Antiga - 3100148




Nova - 3100202



As novas válvulas são mais resistentes e possuem filtro interno, porém como não apresentam fios para alimentação elétrica, é necessário solicitar o chicote de adaptação, para substituir as válvulas antigas.

Chicote de Adaptação para Válvula Solenóide Unidade de Água - 9302127

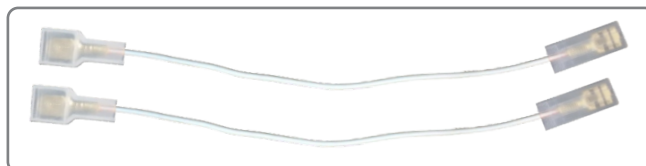

O chicote apresenta dois cabos flexíveis brancos e pode ser utilizado para a válvula solenóide da cuba ou do porta copos.

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.