


OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Novas Bengalas da Unidade de Água

Informamos que a partir de fevereiro de 2015, todos os equipamentos receberão em suas unidades de água dutos de água para o portacopo e para cuba com diâmetro de Ø1/2". Até então, apenas os equipamentos Logic e Infinity utilizavam bengalas com este diâmetro.

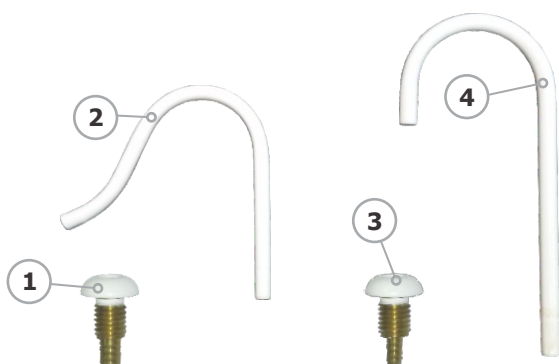

Bengalas e Suportes Antigos

4	Corpo da Bengala do Copo	8200301
3	Suporte da Bengala do Porta-Copos Destacável	8201029
2	Corpo da Bengala da Cuba Destacável	8200639
1	Suporte da Bengala da Cuba Destacável	8201028

X



Bengalas e Suportes Novos

4	Corpo da Bengala Ø1/2" do Porta Copo	8201036
3	Suporte da Bengala Acionamento Manual	8201025
2	Corpo da Bengala Ø 1/2" da Cuba Integrada	8200725
1	Suporte da Bengala Cross Flex	8201022

Além das novas bengalas e suportes, esta alteração trará mudanças também na carenagem superior da unidade de água (furação maior) dos equipamentos **Siena, Sprint, Odonto Portátil** e **Unidade de Água da Performance** (item opcional).

Ao solicitar qualquer uma destas carenagens, é importante informar a data de fabricação do equipamento, para que seja enviada com o diâmetro correto dos furos. Os códigos das carenagens permanecem os mesmos.

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA 1334/14 - Revisão 00 em 28 de janeiro de 2015