

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.


Carenagem Base do Assento Performance



Conforme apresentado na Olsen Info 14, a Mesa Performance teve alteração na inclinação máxima do assento, passando de -30° para -10° .

O primeiro equipamento com esta característica foi produzido no dia 28 de Janeiro de 2015, com número de série 20000315.

Com esta alteração os técnicos devem estar atentos para o novo processo de retirada da Carenagem Base do Assento, conforme apresentaremos a seguir:

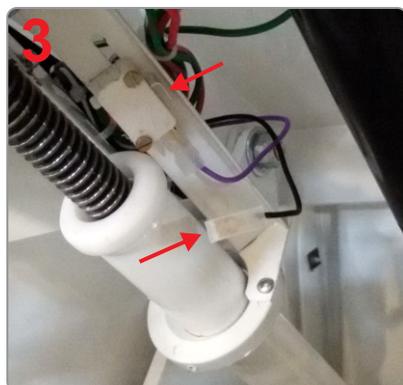

A Carenagem Base do Assento deve ser retirada nos casos de manutenção dos motores e da placa eletrônica.

Para retirar esta carenagem, suba o encosto até seu limite, suba o apoio de pernas e incline o assento ao máximo (imagem 1). Em seguida, retire todos os clips pinça da carenagem (imagem 2).

Através do espaço entre a carenagem e a estrutura da cadeira, localize o motor do assento (cabos preto e roxo na microchave) e retire o cabo preto da microchave (imagem 3).

Pressione novamente o comando de inclinar o assento até que seja possível retirar a carenagem (imagem 4).

Faça esta inclinação do assento, sempre observando o limite de curso do motor, para não danificá-lo.

Após fazer a manutenção, recoloca o cabo preto na parte superior da microchave (imagem 3), antes de recolocar a carenagem.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.