

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

ChronoLub

O sistema ChronoLub é um cronômetro eletrônico utilizado para acompanhar o tempo de uso dos instrumentos pneumáticos das mesas Infinity e Logic. Com painel digital localizado na parte frontal da mesa, o ChronoLub informa ao profissional o momento correto para lubrificação de cada instrumento.

Com este dispositivo, os conjuntos Infinity e Logic ficam ainda mais completos, garantindo maior durabilidade e melhor desempenho dos instrumentos.




Mesa Infinity com sistema ChronoLub



Mesa Logic com sistema ChronoLub



Tela inicial

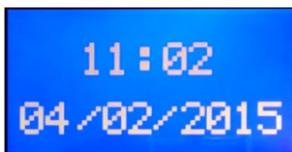

Tela de hora e data

Ao ligar o equipamento, a tela do ChronoLub acende e apresenta a logo da Olsen.

Em seguida, apresenta hora e data (Dia/Mês/Ano).

Ajustes do ChronoLub: Pressione a tecla CONFIRM por 3 segundos na tela de hora e data. Aparecerá a tela SETUP, com as seguintes opções de ajuste:



Tela SETUP com as opções de ajustes do ChronoLub

1. Ajuste o relógio (SET THE CLOCK): Use as SETAS para selecionar a opção 1 e pressione a tecla CONFIRM. Use as SETAS para ajuste e a tecla CONFIRM para seleção.

Pressione CONFIRM por 3 segundos para gravar. Para cancelar, pressione CANCEL.

2. Ajuste a data de aniversário (SET THE BIRTH DATE): Use as SETAS para selecionar a opção 2 e pressione a tecla CONFIRM. Proceda da mesma forma que o ajuste do relógio.

É possível agendar apenas uma data de aniversário.



Tela de ajuste de hora e data



Tela de ajuste de data de aniversário


3. Versão do produto (PRODUCT VERSION): Ao selecionar esta opção a tela apresenta a versão do sistema do ChronoLub.

4. Saída (EXIT): Selecione esta opção e pressione COFIRM para voltar a tela de hora e data.




Modo Demonstração: Para demonstração, o sistema reduz o tempo dos segmentos para 3 segundos, ou seja, em 24 segundos de uso do instrumento, aparecem as informações para lubrificação da ponta. Para ativar o modo Demonstração, pressione as duas SETAS simultaneamente por 10 segundos. Para sair deste modo, repita a operação.


Controle de Lubrificação dos Instrumentos: Quando um instrumento pneumático é removido do suporte, o sistema ChronoLub identifica seu número conforme a posição (1 a 4) e indica o tempo de uso até a próxima lubrificação. O tempo é representado através de um círculo segmentado, que vai apagando os segmentos em sentido horário, de acordo com o tempo de uso do instrumento, conforme imagens abaixo.

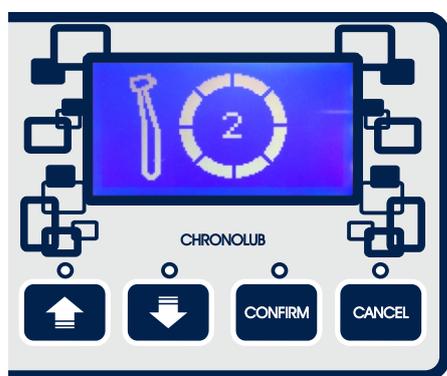

Painel indica que a turbina 2 está com 100% de lubrificação

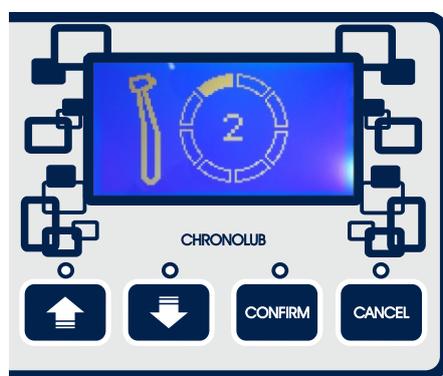

Aqui o painel indica que a turbina 2 deverá ser lubrificada em breve

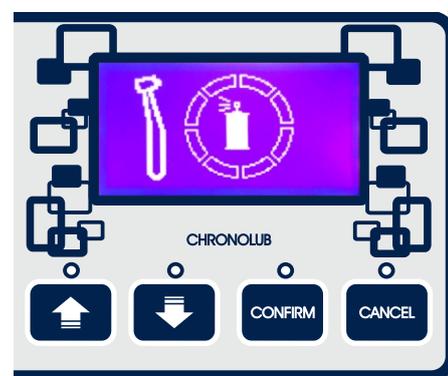

Painel indica que o instrumento em uso deve ser lubrificado

O tempo é contado somente quando o instrumento está em uso, ou seja, quando o pedal de propulsão é pressionado e o instrumento é acionado. Mesmo que o instrumento esteja fora do suporte, se o pedal não for acionado, o sistema ChronoLub não contabiliza o tempo.

Quando o último segmento começar a piscar, significa que o instrumento tem mais 2 minutos de uso antes da lubrificação. Ao esgotar o tempo de uso, a tela mostrará uma lata de spray (conforme imagem acima), alternando com o número do instrumento e aviso sonoro (4 beeps sequenciais) para chamar atenção do usuário para a lubrificação. Enquanto o instrumento estiver fora do acoplamento, o sistema irá emitir o aviso sonoro a cada 10 segundos.

Após a lubrificação do instrumento, o usuário deve pressionar a tecla CANCEL por 3 segundos. O sistema vai reiniciar a contagem do tempo. Este procedimento pode ser feito a qualquer momento, caso seja necessário lubrificar o instrumento antes do tempo indicado.

Função Aniversário: O sistema ChronoLub guarda na memória uma data de aniversário, ou seja, na data especificada, o sistema emite uma mensagem de felicitação ao usuário logo após a tela inicial, quando o equipamento é ligado. Esta mensagem permanece até que o profissional pressione a tecla CANCEL, fazendo o sistema voltar a tela de hora e data.

A mensagem de aniversário aparecerá ainda por 3 vezes durante o dia, nos seguintes horários: 10:00, 15:00 e 17:30.

O sistema agenda apenas uma data de aniversário.



Mensagem apresentada na data de aniversário

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.