

OLSEN TEC


www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Novo Articulador do Braço do Refletor

A partir de agosto de 2014 todos os braços primários do refletor (1) sofreram alteração no diâmetro interno, em virtude da otimização do processo produtivo.

Esta melhoria não apresenta mudanças visíveis, porém acarretou na alteração do diâmetro do Articulador Horizontal Concêntrico (2). Sendo que o articulador antigo possui diâmetro de 24mm, enquanto o novo possui 23mm.

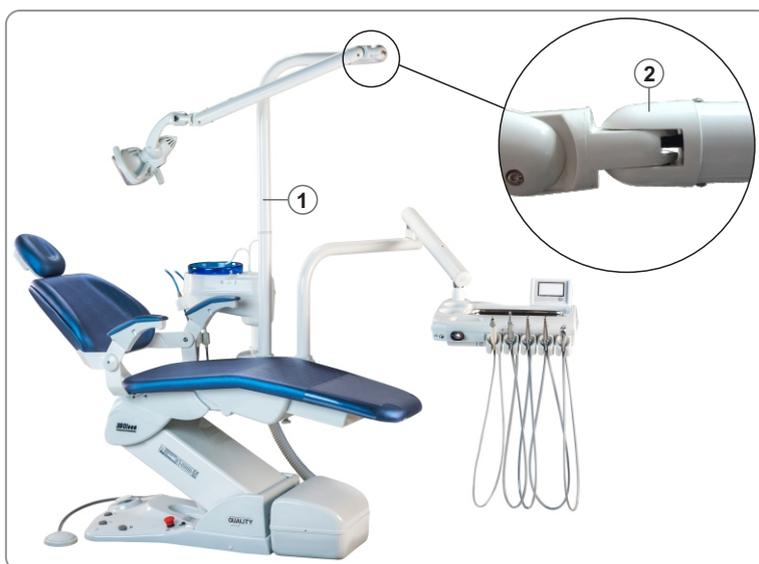

Assim, os equipamentos produzidos antes de Agosto de 2014, utilizam o articulador de código 8100044, enquanto os equipamentos posteriores a esta data utilizam o articulador de código 8102115.



Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.