

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Registro para Sugador Venturi

Informamos que a partir de 1 de julho de 2015 os equipamentos com dois sugadores Venturi receberão um registro para ajuste de fluxo de sucção. A função do novo registro é ajustar o fluxo de sucção do sugador Venturi, de acordo com a necessidade do profissional, além de proporcionar maior economia no consumo de ar comprimido.

Apenas o sugador Venturi mais próximo do encosto poderá ser regulado, enquanto o outro sugador permanecerá com fluxo de sucção conforme pré-estabelecido pela fábrica.



O novo registro será aplicado em todos os equipamentos que possuam dois sugadores, sendo sempre posicionados no parte inferior do Módulo ou da Unidade de Água, no lado mais próximo do encosto da cadeira.

Se os sugadores estão instalados no Módulo, o registro estará instalado no Módulo.

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.