


# OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Conector da base longa Siena


A partir de novembro de 2015, os equipamentos Siena com base longa saem de fábrica sem a fixação do conector para mangueira corrugada.

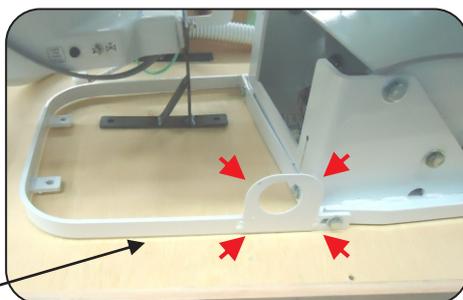

Essa alteração tem o objetivo de evitar que o equipamento sofra danos de transporte, já que o conector fica muito próximo da lateral da caixa

No momento da instalação do equipamento o técnico deve fixar o conector com os dois arrebites, antes de fazer a conexão das mangueiras.

A embalagem com o conector e seus arrebites está na lateral do estofamento ou na própria base da cadeira.

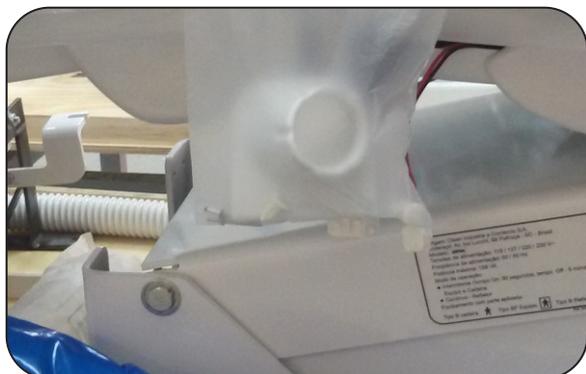

**Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**