



OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Nova Placa para Comando de Água na Cuba - linha Siena

Informamos que a partir de 04 de dezembro de 2015 os equipamentos Siena com comando eletrônico de água na Cuba na base passam a utilizar a nova placa para Água na Cuba (2200840). Os equipamentos Siena produzidos antes desta data, quando fabricados com este comando, utilizavam o sistema eletrônico da linha Logic/Infinity, porém com a utilização desta nova placa, o sistema eletrônico permanece com a placa Siena.

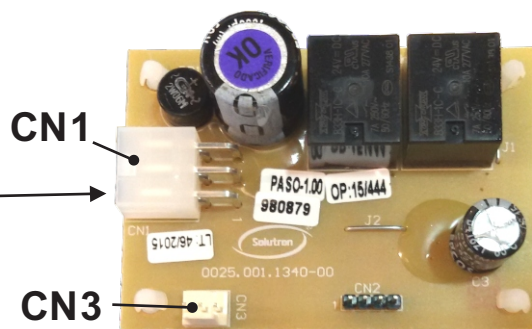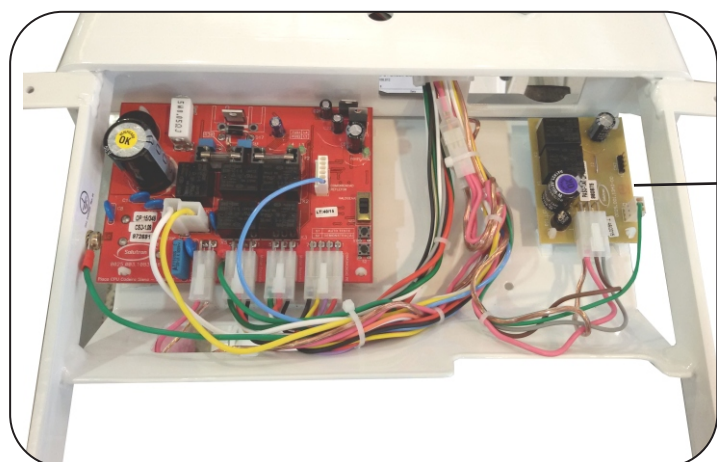

Placa Porta Copo / Cuba Para Siena / Quality
Código: 2200840

Conectores da Placa

CN1: 6 Vias



- 1-Rosa: 24VCA
- 2-Cristal: 0VCA
- 3-Marrom: 0VCC Microchave / Solenóide
- 4-Vazio.
- 5-Cinza: 24VCC Solenóide
- 6-Vazio

CN3: 3 Vias



- 1-Vazio
- 2-Verde: Sinal Microchave
- 3-Vazio

Esta placa não se aplica caso o equipamento possua painel *Blue Touch*.

Neste caso o equipamento utiliza eletrônica Logic/Infinity.

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.