

OLSEN TEC


www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com o objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa



Bandeja Auxiliar do Siena Cross Flex

Para garantir a integridade do equipamento em sua embalagem original e evitar danos durante o transporte, o novo Siena Cross Flex terá a estrutura da bandeja auxiliar separada da mesa.

Ao abrir a embalagem o técnico irá localizar a estrutura da bandeja e o anel elástico embalados ao lado da plataforma do equipo.

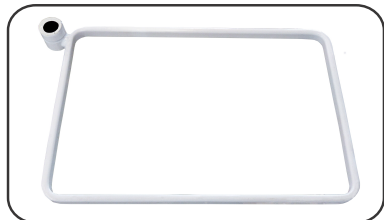

Após instalar o equipo, o técnico poderá instalar a estrutura da bandeja auxiliar, encaixando-a no eixo fixo da Mesa Cross Flex e aplicando o anel elástico para finalizar sua instalação.

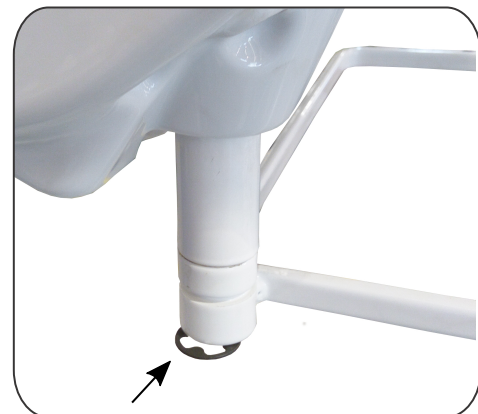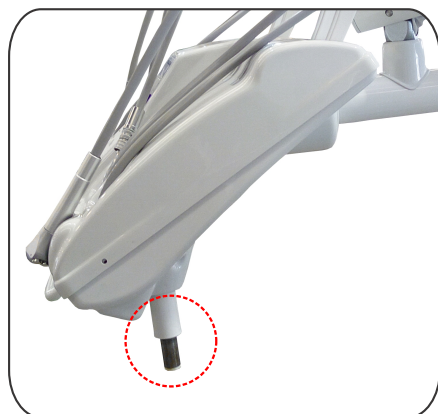

Continuamos a disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA 1548/15 - Palhoça - SC - 01/04/2016