

Remoção do Anel Elástico da Plataforma

Informamos que a partir de 13 de maio de 2016 os anéis elásticos foram removidos das plataformas Siena e Sprint.



Detalhe dos dois anéis elásticos na estrutura metálica da plataforma Siena.

O propósito da aplicação dos anéis elásticos era manter os parafusos nos seus alojamentos respectivos para agilizar o processo de instalação, porém a plataforma já apresenta rosca para fixação do parafuso. Além disso, foi constatado que os Equipos instalados com os anéis elásticos entre a plataforma e a cadeira apresentam menos estabilidade.

Orientamos aos técnicos credenciados para a remoção dos anéis elásticos antes da montagem do Equipos na cadeira.

Os anéis elásticos podem ser facilmente removidos com auxílio de uma chave de fenda.



Anéis elásticos devem ser removidos da plataforma do Equipos antes de sua instalação na cadeira.