

**Nova Cadeira Sprint e Reforço do Encaixe da Plataforma**

A partir de julho de 2016 as cadeiras Sprint e Sprint T receberam as seguintes melhorias:

- Nova estrutura de plataforma, igual a que é utilizada no modelo Siena.
- Nova estrutura de base, com carenagem da base bipartida e nova carenagem frontal da base.
- Nova estrutura do assento, igual ao modelo Siena, com acabamento metálico e nova carenagem do assento.



**1-(8102135) Carenagem do Assento Sprint p/ garfo**  
**2-(8102218) Carenagem Base Bipartida Siena 2016**



**3-(8002663) Chapa de Acabamento da Placa Sprint**  
**4-(8102274) Carenagem Frontal da Base Sprint**

**Atenção:**

- A carenagem da base (8102218) é a mesma utilizada para a linha Sprint e linha Siena. Assim, ao solicitar este item, o técnico deve especificar qual é o modelo do equipamento e sua configuração.

- Para remover a carenagem frontal da base Sprint (8102274) primeiro empurre a carenagem para frente, para desencaixá-la da base (A), enquanto ainda empurra a carenagem, levante-a (B) para sua retirada completa.



Informamos que neste mesmo período, o sistema de encaixe das plataformas das linhas Siena e Sprint foi reestruturado e reforçado, resultando em melhor estabilidade das plataformas.

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**