



## Suporte de Monitor

Informamos que a partir da segunda quinzena de junho o suporte de monitor recebeu alterações na fixação do monitor. O monitor não apresenta mais a aba de fixação e o parafuso de fixação foi alterado de M5x8 para M4x8.

Segue o instrutivo de instalação do suporte de monitor:

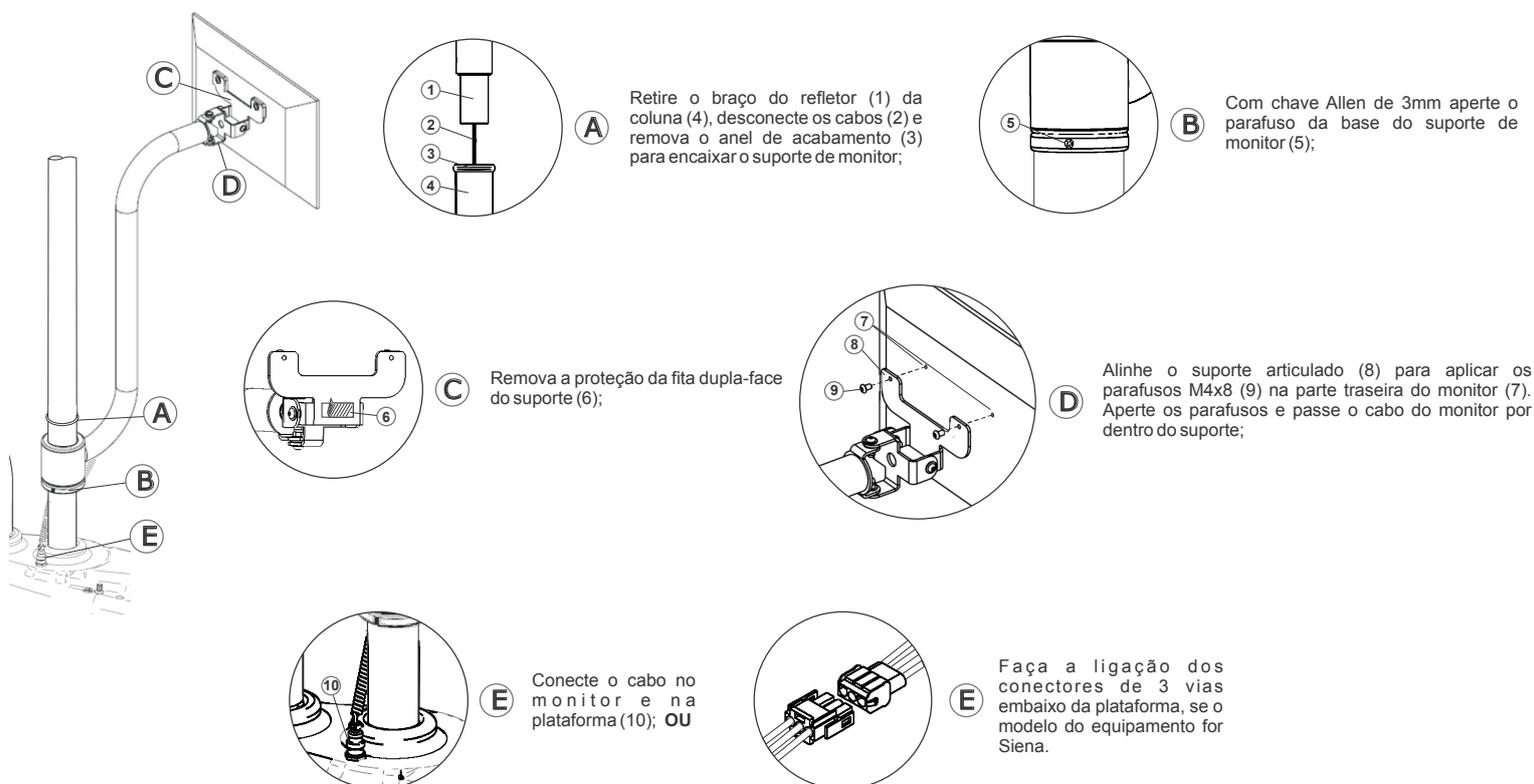

### 2-Suporte de Monitor com Adaptador Universal

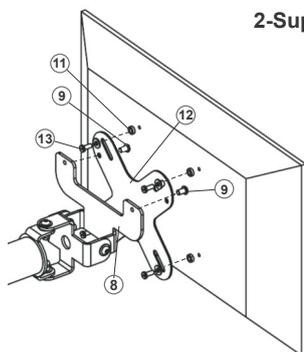

- Siga os passos A e B do item 1 (Suporte de Monitor Padrão - com Monitor) para fixação do suporte na coluna do refletor.

- Aplique os parafusos M4x8 (9), fixando o adaptador universal (12) no suporte (8), aplicando os parafusos na direção oposta ao monitor;

- Aplique os parafusos (13) para fixar o monitor no suporte universal, utilizando os espaçadores (11) entre o monitor e o suporte;

O adaptador universal (12) não é disponibilizado para o suporte de monitor padrão - com monitor.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.