

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com o objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa


Substituição da Placa do Refletor de LED

Orientamos aos técnicos autorizados Olsen quanto aos cuidados com o manuseio da Placa do Refletor de LED, para que em situações de manutenção do cabeçote ou da placa, não sejam utilizadas ferramentas para remoção da mesma.


O técnico deve ter o cuidado de remover a placa somente com as mãos, evitando o toque sobre componentes ou extremidades de conectores.

Cerca de 50% das placas recebidas para manutenção apresentam danos causados por ferramentas.



Segue abaixo exemplos de placas danificadas por uso de ferramentas:

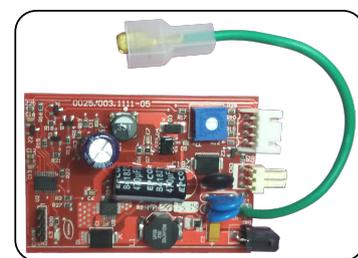

Placa do Refletor de LED

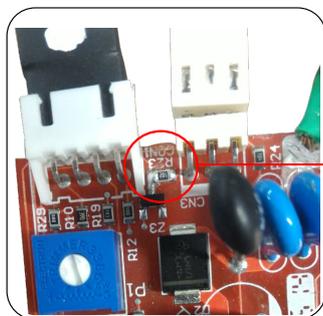

Placa e Resistor SMD danificados com o uso do alicate.

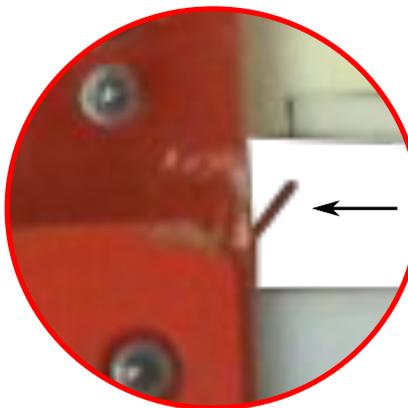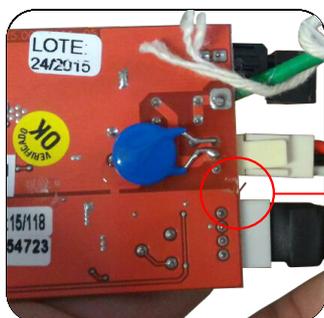

Placa danificada com o uso do alicate.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Palhoça - SC - 23/08/2016