



Mesa Performance - Carregador de Bateria e Chicote

A partir da segunda quinzena de novembro de 2015 a Mesa Performance recebeu alteração na alimentação da placa carregadora de bateria, alterando a entrada de 30Vca para 22Vca. Este procedimento melhorou o desempenho da placa, e aumenta a durabilidade da bateria.


Para os casos de **substituição da placa principal** em equipamentos produzidos antes desta data (18/11/2015), é necessário fazer a alteração da alimentação da placa conforme ilustrado a seguir:

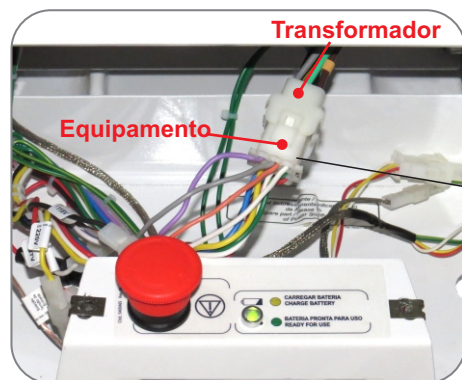

1-Identifique o conector de distribuição do equipamento.

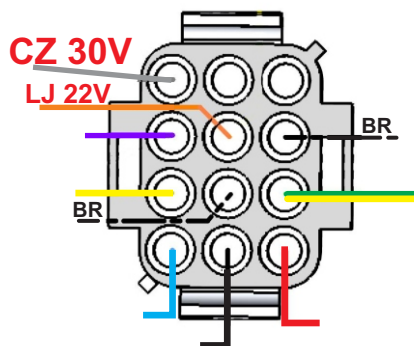

2-Remova o cabo cinza (CZ 30V) do conector de distribuição.

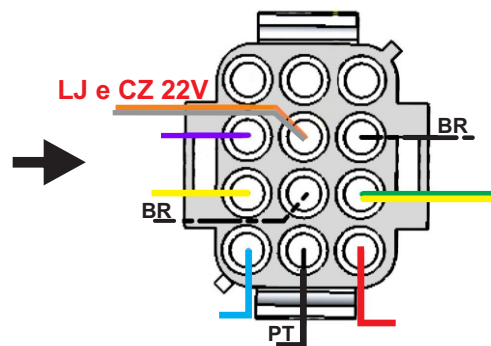

3-Conecte o cabo cinza com o cabo laranja (LJ 22V) no mesmo conector.



Esta operação deve ser realizada com o equipamento desligado, com a seleção de alimentação no modo rede e desconectado da rede elétrica.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA - 06 de outubro de 2016.