

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Novo Sugador

Informamos que a partir da segunda quinzena de janeiro, o sugador HVE irá sair de linha para dar espaço ao novo Sugador de Alta Potência Vórtice. O novo dispositivo possui acionamento elétrico no pedal ou na base do equipo (de acordo com o modelo) e não mais no corpo do instrumento como era o antigo HVE.


O desempenho do novo Sugador Vórtice é maior em relação ao sugador anterior conforme demonstrado nas tabelas abaixo.

HVE (Antigo)



Amostra:	Sugador HVE linha
Pressão de trabalho:	90 PSI
Consumo:	57 litros
Medição Vacuômetro:	745 mmHg
Sucção:	28,8 litros

Vórtice (Novo)

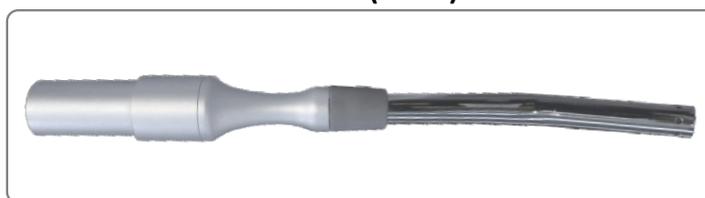

Amostra:	Sugador HVE (3,5mm corpo e Ø 1 mm bico inj.)
Pressão de trabalho:	90 PSI
Consumo:	58 litros
Medição Vacuômetro:	385 mmHg
Sucção:	33,8 litros

Nota: O valor de sucção é medido a partir da pressão atmosférica, onde nenhuma sucção é igual a 760mmHg e o vácuo absoluto é igual a 0mmHg, ou seja, quanto maior a sucção, menor será o valor em mmHg.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.