

# OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.


## Placa Universal para Refletores

Informamos que a partir da segunda quinzena de Fevereiro, os refletores Concept LED recebem uma nova versão da **Placa do Cabeçote de LED Olsen** (Cód. 2200801). Trata-se de uma nova revisão com a versão de software 5.0.

Esta nova placa agregou a função da **Placa Refletor de LED Olsen para Placa Universal** (Cód. 2200823) que é utilizada nos refletores de Módulos de Bancada, refletor Concept LED opcional da Mesa Performance, e equipamentos com refletor Concept LED fabricados até 2015, com a antiga placa universal.



**Placa ANTIGA  
(2200823)**

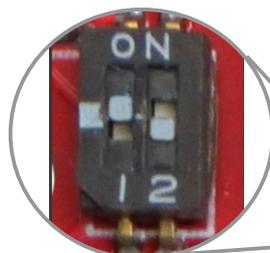

**Chave DIP**




**Placa NOVA  
(2200801)**


A nova placa possui chave DIP que permite o ajuste para operar com placa universal ou com placa RS232.

Configurações da chave DIP para operar com Placa Universal:

Configuração da chave DIP para operar com Placa RS232:

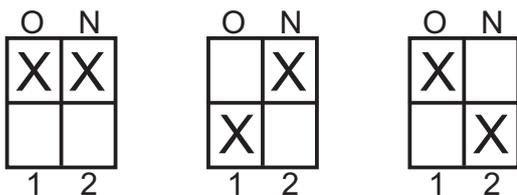


Estas configurações se aplicam para refletores Concept LED instalados em equipamentos com Placa Universal, instalados em Mesas Performance e Refletores de Bancada.

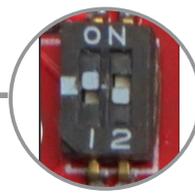

Esta configuração se aplica para refletores Concept LED instalados em equipamentos com Placa RS232 (Produção atual).

Para o manuseio da chave DIP utilize somente ferramentas plásticas ou de material não condutível para evitar danos a placa. As ferramentas abaixo são facilmente encontradas no mercado.

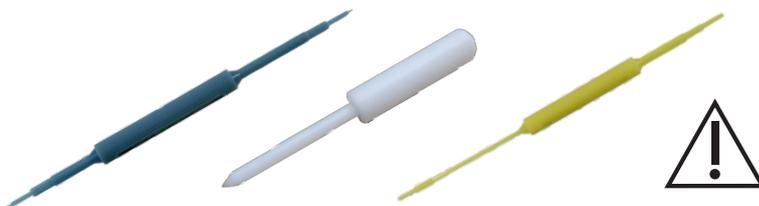

**Não Utilizar objetos metálicos para manuseio da placa pois podem conduzir eletricidade e campo magnético**

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**