

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Substituição de Estofamento - Cadeira Sprint

O propósito deste informativo é apresentar instruções para substituição do conjunto de estofamento da cadeira Sprint, dividido nas seguintes etapas:


- A-Substituição do estofamento do Assento;
- B-Substituição do estofamento do Encosto;
- C-Substituição do estofamento da Cabeceira;
- D-Substituição do estofamento dos braços.

“puxar para frente” o estofamento e “levantar cuidadosamente” o estofamento observando as travas posteriores.

Ferramentas Necessárias



- Chave de Fenda 1/4x6
- Chave Philips 1/4x6
- Chave Allen Hexagonal 5mm

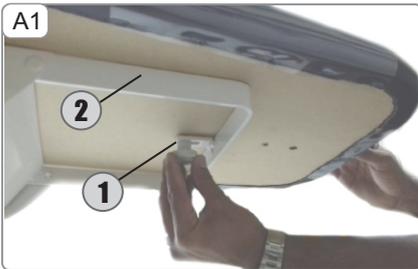

A1-Desrosquear o manipul (1) de fixação do estofamento na parte inferior do assento.



A2-Puxar o assento para frente e levantá-lo cuidadosamente para desencaixar as travas posteriores (3) da estrutura do assento (2).



A3-Detalhe das travas (3) na parte inferior do assento e as aberturas de encaixe (4) na estrutura do assento.




A4-Com a chave Philips soltar as duas travas (3) e fixá-las novamente no estofamento do assento.



A5-Instalar o assento observando o encaixe das travas (A3) e fixando o manipul na parte inferior (A1).



B1-Para substituir o estofamento do encosto, remover a tampa do articulador puxando-a para fora.

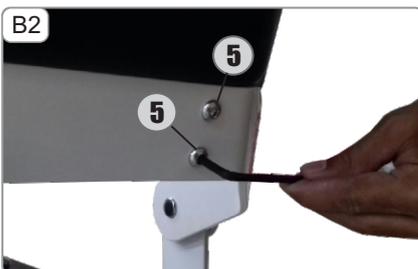


B2-Com a chave Allen remover primeiro os 4 parafusos laterais (5) do articulador do encosto.



B3-Em seguida remover o parafuso central para então retirar o estofamento do encosto.



B4-Para fixar o novo estofamento, encaixar os parafusos com a mão antes de apertá-los com a chave.

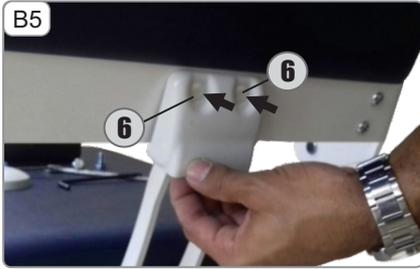

B5-Encaixar a tampa do articulador e pressionar os clips (6) para fixá-la corretamente.



C1-Retirar a cabeceira puxando a haste (7) completamente para fora do encosto.




C2-Desrosquear o manípulo (8).



C3-Com a chave Philips remover os 4 parafusos (8) de fixação da carenagem.



C4-Levantar com cuidado a carenagem o suficiente para acessar a presilha (10) da haste.

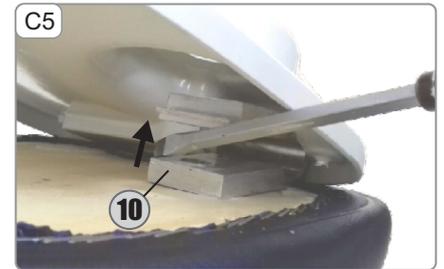

C5-Com a chave de fenda forçar a presilha (10) para cima então remover a haste (7) puxando-a para fora da presilha.




C6-Com a chave Philips soltar a presilha (10) do estofamento antigo e instalar no novo estofamento.



C7-Posicionar a carenagem sobre a presilha e então encaixar a haste (7) na presilha lateralmente.



C8-Fixar os parafusos da carenagem, rosquear o manípulo e instalar a cabeceira no encosto.

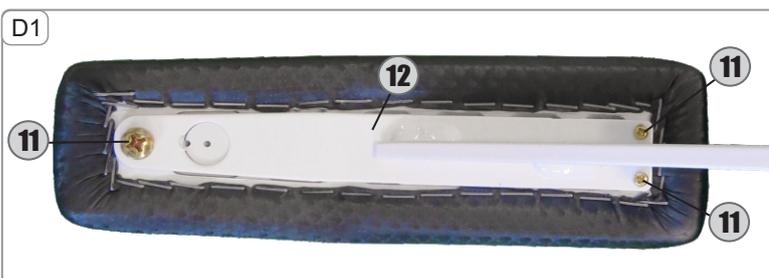

D1-Para substituir o estofamento dos apoios de braço, remover os 3 parafusos (11) da parte inferior de cada apoio de braço com a chave Phillips, encaixar os novos estofamentos nas estruturas metálicas dos braços (12) e fixá-los com os mesmos parafusos (11).

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Palhoça - SC - 10/05/2017 R02