

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Fixação da Cadeira Hemodiálise



Após desembalar a cadeira, retire-a da base de madeira puxando-a para cima, desencaixando os parafusos da base.



Desrosqueie o parafuso que esta fixado na base



Usando uma chave de boca 5/8 rosqueie o pé de fixação na cadeira até o final do curso, então retorne o pé para a posição de fixação desejada.

Após a fixação dos pés na base da cadeira providencie a fixação do equipamento no piso.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.