

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Trava dos Parafusos do Braço Escamoteável

Informamos que a partir da primeira quinzena de Junho os braços escamoteáveis da linha odontológica receberão dispositivo de travamento dos parafusos de fixação do braço.




O objetivo deste dispositivo é impedir que os parafusos afrouxem com a utilização normal do braço escamoteável.

Trava dos Parafusos do Braço Escamoteável Cód. 8002699

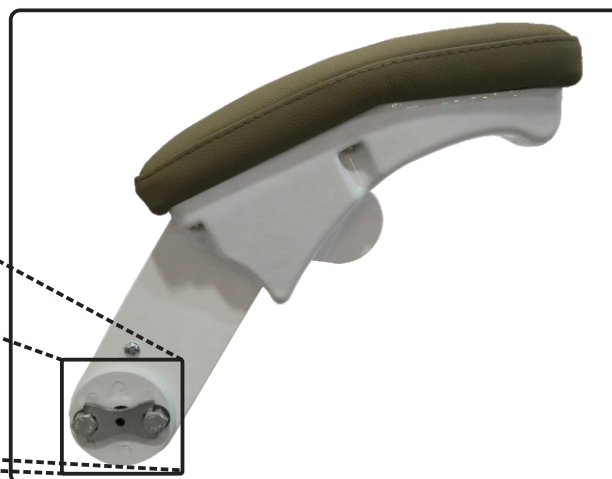

Este dispositivo deve ser aplicado pelo Técnico Credenciado após a fixação do braço escamoteável.

O técnico deverá encaixar a trava em um dos parafusos (1) e apertá-lo ou afrouxá-lo conforme necessário para o alinhamento e encaixe da trava nos dois parafusos, preservando o ajuste de movimento do braço de modo que não fique folgado ou pesado. Se necessário o técnico poderá girar o segundo parafuso (2) para facilitar o encaixe.

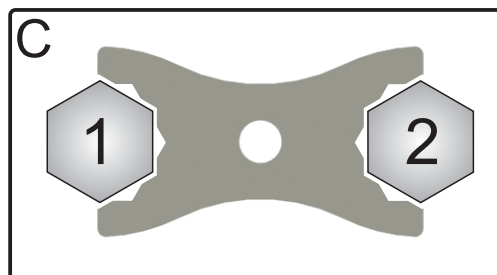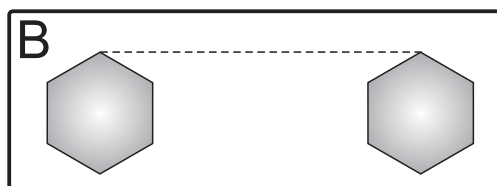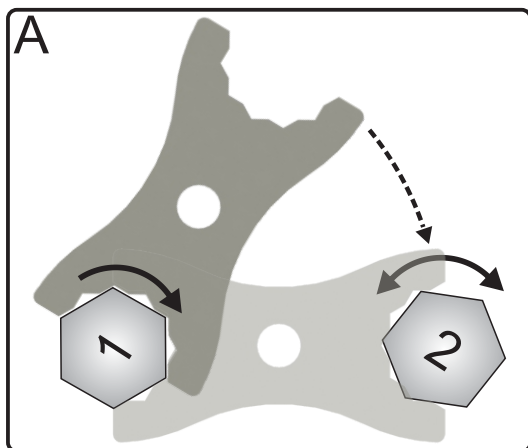

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Palhoça - SC - 31/05/2017