


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

### Mangueira de alimentação da Válvula Solenóide

Informamos que a partir da segunda quinzena de junho será alterada a mangueira de alimentação da válvula solenóide do sistema capacitivo de freio do Braço Flex.

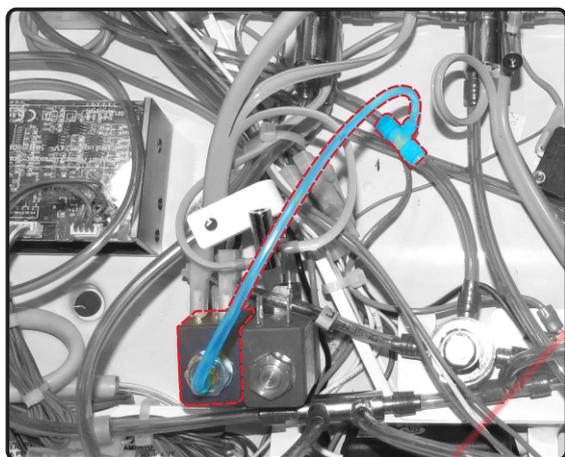

**Mangueira Antiga:** Mangueira PU Azul Ø 2,5 x 0,75 x 470mm

**Mangueira Nova:** Mangueira PU Azul Ø 1,6 x 0,8 x 450 mm

**Válvula Solenóide do Sistema Capacitivo (21710) C/ Abafador**



A alteração tem como objetivo evitar possíveis vazamentos que poderiam ser causados devido ao maior diâmetro da mangueira anterior. Com o desgaste natural de uso poderia ocorrer o afrouxamento da mangueira, causando o vazamento. Na imagem ao lado está um exemplo de afrouxamento na conexão da mangueira com a **Válvula Solenóide**.

Ressaltamos que não há necessidade de substituição das mangueiras em campo, pois não há registro de vazamentos por desgaste.

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**

Palhoça - SC - 09/06/2017