

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Kit Adaptador para Anti-Stress

Com a inserção do novo sistema anti-stress da Atividade como opcional na linha de produtos Olsen, veio também a preocupação em manter condições para manutenção dos antigos sistemas anti-stress da Tholz.

Com a descontinuação da produção do sistema antigo, foi desenvolvido um kit de adaptação, que utiliza os motores instalados no equipamento e substitui a interface e o controle antigo pelo sistema atual Atividade.

Interface e controle Tholz



Interface e controle Atividade




O **Kit Adaptador do Sistema Anti-Stress Atividade (Código 7600079)** consiste em:

- 5 cabos com plug P4, preparados para solda com thermo encolhível para isolamento;
- Interface e controle Atividade;
- Instrução impressa (Olsen Tec 0005);




Para substituir o sistema Tholz pelo sistema Atividade é necessário unir o cabo de alimentação e os cabos dos motores nos respectivos cabos do kit de adaptação, conforme instruções abaixo.


1-Remova da interface o conector da **Zona 2** e corte os dois cabos.

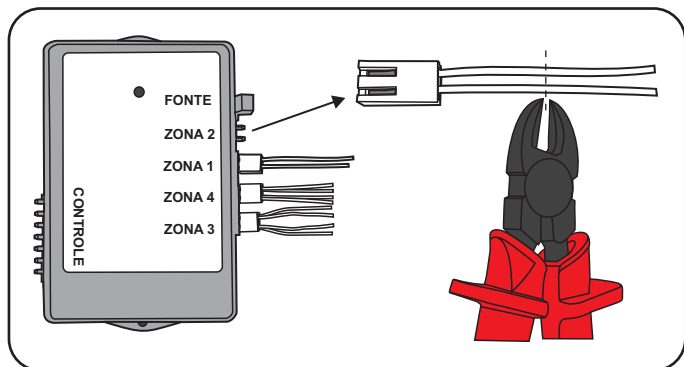


2-Solde individualmente com os cabos **amarelos** do kit adaptador.

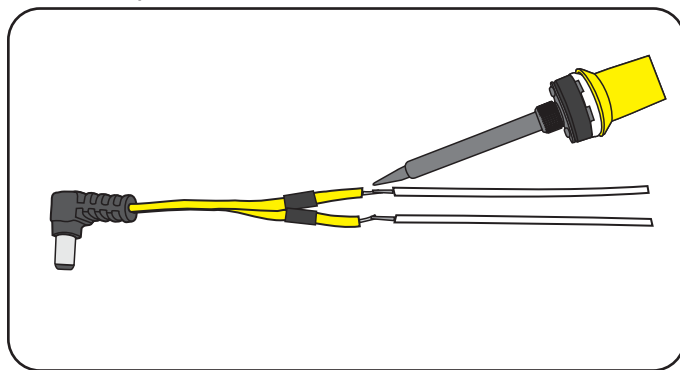


3-Faça o isolamento dos cabos soldados com o soprador térmico.

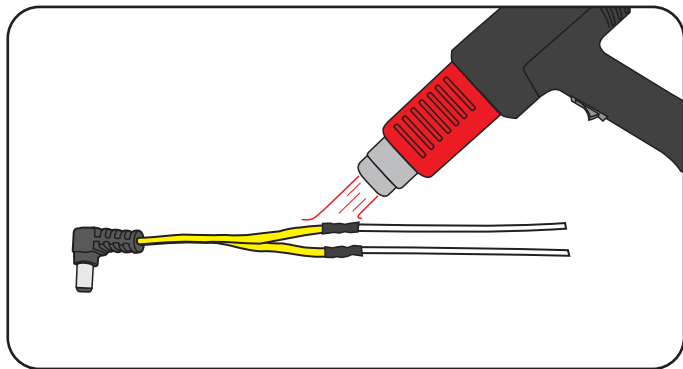


4-Repita o processo, unindo os cabos do conector da **Zona 1** e os cabos **azuis** do kit.

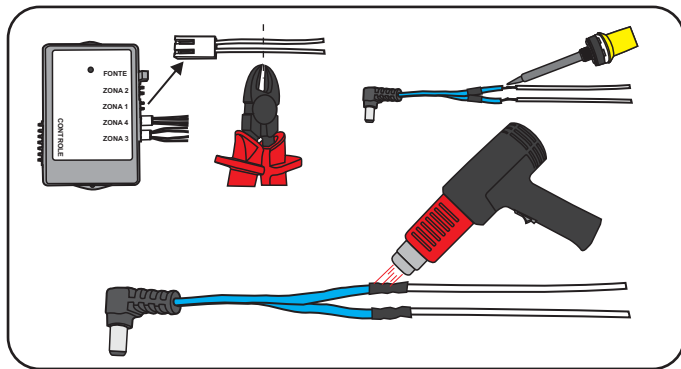


5-Remova da interface o conector da **Zona 4** e corte os quatro cabos.

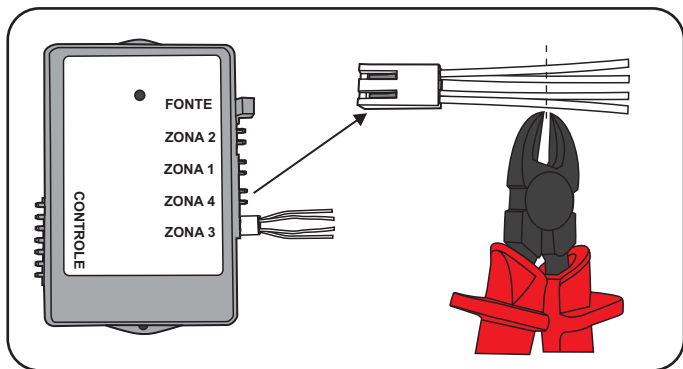


6-Mantenha os pares de cabos do conector, soldando cada par com um cabo **laranja** do kit.

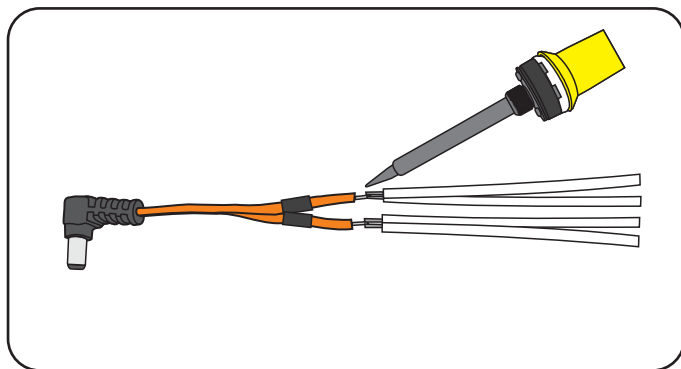


7-Faça o isolamento dos cabos soldados com o soprador térmico.

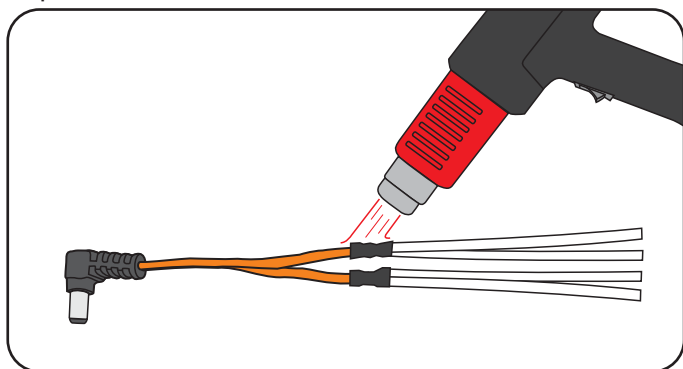


8-Repita o processo, unindo os cabos do conector da **Zona 3** e os cabos **verdes** do kit.

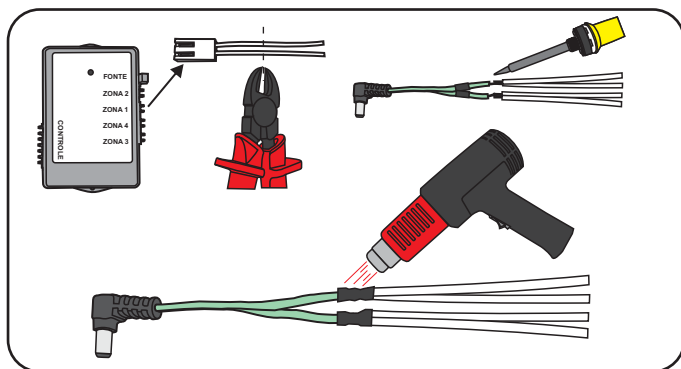


9-Com o equipamento desconectado da rede elétrica, corte o cabo de fonte da interface.

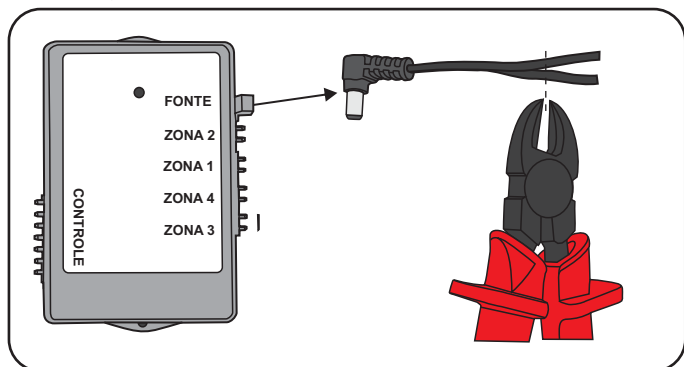


10-Energize a fonte e com um multímetro identifique o 0Vcc (negativo) e o 12Vcc (positivo).

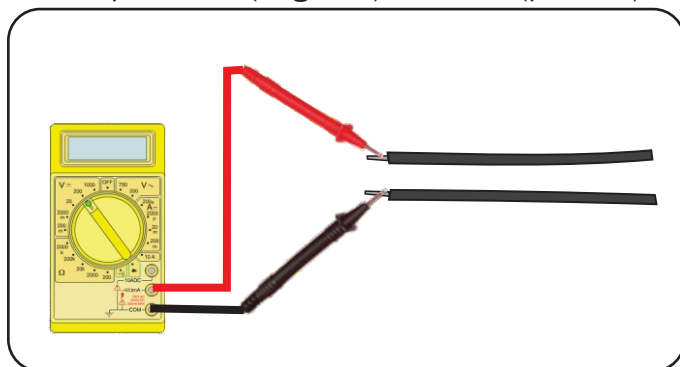


11-Solde o cabo 0Vcc (negativo) com o cabo **preto** e o cabo 12Vcc (positivo) com o cabo **preto/branco** do kit adaptador.

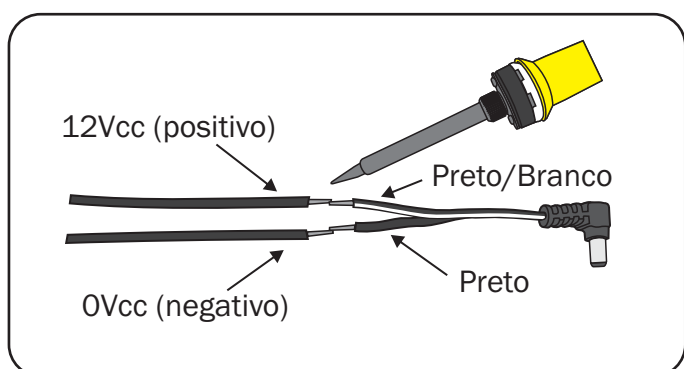

12-Faça o isolamento dos cabos.

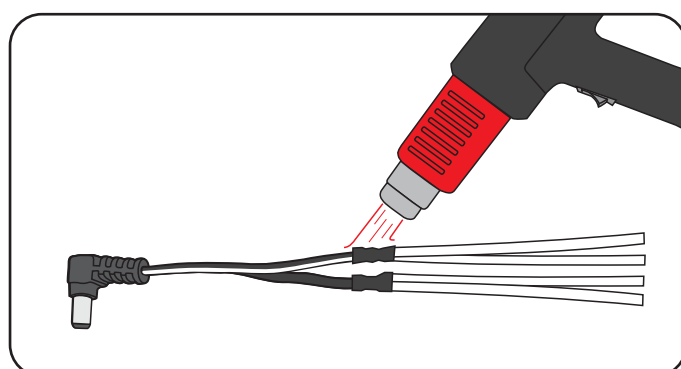

Conecte o plug da fonte e os plugs P4 dos motores, de acordo com as respectivas cores indicadas na interface. O controle dos motores ficará disposto conforme apresentado na imagem abaixo.

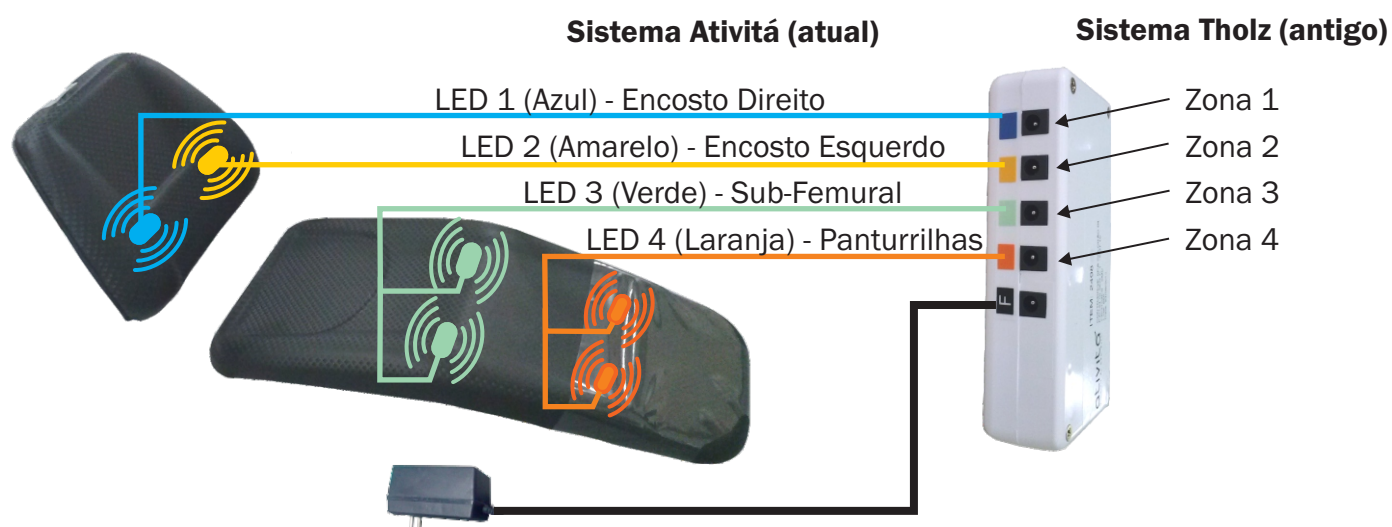

Mais informações sobre o funcionamento do sistema Anti-Stress Aktivá disponíveis na Olsen Info 63.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.