


OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Suporte de Monitor Kart K10

Atenção! Observe o novo sistema de fixação do Suporte de monitor do Kart K10.

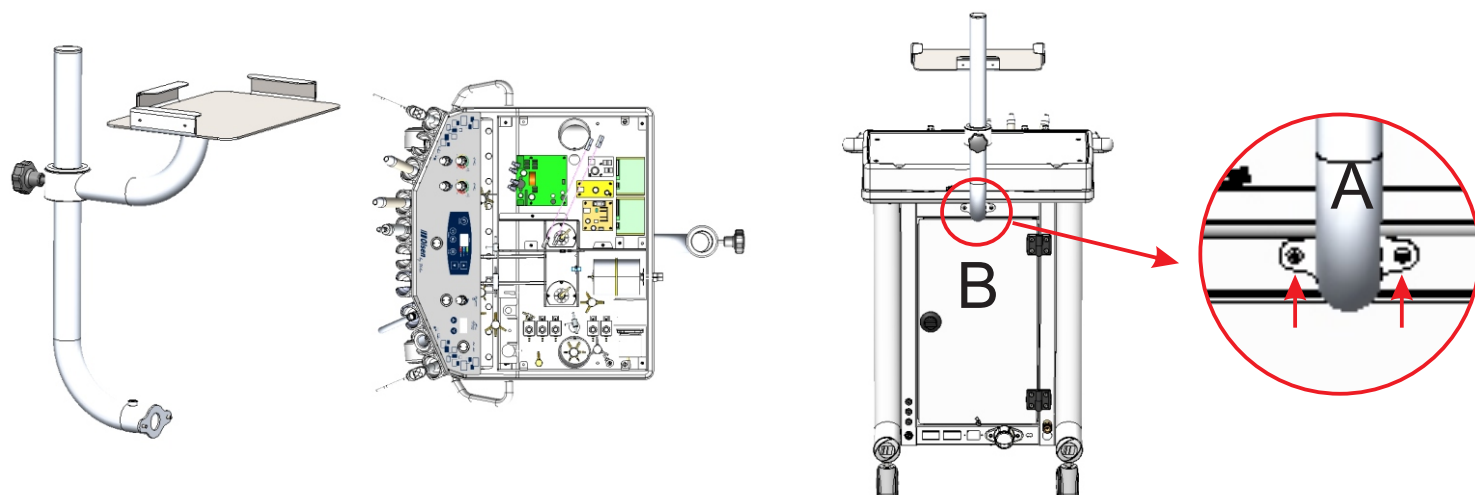

O Técnico deverá retirar a carenagem superior do Kart, acoplar o suporte (A) no Kart e fixá-lo com os 2 parafusos M5x12 (B). Na parte interna do Kart, fixar o suporte com o parafuso M5x16 (C) prendendo-o na estrutura do Kart (D).

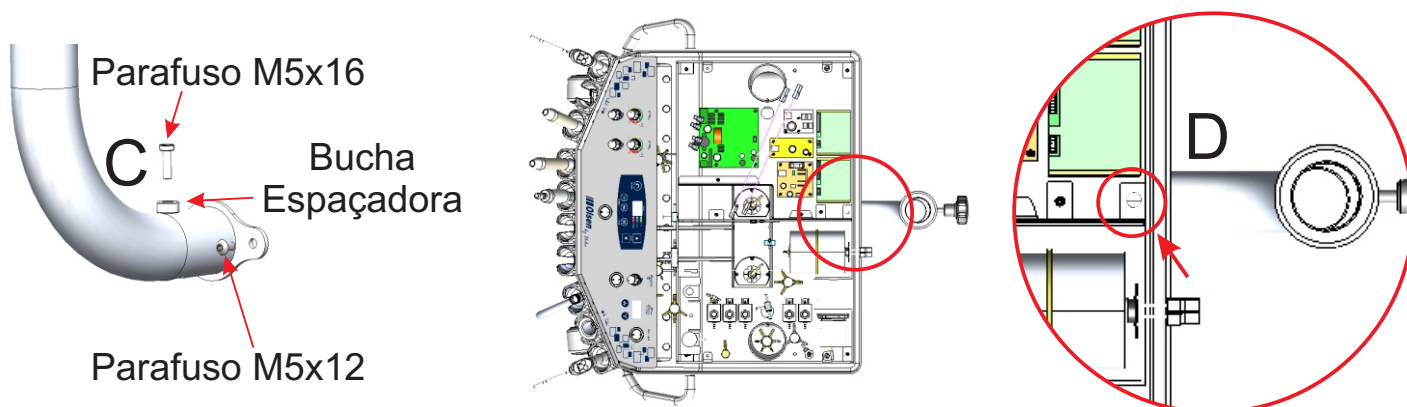

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Palhoça - SC - 24/08/2017