

OLSEN TEC




www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Haste Cabeceira Press Click

Para substituir a haste da cabeceira modelo “Press Click” siga a instrução abaixo .

- 1- Pressione o botão (A) e mova a cabeceira para visualizar os parafusos de fixação (B).
- 2- Remova os parafusos (B) utilizando chave Allen 2,5mm (C) para desprender a cabeceira do articulador (D).
- 3- Retire a haste danificada (E) do suporte do encosto (F) puxando-a para fora.
- 4- Instale a nova haste no suporte do encosto (F), para facilitar a fixação da cabeceira.
- 5- Instale a nova cabeceira através da fixação dos parafusos (B) conforme imagem 3.

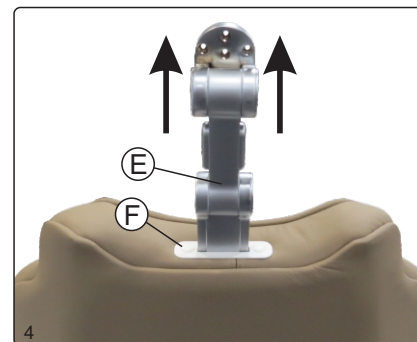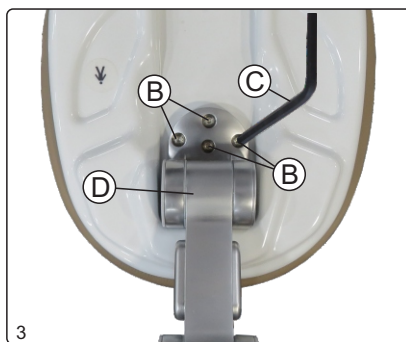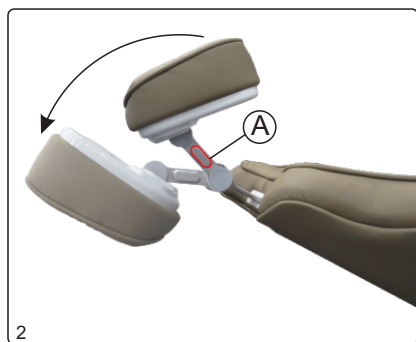

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Reia - 2228 - Palhoça - SC - 31/08/2017