

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Novo Registro da Plataforma

Informamos que a partir da primeira quinzena de setembro todos os equipamentos sofreram alteração no registro da plataforma.

O novo registro corta somente o fluxo de ar do sistema secundário, ou seja, os reservatórios de água, os instrumentos da mesa odontológica e módulo auxiliar. Este registro não interfere nos instrumentos de sucção.

O novo registro não permite regulação ou abertura parcial.

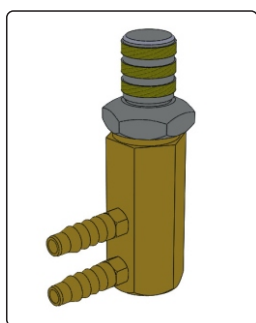


Registro Antigo

Descrição:
Registro de Ar Completo

Código:
9400076

Status:
Fora de Linha

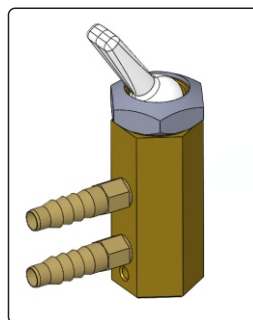

Registro Novo

Descrição:
Registro de Ar Click

Código:
9302478


Status:
Aplicado em toda Linha Odonto

Aplicação do Registro na plataforma:


Sprint




Siena

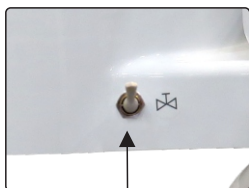

Logic

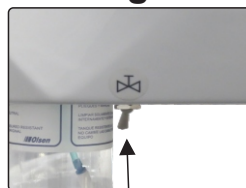

Infinity

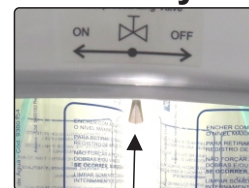

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Reia - 2232 - Palhoça - SC - 17/10/2017