

OLSEN TEC


www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Novo Conector de Esgoto


Visando melhorar o desempenho dos sugadores Venturi e Vórtice, informamos que a partir de Julho de 2018 os equipamentos serão fornecidos com novo modelo de Conector de Esgoto.

Segue tabela com os códigos dos conectores antigos, seus substitutos e sua descrição:

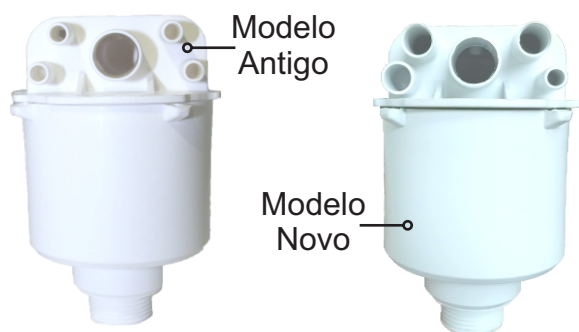


Códigos Antigos	Códigos Novos	Descrição
9600651	9500767	Kit Conector do Esgoto com 1 Sugador Venturi
9600652	9500769	Kit Conector do Esgoto com 2 Sugadores Venturi
9600675	9500771	Kit Conector do Esgoto com 1 Sugador Venturi e 1 Sugador Vórtice

Algumas das melhorias se aplicam no aumento dos diâmetros dos dutos dos sugadores Venturi/Vórtice e na inserção de um anel de borracha, já incluso na tampa.

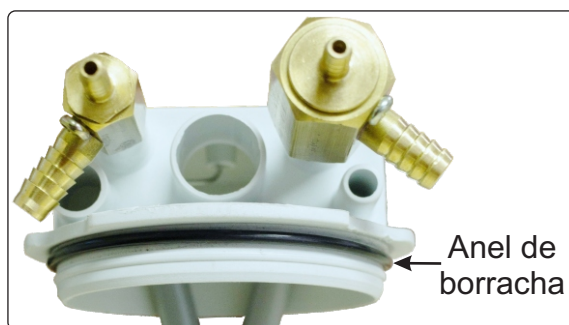



O novo Conector de Esgoto permite as seguintes conexões:

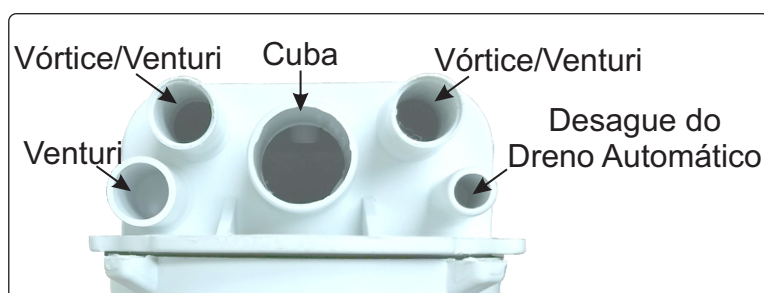

A nova forma de ligação das válvulas do sugador Venturi/Vórtice com o Conector de Esgoto consiste na inserção das mangueiras no conector, direcionando o fluxo de detritos para o esgoto. Neste procedimento é importante observar dois itens:

- As mangueiras devem estar direcionadas para a base do conector (conforme indicado abaixo) para evitar o refluxo, caso as mangueiras fiquem dobradas dentro do conector;
- A válvula do sugador Venturi/Vórtice deve ficar firme, para garantir a vedação e evitar retorno de detritos.

A Olsen fornece as válvulas dos sugadores Venturi e Vórtice já conectadas às mangueiras cinza com comprimento de 100 mm, dispensando as antigas mangueiras cristal.

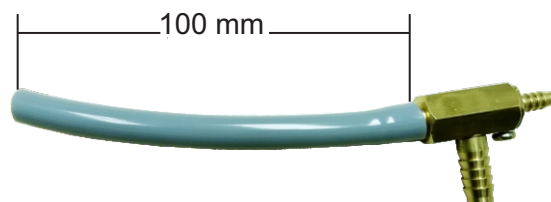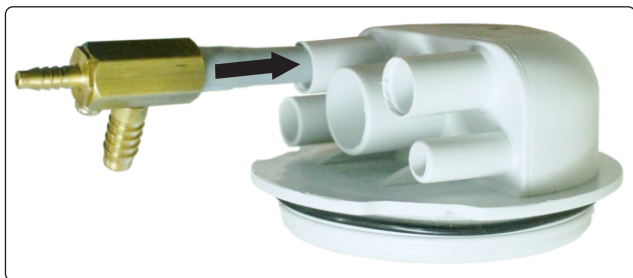

A Olsen também salienta que para um bom funcionamento do desague do esgoto, a tubulação utilizada deverá seguir as medidas recomendadas no gabarito de instalação (5400348 ou 5402116).

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.