

# OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Novo Suporte de Fixação da Válvula Solenóide


Com o objetivo de facilitar a manutenção nas unidades de água da linha Siena, a Olsen modificou o suporte de fixação das válvulas solenóide.

Suporte Antigo




Os parafusos do suporte encontravam-se abaixo da válvula solenóide.

Suporte Novo

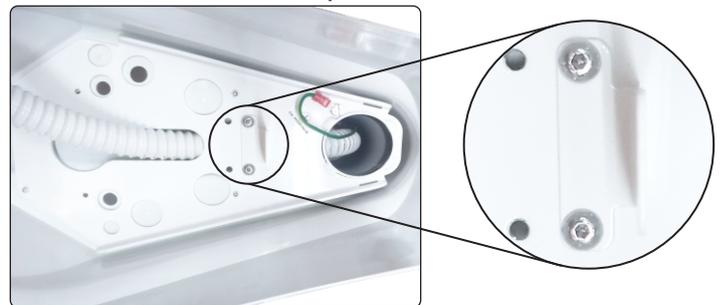

Os parafusos do suporte encontram-se do lado oposto ao da válvula solenóide.

Montagem Final

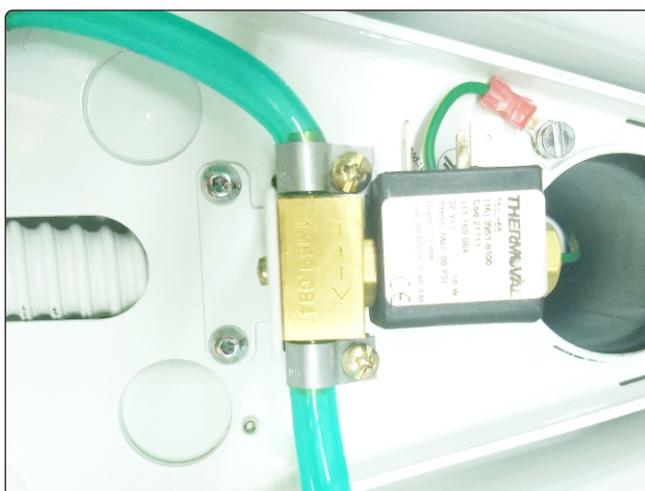

Repare que a diferença entre o suporte antigo e o suporte novo encontra-se na posição como a válvula é fixada, permitindo que os parafusos do suporte fiquem acessíveis.

Sendo assim, para qualquer manutenção que envolva a válvula solenóide, não será mais necessário remover a válvula para a retirada do suporte, de forma separada. Precisarás apenas desaparafusar o suporte de fixação, retirando o conjunto inteiro.

Essa alteração passará a valer a partir dos números de série:

- Unidade de água sem módulo auxiliar - 10022553;
- Unidade de água com módulo auxiliar - 10023019.

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**

REIA 2434/18 - Revisão 00 em 11 de setembro de 2018