

# OLSEN TEC


www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Comunicação do refletor Premium


A Olsen informa que após atualização do sistema elétrico/eletrônico, os equipamentos da Linha Odontológica que forem acompanhados de refletor Premium serão fornecidos com o cabo de comunicação do refletor desconectado da placa CPU da cadeira, conforme ilustrado nas imagens abaixo:

Antes

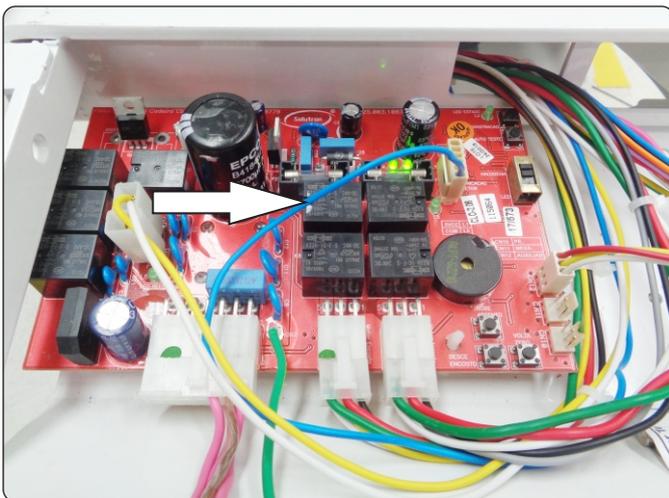

Conexão do cabo de comunicação do refletor Premium com a placa CPU da cadeira.

Atualmente

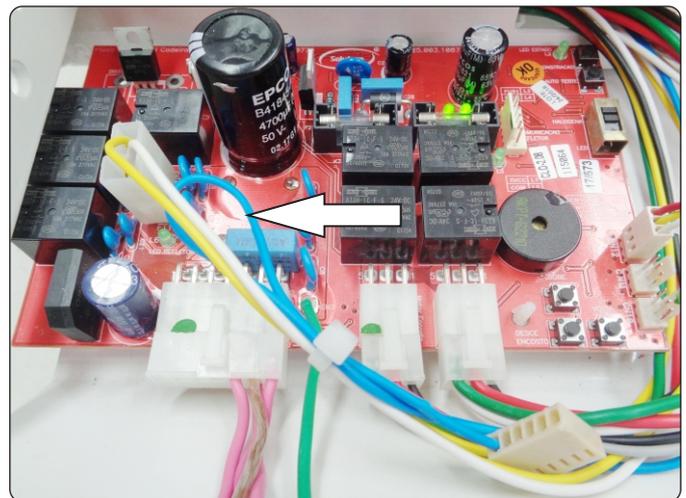

Cabo de comunicação do refletor Premium dobrado e amarrado com abraçadeira, tornando-o inutilizado, e portanto sem conexão com a placa CPU da cadeira.

Por questões de padronização da produção do chicote, o cabo azul de comunicação do refletor ainda será fornecido no conjunto, porem dobrado e amarrado com uma abraçadeira, de forma que ficará inutilizável. O cabo ainda poderá ser utilizado, mas apenas no caso de troca do modelo de refletor, ou seja, de Premium para Concept.

A comunicação do refletor Premium continuará ocorrendo através da placa situada no refletor. Essa modificação passará a valer a partir do dia 12/09/2018.

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**

Revisão 00 em 01 de outubro de 2018