

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.



Kart com Micromotor Brushless

A Olsen informa que quando um kart for disponibilizado com um micromotor Brushless será necessário que o técnico autorizado Olsen realize a instalação do micromotor à mesa do kart, conforme indicação abaixo.

O micromotor Brushless será fornecido desafixado, portanto no momento de desembalar o equipamento será necessário conectá-lo e fixá-lo a mesa odontológica do kart.



Além das peças de mãos, definidas no momento da compra, o kart será fornecido com o micromotor Brushless avulso.

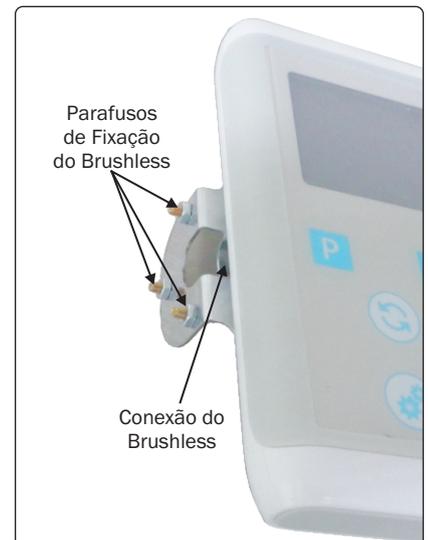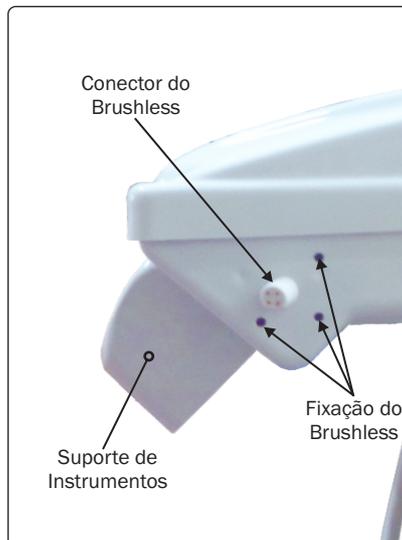

Retire o tempo da mesa odontológica do kart e conecte o micromotor Brushless ao seu conector à mesa. Note que deve conectar com os furos de fixação do micromotor alinhados aos da mesa.

Depois utilize os parafusos e porcas fornecidos com o micromotor Brushless para fixá-lo à mesa.



Atenção!

Evitar quedas e não bater o micromotor Brushless ao retirá-lo da embalagem de proteção. Risco de danos ao equipamento.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.