

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.


Ajuste de Assento Performance

Para um maior conforto do paciente a Olsen desenvolveu hastes de ajuste para inclinação do assento da cadeira Performance com 3 motores que permitirá que o assento seja inclinado de 0° a 5° graus, para frente ou para trás.


E para facilitar o procedimento de ajuste, a haste foi invertida, permitindo o acesso mais fácil e rápido aos parafusos. Para realizar o ajuste basta seguir a sequência de passos abaixo:



1º Passo - Retire a carenagem superior (A) que é fixada por 5 parafusos (3 na frente e 2 atrás);

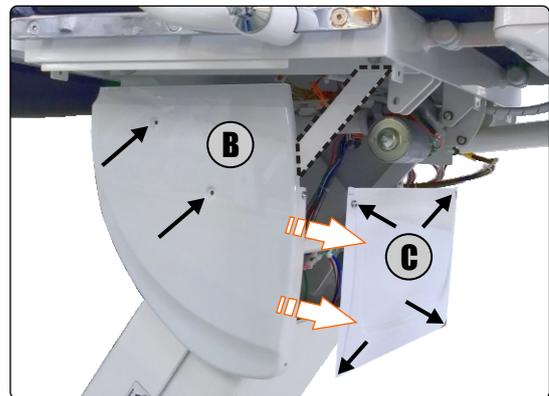

2º Passo - Remova a carenagem inferior (B), retirando primeiro a tampa frontal (C) através de 2 parafusos em cima e 2 pinos embaixo. Após retire a carenagem inferior (B) através de 2 parafusos em cada lateral;

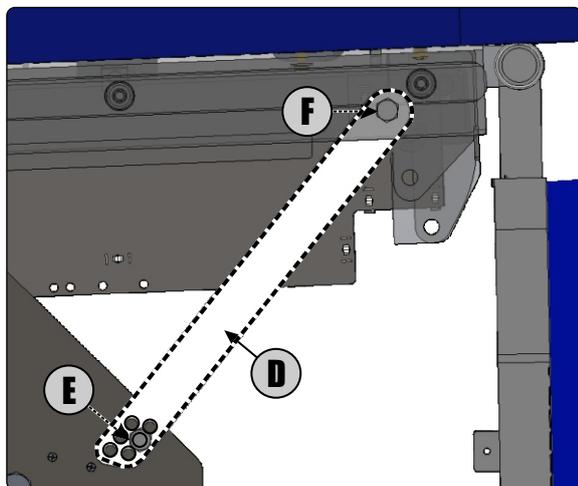

3º Passo - Para o ajuste da haste (D) solte o parafuso inferior (E) e afrouxe o parafuso superior (F). Escolha a furação que proporcione a inclinação do assento desejada. Realize esse procedimento com as duas hastes. Então aperte os 2 parafusos (E e F) e reinstale as carenagens.



Observe que a ponta superior da haste deve ser fixada na parte interna da estrutura do assento, enquanto a ponta inferior é fixada na parte externa da estrutura da cadeira.

Essa atualização passou a ser disponibilizada a partir de outubro de 2019.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA 2812/19 - Revisão 01 - 15 de outubro de 2019