


# OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Instalação Equipamento Infinity Kart

As cadeiras Infinity acompanhadas com Kart apresentam cabo de alimentação avulso para facilitar a instalação do equipamento. Ao iniciar a instalação do equipamento o técnico Olsen deverá seguir os passos abaixo:

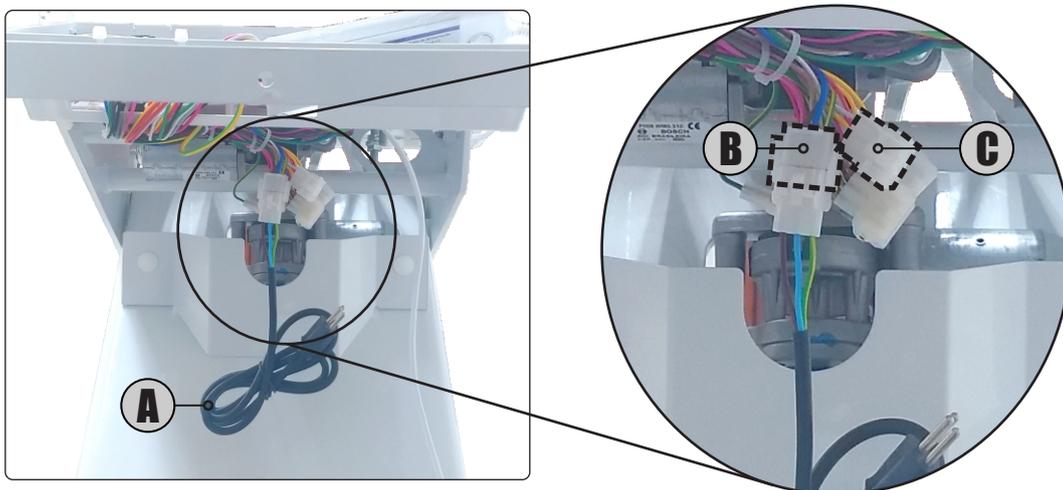

- 1º - Localize o cabo de alimentação avulso (A) sob o assento, próximo da placa eletrônica;
- 2º - Conecte o cabo (A) à uma tomada energizada;
- 3º - Execute o comando Sobe Assento através da placa eletrônica;
- 4º - Instale o equipamento;
- 5º - Desconecte o cabo avulso (A) da tomada;
- 6º - Desconecte o cabo avulso (A) do conector da cadeira (B);
- 7º - Acople o conector da cadeira (B) ao conector do equipamento (C).

**⚠ O cabo de alimentação avulso (A) serve única e exclusivamente para a função descrita, podendo ser reutilizado sempre que necessário.**

Essa atualização passou a ser disponibilizada a partir de setembro de 2019.

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**

Revisão 00 - 09 de setembro de 2019