

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Atualização de Fixação - Assento e Encosto Siena e Sprint

Informamos que a partir do mês de setembro, as carenagens inferiores do assento da cadeira Siena, que eram fixadas através de clip tipo pinça, passarão a ser fixadas por parafuso Allen sextavado com cabeça abaulada M5 x 12 mm e porca sextavada M5 x 0,8 MA ZB, conforme indicado a seguir:

Fixação por pino pinça



6 Pino plástico do tipo pinça

Fixação por parafuso



6 parafusos Allen sextavados com cabeça abaulada M5 x 12 mm
6 porcas sextavadas M5 x 0,8 MA ZB

Pino pinça M5 x 12 mm



1600080



8001066

M5 x 0,8 mm



5200806

⚠ A alteração na fixação da carenagem do assento é válida apenas para a cadeira Siena.


Assim como a carenagem de acabamento do encosto da cadeira Siena e da cadeira Sprint, que eram fixadas através de clip árvore 7 mm, passarão a ser fixadas por parafuso Allen sextavado com cabeça abaulada M5 x 8 mm, conforme indicado a seguir:

Fixação por pino pinça



2 Pinos plásticos do tipo árvore.

Fixação por parafuso

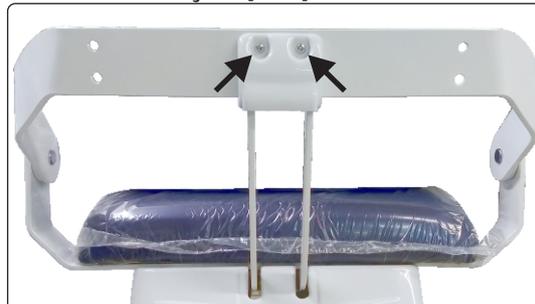

2 parafusos Allen sextavados com cabeça abaulada M5 x 8 mm

Pino árvore M5 x 8 mm



8101534



8001460

Esta alteração estará validada a partir do mês de setembro 2019.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Revisão 00 - REIA 2851/19 - 03 de outubro de 2019