

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Fixação da Interface Atividade

Os equipamentos Logic e Infinity produzidos com o opcional de anti-stress, apresentavam a interface deste dispositivo fixada com fita dupla face na estrutura do assento.

Visando melhorar não somente sua fixação como também facilitar sua remoção caso de manutenção, criamos o Suporte do Drive do Anti-Stress (código 8002416) que permite que a interface seja parafusada na estrutura do assento.


Os equipamentos fabricados a partir do mês de julho de 2014 já apresentam o novo sistema de fixação.

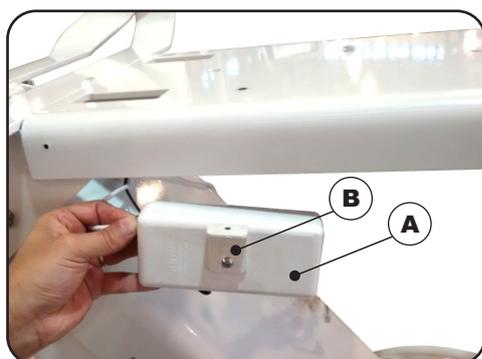

Interface do Anti-Stress (A)
com o novo suporte (B).



Suporte parafusado na
estrutura do assento.

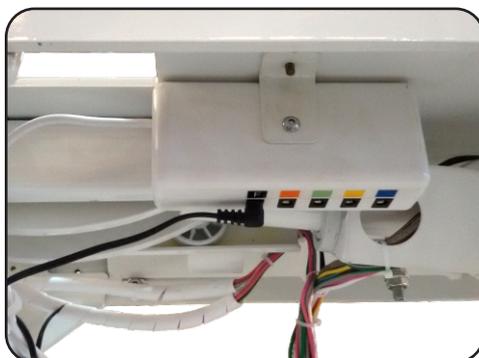

Interface fixada na cadeira.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA 1081/14 - Revisão 00 em 08 de julho de 2014