

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Molas de Tração dos Instrumentos Mesa Cross Flex

Existem dois modelos de molas de tração utilizados nas Mesas Cross Flex dos equipamentos Siena Cross Flex, Logic Cross Flex, Infinity Cross Flex:

5201777 - Mola de Tração 1,3 mm




Mola de retorno das hastes Mesa Cross Flex e Mini Cross. (arame Ø 1,3 mm).

5201781 - Mola de Tração 1,2 mm



Mola tração Mesa Cross 4 Kg (arame Ø 1,2 mm).

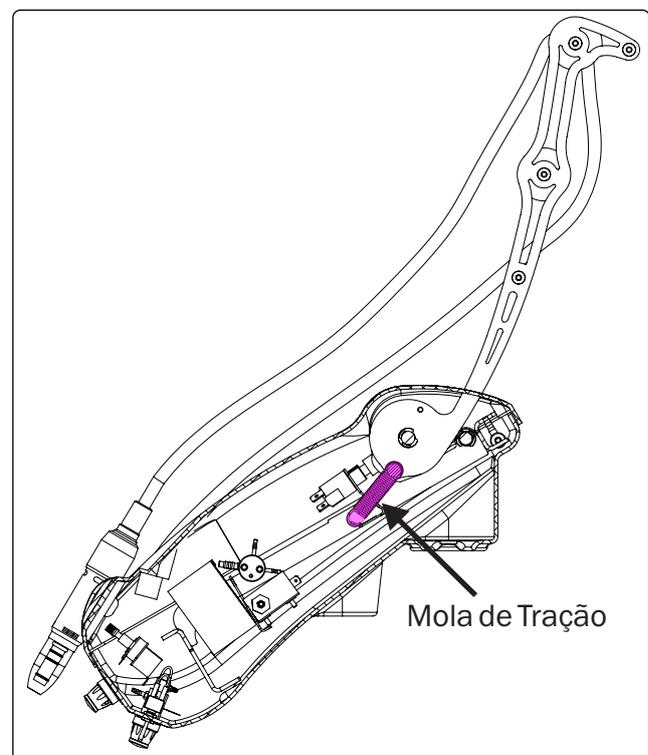

Estas molas são responsáveis pelo acionamento e retorno das hastes com os instrumentos. Dessa forma, para garantir o funcionamento eficiente deve-se utilizar a mola de tração conforme especificado na relação abaixo:

Mola de Tração 1,3 mm (5201777) devem ser utilizadas para:

- Acoplamento Midwest
- Fibra Óptica
- Micromotor

Mola de Tração 1,2 mm (5201781) devem ser utilizadas para:

- Acoplamento Borden
- Ultra Som
- Fotopolimerizador

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Revisão 00 - 18 de novembro de 2019