

# OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Nova Posição da Micro Chave do Assento


Para melhor atuação da haste de acionamento da micro chave de fim de curso sobre assento, a partir do dia 12/02/2020 ela foi reposicionada nos modelos Logic, Siena e Sprint conforme ilustração abaixo.




Parte traseira e inferior do assento sem carenagem.

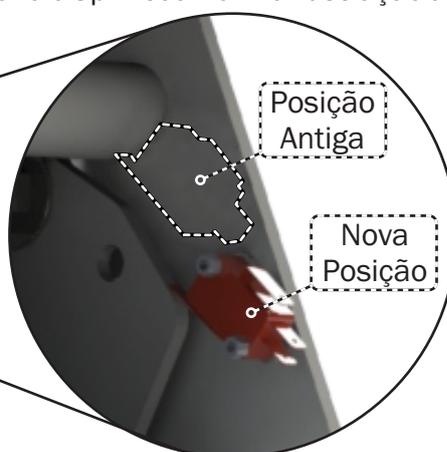

Para o modelo Infinity também houve atualização, conforme indicado na ilustração abaixo:

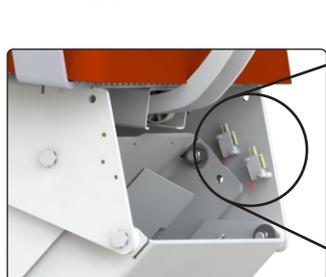

Parte traseira e inferior do assento sem carenagem.

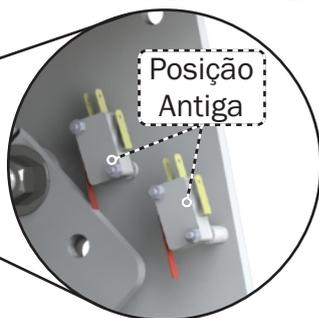

Parte traseira e inferior do assento sem carenagem.



Lado esquerdo do assento sem carenagem.



Lado direito do assento sem carenagem.

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**

Revisão 00 - 20 de fevereiro de 2020