

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br


Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Instalação do Prof Jet

O instrumento de profilaxia por jato de bicarbonato **Prophy-Jet** é uma alternativa simples e eficiente para complementar o equipamento odontológico.



Para obter o melhor desempenho deste instrumento, orientamos que o **Prophy-Jet** seja instalado no acoplamento de baixa rotação (micromotor pneumático):

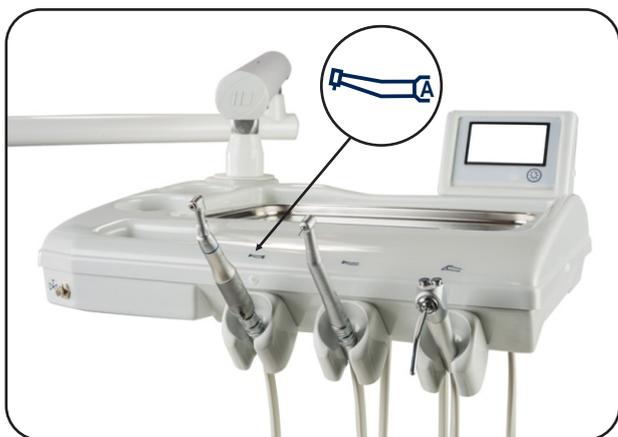

Micromotor pneumático, normalmente posicionado no primeiro suporte de instrumentos.



Prophy-Jet instalado no acoplamento do micromotor pneumático.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.