

# OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.


## Nova Configuração para cadeiras Siena/Quality com Touch e Comandos na Base

Informamos que a partir do dia 06/07/2020, número de série 10037093, as cadeiras odontológicas Siena/Quality com Touch e Comandos na Base passaram a ter nova configuração.


Foi adicionado um conector com mais vias na placa CPU (2200918) para a conexão dos comandos da base, e removida a placa intermediária (2200781) que era responsável por fazer a conversão e comunicação serial dos comandos da base.

Para mais detalhes da ligação elétrica consulte o diagrama elétrico atualizado: Diagrama Elétrico SPS com Touch 20 (5401150).

Configuração Antiga

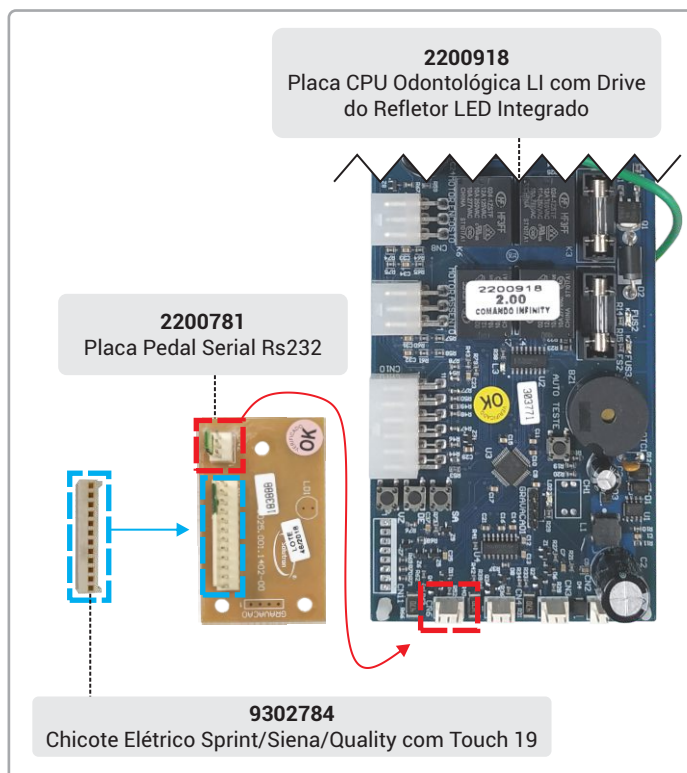

Configuração Nova

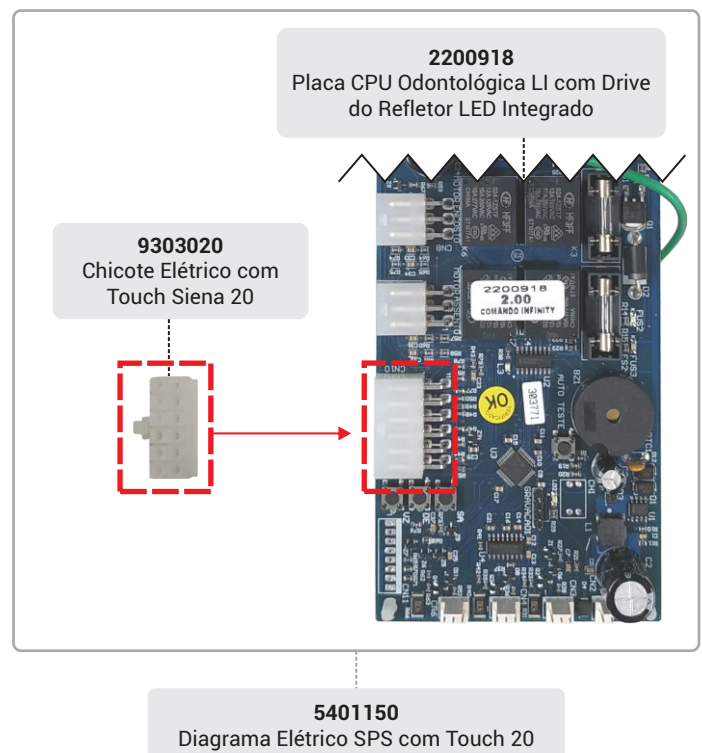

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**

REIA - 3134 - 20 - Revisão 02 - 22 de julho de 2020