

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br




Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Substituição do Parafuso do Encosto do Mocho e Instrução Para Correta Fixação

Com o intuito de otimizar a fixação do encosto do mocho ao seu suporte, comunicamos a substituição do "Parafuso M6 Cabeça Chata (cód. 5200725)" pelo "Parafuso M6 Cabeça de Panela (cód. 5200756)". A alteração tem efeito para os produtos fabricados a partir do dia 26/10/2020.

A execução da montagem de forma correta é essencial para que o mocho Olsen apresente alta durabilidade e excelente performance, evitando inconvenientes e falhas.

Abaixo, ilustramos a correta montagem do "Parafuso M6 Cabeça de Panela" com a "Mola Prato Ø 6,2 (cód. 5201704)":

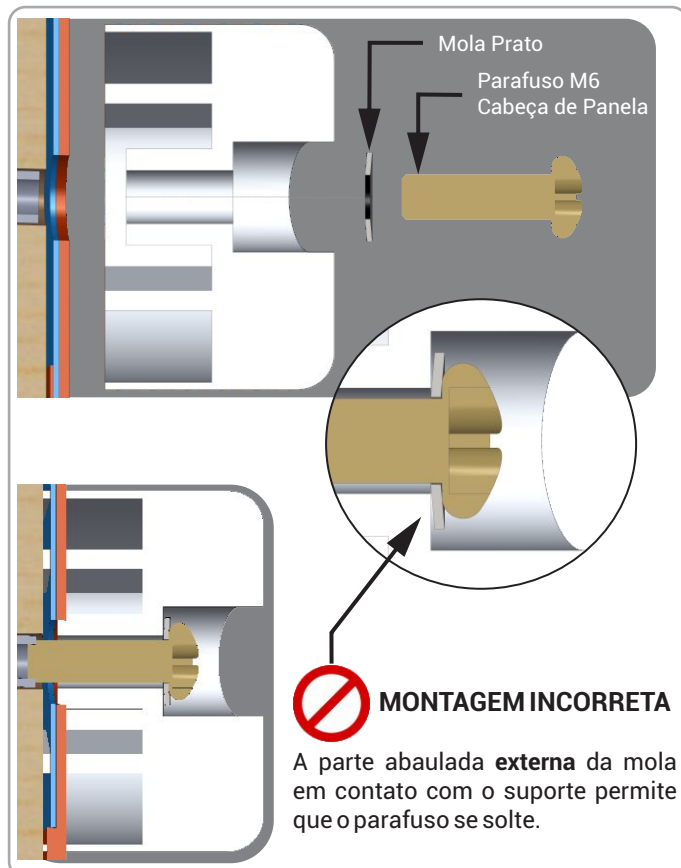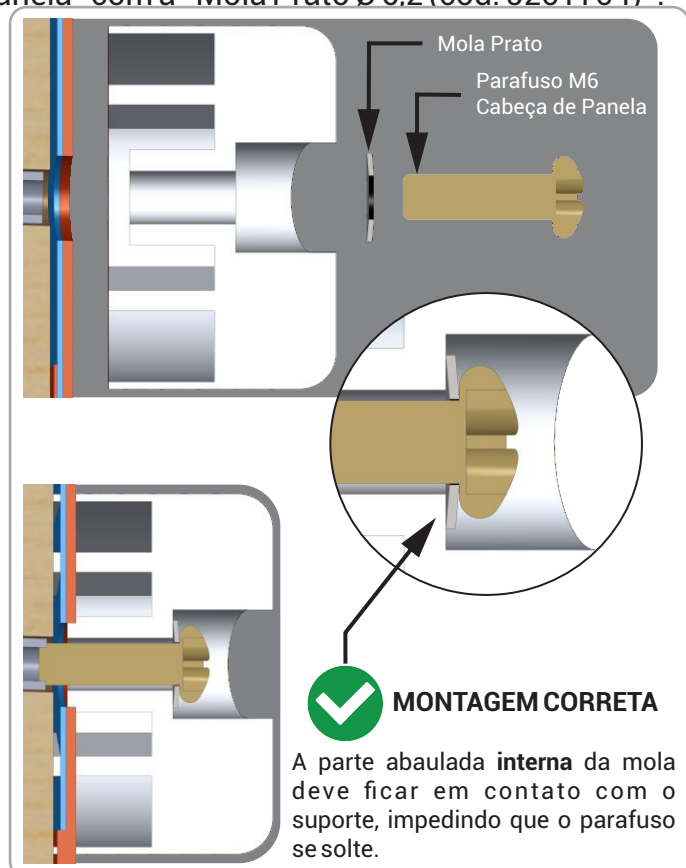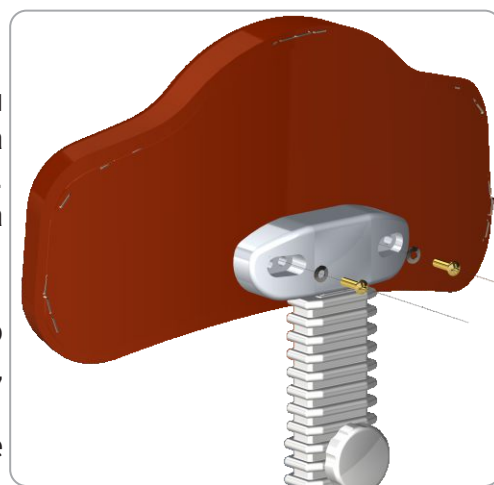

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.