

## ALTERAÇÃO NO FILTRO DOS SUGADORES

Informamos que os consultórios odontológicos modelos *Siena 2024* e *Infinity 2024* tiveram o filtro dos sugadores *Venturi* e *Vórtice* alterados e reposicionados. O filtro, que antes ficava na mangueira do sugador, agora está localizado na base do equipamento, conforme imagem ilustrativa.

Para facilitar a instalação do novo filtro, disponibilizamos um vídeo com as instruções detalhadas.

Assista ao vídeo de instalação “*Olsen\_Tec\_103\_Instalação\_Filtro Sugadores\_na\_Base*” disponibilizado junto com o arquivo desta publicação.

Detalhes da Alteração:

- Filtros substituídos: 9300339 FILTRO DO SUGADOR VENTURI e 9302298 FILTRO DO SUGADOR VÓRTICE;
- Novo filtro: 999500179 FILTRO PARA SUGADOR;
- Modelos afetados:

### INFINITY

Infinity Titanium  
Infinity Black Edition Elite;  
Infinity Cross Flex;  
Infinity Black Edition Cross Flex;  
Infinity Black Edition Elite Cross Flex;  
Infinity Pro;  
Infinity Premium;  
Infinity Premium Cross Flex;  
Infinity Premium Pro;  
Infinity Diamond;  
Work Station.

### SIENA

Siena Flex;  
Siena EX;  
Siena Plus;  
Siena Cross Flex;  
Siena VZ / PT;  
Ortodôntico;  
Quality;  
Quality Flex;  
Quality Cross Flex.

## FILTROS SUBSTITUÍDOS



## NOVOS FILTROS

