

ALTERAÇÃO NO FILTRO DOS SUGADORES

Informamos que os consultórios odontológicos modelos *Siena 2024* e *Infinity 2024* tiveram o filtro dos sugadores *Venturi* e *Vórtice* alterados e reposicionados. O filtro, que antes ficava na mangueira do sugador, agora está localizado na base do equipamento, conforme imagem ilustrativa.

Para facilitar a instalação do novo filtro, disponibilizamos um vídeo com as instruções detalhadas.

Assista ao vídeo de instalação “*Olsen_Tec_104_Instalação_Filtro Sugadores_na_Base*” disponibilizado junto com o arquivo desta publicação.

Detalhes da Alteração:

- Filtros substituídos: 9300339 FILTRO DO SUGADOR VENTURI e 9302298 FILTRO DO SUGADOR VÓRTICE;
- Novo filtro: 999500179 FILTRO PARA SUGADOR;
- Modelos afetados:

INFINITY

Infinity Titanium
Infinity Black Edition Elite;
Infinity Cross Flex;
Infinity Black Edition Cross Flex;
Infinity Black Edition Elite Cross Flex;
Infinity Pro;
Infinity Premium;
Infinity Premium Cross Flex;
Infinity Premium Pro;
Infinity Diamond;
Work Station.

SIENA

Siena Flex;
Siena EX;
Siena Plus;
Siena Cross Flex;
Siena VZ / PT;
Ortodôntico;
Quality;
Quality Flex;
Quality Cross Flex.

FILTROS SUBSTITUÍDOS



NOVOS FILTROS

