


Guia Rápido

Siena

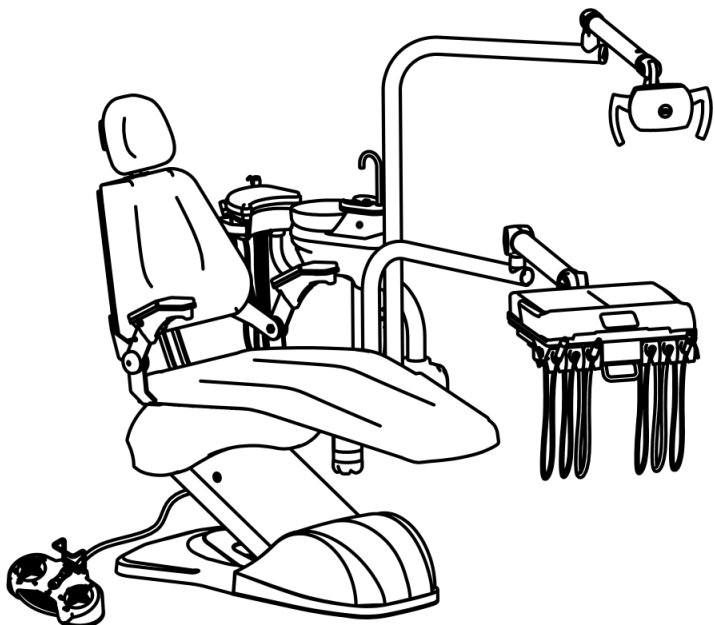

Antes de utilizar o equipamento, leia com atenção as *Instruções de Uso*. Para acessar documentos complementares e informações adicionais relacionadas ao equipamento, utilize o QR Code fornecido ao lado ou acesse: olsen.odo.br/manuais.








ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO

- Verifique se o equipamento está devidamente instalado, seguindo as orientações na seção *Instalação* do documento *Instruções de Uso*;
- Ligue o compressor que abastece o equipamento;
- Abra o registro de alimentação de água do equipamento;
- Ligue o disjuntor de alimentação elétrica do equipamento.

LIGANDO O EQUIPAMENTO



- Ligue o *Botão Liga/Desliga (1)* localizado na lateral da estrutura de elevação da cadeira.
- Acione a tecla *Sobe Assento* até a cadeira atingir seu limite de altura máxima;

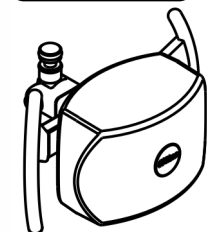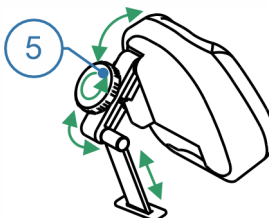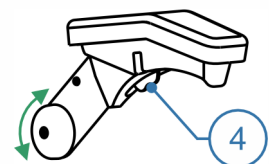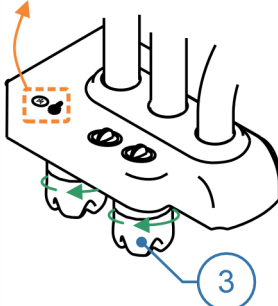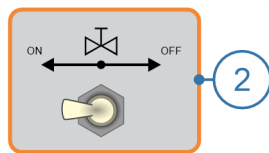

- Feche a *Válvula de Pressurização (2)* localizado na parte inferior do equipo;
- Verifique se os *Reservatórios de Água (3)* estão cheios. Se necessário, encha-os com água mineral ou filtrada até o limite indicado em cada reservatório e acople-os novamente ao equipo. Se desejar coloque produtos profiláticos de baixa concentração;
- Abra a *Válvula de Pressurização (2)* e verifique se os *Reservatórios de Água (3)* estão bem acoplados e sem vazamentos;
- Antes de iniciar o uso do equipamento, verifique o funcionamento de todos os instrumentos e comandos disponíveis e realize a limpeza e esterilização dos instrumentos de acordo com a seção *Limpeza e Desinfecção* do documento *Instruções de Uso*.

BRAÇO

Para destravar e movimentar o braço escamoteável, pressione a alavanca (4) localizada na parte inferior.

CABECEIRA

• MULTIARTICULADA

Ajustar ângulo: gire o *Manipulo (5)* no sentido anti-horário para afrouxá-lo. Após colocar na posição desejada, aperte o *Manipulo (5)* girando no sentido horário para travar.



Ajustar altura: puxe ou empurre a cabeceira afastando ou aproximando-a do encosto. Não ultrapasse a distância de 10 cm entre a cabeceira e o encosto.

REFLETOR

• EVOLUTION PLUS

Ligar/Desligar: pressione o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*.

Alterar intensidade de iluminação: mantenha o botão *Liga/Desliga Refletor (6)* pressionado por mais de 2 segundos. Solte o botão quando o refletor alcançar a intensidade desejada.

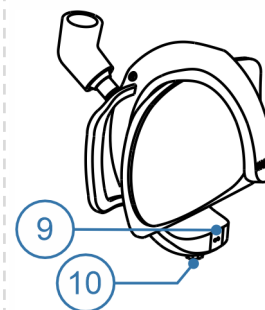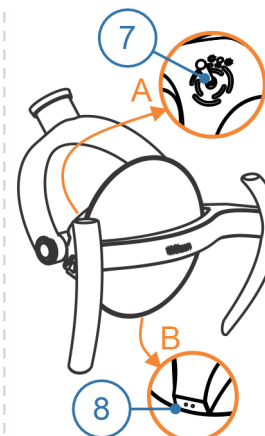

• CONCEPT PLUS

Ligar/Desligar: pressione o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*, ou passe a mão na frente do *Sensor (8)* a aproximadamente 5 cm de distância, ou vire a *Haste de Controle (7)* para direita ou esquerda. No primeiro uso após ligar o equipamento, para habilitar o sensor e o botão de controle, utilize primeiro o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*.

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do *Sensor (8)*, ou segure a *Haste de Controle (7)* para direita ou esquerda, até que o refletor alcance a intensidade desejada.

• LED PREMIUM

Ligar/Desligar: pressione o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*, ou o *Botão de Controle (10)*, ou passe a mão na frente do *Sensor (9)* a aproximadamente 5 cm de distância. No primeiro uso após ligar o equipamento, para habilitar o sensor e o botão de controle, utilize primeiro o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*.

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do *Sensor (9)* ou gire o *Botão de Controle (10)* até que o refletor alcance a intensidade desejada.

• DUAL COLOR

Ligar/Desligar: pressione o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*, ou passe a mão na frente do *Sensor (13)* a aproximadamente 5 cm de distância, ou movimente lateralmente o *Interruptor (11)* para direita ou esquerda. No primeiro uso após ligar o equipamento, para habilitar o sensor e o haste de controle, utilize primeiro o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*.

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do *Sensor (13)* a aproximadamente 5 cm de distância, ou segure lateralmente o *Interruptor (11)* para direita ou esquerda, até que o refletor alcance a intensidade

desejada.

Ajuste de temperatura de cor: deslize o botão (12) para direita (luz branca) ou esquerda (luz amarela) para selecionar a cor desejada.

Compatibilidade com materiais fotoativos: deslize o botão (12) para esquerda selecionando a luz amarela.

• VARIB

Ligar/Desligar: pressione o botão *Liga/Desliga Refletor* (14), ou passe a mão na frente do Sensor (15) a aproximadamente 5 cm de distância, ou toque no botão (16). No primeiro uso após ligar o equipamento, para habilitar o sensor e os botões sensíveis ao toque, utilize primeiro o botão *Liga/Desliga Refletor* (14).

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do Sensor (15) a aproximadamente 5 cm de distância, ou toque no botão mais ou menos (18) até que o refletor alcance a intensidade desejada.

Ajuste de temperatura de cor: toque no botão (17) para a alterar a temperatura da cor de maneira cíclica (2000-4000-4500-5500-6000 K).

Compatibilidade com materiais fotoativos: toque no botão (17) até selecionar 2000 K (luz amarela).





UNIDADE DE ÁGUA

Na unidade de água podem ser disponibilizados *Suportes para Instrumentos* (19) opcionais como sugador, fotopolimerizador, prophy-jet, acoplamento de alta rotação e seringa tríplice.

Os botões para acionar a água na cuba ou no porta-copo estão disponíveis no pedal, painel de comandos.

Acionar água na cuba: pressione o botão *Água na Cub* (20).

Acionar água no porta-copo: pressione o botão *Água no Porta-Copo* (21).

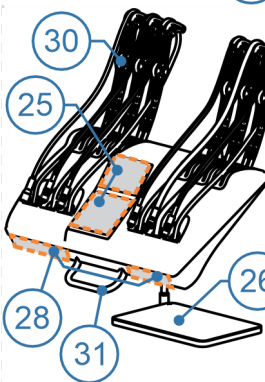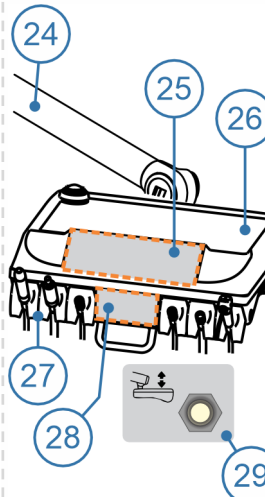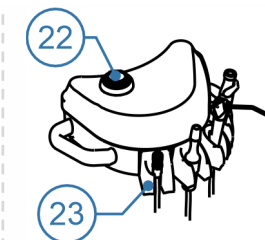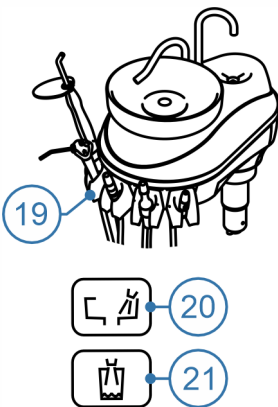

MÓDULO AUXILIAR

O Módulo Auxiliar pode apresentar *Suportes para Instrumentos* (23) opcionais, como sugador, prophy-jet, acoplamento de alta rotação, fotopolimerizador, seringa tríplice, acoplamento para jato de bicarbonato e reservatório de bicarbonato (22).

MESA ODONTOLÓGICA

A mesa disponibiliza instrumentos para os procedimentos odontológicos, incluindo seringa tríplice, acoplamentos pneumáticos para baixa e alta rotação, os quais são dispostos em *Suportes* (27) ou, no caso do modelo Cross Flex, em *Hastes Retráteis* (30). Além disso, conta com uma *Bandeja de Inox* (26) para o suporte dos materiais utilizados durante os procedimentos.

O *Braço Flex* (24) apresenta 2 articulações e sistema de freio pneumático que é desativado através do acionamento da *Válvula Pneumática* (29) ou do toque na *Alça Capacitiva* (31), liberando a movimentação da mesa.

O *Painel de Comandos* (25) controla partes do equipamento como, movimentação da cadeira, unidade de água, refletor e ativação de acessórios.


No *Painel de Instrumentos* (28) estão disponibilizados os botões de ajuste de água do micromotor brushless, ultrassom e terminal midwest com fibra óptica.

A disponibilidade e disposição dos botões no painel de comandos e painel de instrumentos varia de acordo com a configuração escolhida do equipamento.

O peso máximo suportada pela bandeja é de 2,0 kg. Não exceder este valor.

Não movimente a mesa na vertical sem desativar o freio pneumático. Isto poderá danificar o sistema de travamento.

Não utilize peças de mão de alta rotação acopladas ao terminal de baixa rotação. Isto causará danos aos instrumentos.

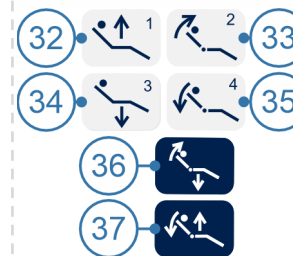

MOVIMENTANDO A CADEIRA

Utilize os botões de movimentação presentes no pedal ou no painel de comandos para executar as operações descritas abaixo.

- (32) Sob o Assento / Posição 1;
- (33) Sob o Encosto / Posição 2;
- (34) Desce Assento / Posição 3;
- (35) Desce Encosto / Posição de Cuspir;
- (36) Volta à Zero;
- (37) Posição de Trabalho.

Volta à Zero: pressione o botão *Volta à Zero* (36) para ajustar automaticamente o assento na posição mais baixa e encosto na posição mais elevada.

Posição de Trabalho: para facilitar a movimentação simultânea do assento e encosto, existem 4 posições que podem ser acionadas. O número da posição está indicado na região (D). A posição 1, 2 e 3 são gravadas pelo usuário. A posição 4 é a *Posição de Cuspir* e não pode ser alterada.

Executar uma Posição de Trabalho (E):


- a) Pressione o botão *Posição de Trabalho* (37). O equipamento emitirá 1 bip curto;
- b) Pressione o botão da posição desejada (1 a 4). O equipamento emitirá 2 bipes confirmando a operação. O tempo para seleção da posição é de 4 segundos. Caso não seja pressionado nenhum botão dentro deste período, o equipamento cancela a operação.

Gravar uma Posição de Trabalho (F):

- a) Pressione o botão *Volta à Zero* (36);
- b) Ajuste o encosto na posição desejada;
- c) Ajuste o assento na posição desejada;
- d) Pressione por 5 segundos o botão *Posição de Trabalho* (37). O equipamento entrará em modo de gravação pelos próximos 2 segundos, emitindo 2 bipes longos. Execute a próxima etapa dentro deste intervalo. Caso contrário, o equipamen-




to emitirá 3 bipes curtos, cancelando a operação;
 e) Escolha um dos botões de posição (1, 2 ou 3) para gravar a posição ajustada. O equipamento emitirá 2 bipes curtos confirmando que a posição foi gravada.

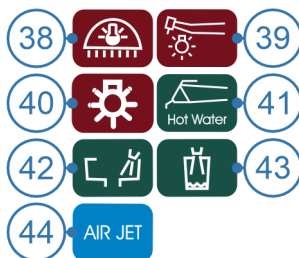


PAINEL DE INSTRUMENTOS

- (38) Liga/Desliga Refletor;
- (39) Liga/Desliga Luz da Fibra Óptica;
- (40) Liga/Desliga Negatoscópio;
- (41) Liga/Desliga Thermo Comfort;
- (42) Água na Cuba;
- (43) Água no Porta-Copo;
- (44) Liga/Desliga Air Jet.

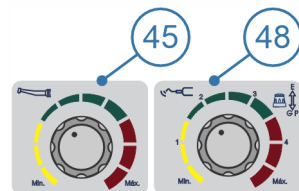


PAINEL DE INSTRUMENTOS

- (45) Micromotor Elétrico - Ajuste de Velocidade;
- (46) Micromotor Elétrico - Inversor de Rotação;
- (47) Fibra Óptica - Ajuste de Água;
- (48) Ultrassom - Ajuste de Potência e Seletor de Funções;

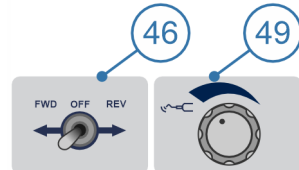

- (49) Ultrassom - Ajuste de Água;
- (50) Micromotor Brushless - Ajuste de Água;
- (51) Thermo Comfort - Indicador Ligado/Desligado.

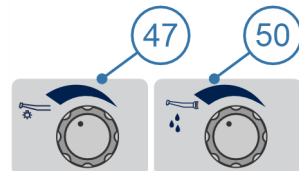

THERMO COMFORT

Sistema que oferece água quente para todos os instrumentos que utilizam água, com saída entre 35° C e 45° C. Pode apresentar controle de temperatura, de acordo com o modelo.



Ativar/Desativar: toque no botão *Liga/Desliga Thermo Comfort* (52) no sistema e-tech.

Características técnicas:

- Tempo de sangria: ~6 segundos;
- Temperatura máxima: 45° C;
- Capacidade do reservatório: 100 mL;
- Tempo para aquecimento inicial: ~14 min.



SISTEMA AIR JET

O sistema Air Jet proporciona agilidade nos procedimentos com turbina de alta rotação. Consiste na liberação de jato contínuo de ar pela própria turbina, dispensando o uso da seringa para esta função.

Ativar/Desativar: pressione botão *Liga/Desliga Air Jet* (53) no sistema e-tech. Quando o Air Jet está ativado, o jato de ar contínuo inicia logo que a peça de mão é retirada do suporte. Ao pressionar o *Pedal de Propulsão* (54), o jato de ar é interrompido, e a peça de mão funciona normalmente. Ao liberar o *Pedal de Propulsão* (54), o jato de ar é acionado novamente até que o sistema Air Jet seja desligado ou a peça de mão seja colocada em seu suporte.



NEGATOSCÓPIO

Com visor iluminado por LED, permite a visualização de radiografias sem se distanciar do paciente.

Ativar/Desativar: pressione o botão *Liga/Desliga Negatoscópio* (55).



SISTEMA ANTI-STRESS

Sistema desenvolvido para proporcionar maior conforto aos pacientes. Consiste em quatro massagedores posicionados no interior dos estofamentos para atuar na região da lombar e coxas.

Acionados através de botão, estes massagedores aumentam o bem-estar do paciente durante os procedimentos odontológicos.

Ativar/Desativar: utilize o botão *Liga/Desliga* (56) localizado na lateral esquerda do equipamento.

/// Olsen