


Guia Rápido

Infinity

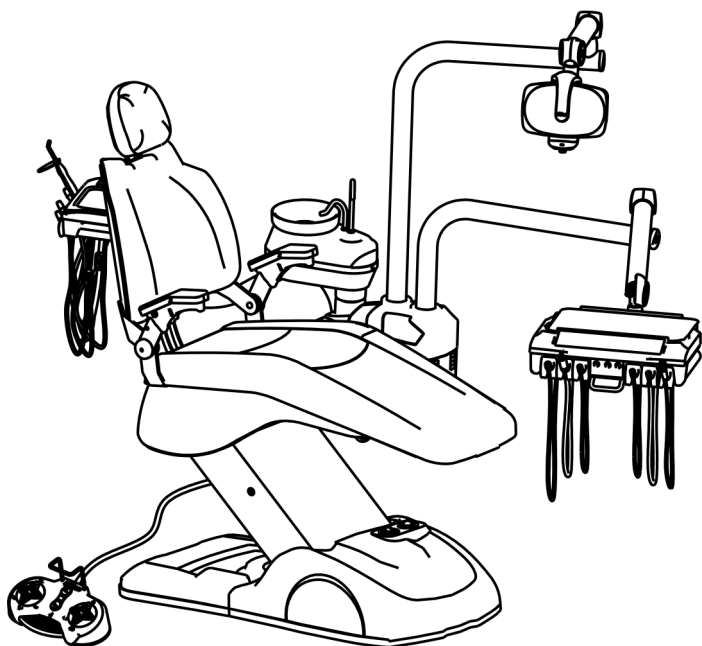

Antes de utilizar o equipamento, leia com atenção as *Instruções de Uso*. Para acessar documentos complementares e informações adicionais relacionadas ao equipamento, utilize o QR Code fornecido ao lado ou acesse: olsen.odo.br.







ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO

- Verifique se o equipamento está devidamente instalado, seguindo as orientações na seção *Instalação* do documento *Instruções de Uso*;
- Ligue o compressor que abastece o equipamento;
- Abra o registro de alimentação de água do equipamento;
- Ligue o disjuntor de alimentação elétrica do equipamento.



LIGANDO O EQUIPAMENTO

- Ligue o **Botão Liga/Desliga (1)** localizado na lateral da estrutura de elevação da cadeira.

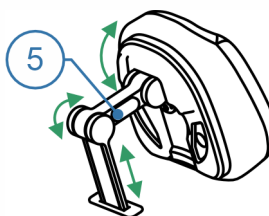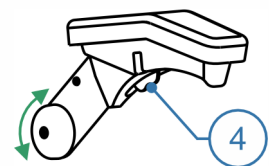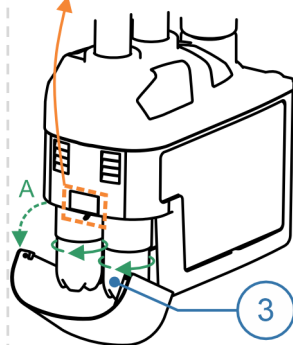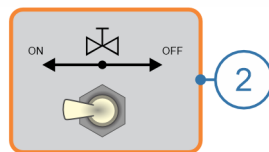

- Acione a tecla *Sobe Assento* até a cadeira atingir seu limite de altura máxima;
- Abra a tampa do compartimento dos reservatórios (A) e feche a **Válvula de Pressurização (2)** localizado próximo aos reservatórios;
- Verifique se os **Reservatórios de Água (3)** estão cheios. Se necessário, encha-os com água mineral ou filtrada até o limite indicado em cada reservatório e acople-os novamente ao equipo. Se desejar coloque produtos profiláticos de baixa concentração;
- Abra a **Válvula de Pressurização (2)** e verifique se os **Reservatórios de Água (3)** estão bem acoplados e sem vazamentos;
- Antes de iniciar o uso do equipamento, verifique o funcionamento de todos os instrumentos e comandos disponíveis e realize a limpeza e esterilização dos instrumentos de acordo com a seção *Limpeza e Desinfecção* do documento *Instruções de Uso*.

BRAÇO




Para destravar e movimentar o braço escamoteável, pressione a alavanca (4) localizada na parte inferior.

CABECEIRA

• PRESS CLICK

Ajustar ângulo: mantenha pressionado o botão (5) enquanto faz o ajuste. Solte o botão (5) para travar na posição.

Ajustar altura: puxe ou empurre a cabeceira afastando ou aproximando-a do encosto. Não ultrapasse a distância de 10 cm entre a cabeceira e o encosto.

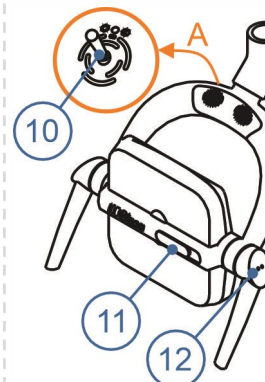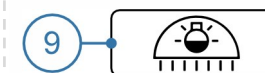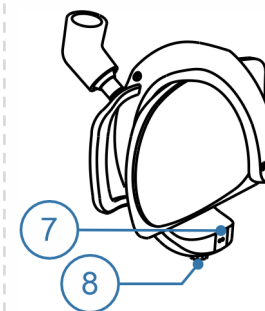

REFLETOR

• LED PREMIUM

Ligar/Desligar: pressione o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*, ou o *Botão de Controle (8)*, ou passe a mão na frente do Sensor (7) a aproximadamente 5 cm de distância. No primeiro uso após ligar o equipamento, para habilitar o sensor e o botão de controle, utilize primeiro o botão *Liga/Desliga Refletor (6)*.

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do Sensor (7) ou gire o Botão de Controle (8) até que o refletor alcance a intensidade desejada.




• DUAL COLOR

Ligar/Desligar: pressione o botão *Liga/Desliga Refletor (9)*, ou passe a mão na frente do Sensor (12) a aproximadamente 5 cm de distância, ou movimente lateralmente o *Interruptor (10)* para direita ou esquerda. No primeiro uso após ligar o equipamento, para habilitar o sensor e o haste de controle, utilize primeiro o botão *Liga/Desliga Refletor (9)*.

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do Sensor (12) a aproximadamente 5 cm de distância, ou segure lateralmente o *Interruptor (10)* para direita ou esquerda, até que o refletor alcance a intensidade desejada.

Ajuste de temperatura de cor: deslize o botão (11) para direita (luz branca) ou esquerda (luz amarela) para selecionar a cor desejada.

Compatibilidade com materiais fotoativos: deslize o botão (11) para esquerda selecionando a luz amarela.

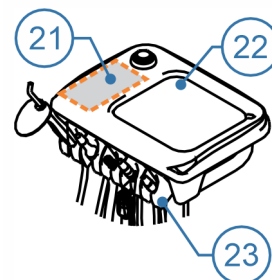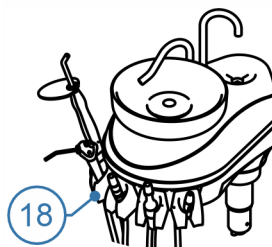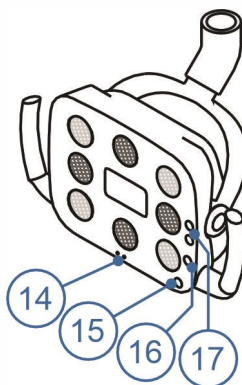

• VARIB

Ligar/Desligar: pressione o botão *Liga/Desliga Refletor* (13), ou passe a mão na frente do *Sensor* (14) a aproximadamente 5 cm de distância, ou toque no botão (15). No primeiro uso após ligar o equipamento, para habilitar o sensor e os botões sensíveis ao toque, utilize primeiro o botão *Liga/Desliga Refletor* (13).

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do *Sensor* (14) a aproximadamente 5 cm de distância, ou toque no botão mais ou menos (17) até que o refletor alcance a intensidade desejada.

Ajuste de temperatura de cor: toque no botão (16) para a alterar a temperatura da cor de maneira cíclica (2000-4000-4500-5500-6000 K).

Compatibilidade com materiais fotoativados: toque no botão (16) até selecionar 2000 K (luz amarela).

UNIDADE DE ÁGUA



A unidade de água pode incluir suportes (18) para instrumentos opcionais. Os botões para acionar a água na cuba ou no porta-copo estão localizados na unidade de água, no pedal e no painel de comandos.

Acionar água na cuba: pressione o botão *Água na Cuba* (19).

Acionar água no porta-copo: pressione o botão *Água no Porta-Copo* (20).

MÓDULO AUXILIAR

O módulo auxiliar inclui uma bandeja em aço inox (22), suportes para instrumentos (23) e, dependendo da configuração do equipamento, pode contar com um painel de comandos (21).

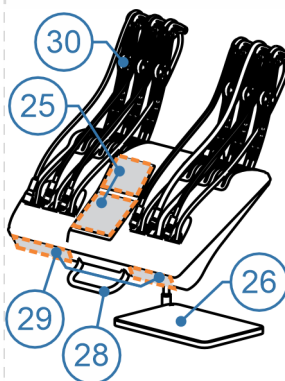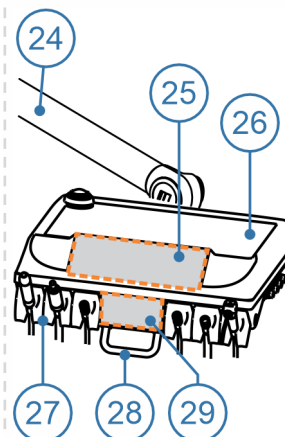

MESA ODONTOLÓGICA

A mesa disponibiliza instrumentos para os procedimentos odontológicos, incluindo seringa triplice, acoplamentos pneumáticos para baixa e alta rotação, os quais são dispostos em *Suportes* (27) ou, no caso do modelo Cross Flex, em *Hastes Retráteis* (30). Além disso, conta com uma *Bandeja de Inox* (26) para o suporte dos materiais utilizados durante os procedimentos.

O *Braço Flex* (24) apresenta 2 articulações e sistema de freio pneumático que é desativado através do toque na *Alça Capacitiva* (28), liberando a movimentação da mesa.

O *Painel de Comandos* (25) controla partes do equipamento como, movimentação da cadeira, unidade de água, refletor e ativação de acessórios.

No *Painel de Instrumentos* (29) estão disponibilizados os botões de ajuste de água do micromotor brushless, ultrassom e terminal midwest com fibra óptica.

A disponibilidade e disposição dos botões no painel de comandos e painel de instrumentos varia de acordo com a configuração escolhida do equipamento.



O peso máximo suportada pela bandeja é de 2,0 kg. Não exceder este valor.




Não movimente a mesa na vertical sem desativar o freio pneumático. Isto poderá danificar o sistema de travamento.



Não utilize peças de mão de alta rotação acopladas ao terminal de baixa rotação. Isto causará danos aos instrumentos.

MOVIMENTANDO A CADEIRA

Utilize os botões de movimentação presentes no pedal ou no painel de comandos para executar as operações descritas abaixo.

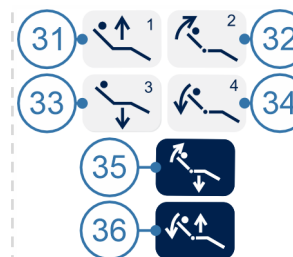

(31) Sobe Assento / Posição 1;
(32) Sobe Encosto / Posição 2;
(33) Desce Assento / Posição 3;
(34) Desce Encosto / Posição de Cuspir;
(35) Volta à Zero;
(36) Posição de Trabalho.

Volta à Zero: pressione o botão *Volta à Zero* (35) para ajustar automaticamente o assento na posição mais baixa e encosto na posição mais elevada.


Posição de Trabalho: para facilitar a movimentação simultânea do assento e encosto, existem 4 posições que podem ser acionadas. O número da posição está indicado na região (C). A posição 1, 2 e 3 são gravadas pelo usuário. A posição 4 é a *Posição de Cuspir* e não pode ser alterada.

Executar uma Posição de Trabalho (D):

a) Pressione o botão *Posição de Trabalho* (36). O equipamento emitirá 1 bipe curto;
b) Pressione o botão da posição desejada (1 a 4). O equipamento emitirá 2 bipes confirmando a operação. O tempo para seleção da posição é de 4 segundos. Caso não seja pressionado nenhum botão dentro deste período, o equipamento cancela a operação.


Gravar uma Posição de Trabalho (E):

a) Pressione o botão *Volta à Zero* (35);
b) Ajuste o encosto na posição desejada;
c) Ajuste o assento na posição desejada;
d) Pressione por 5 segundos o botão *Posição de Trabalho* (35). O equipamento entrará em modo de gravação pelos próximos 2 segundos, emitindo 2 bipes longos. Execute a próxima etapa dentro deste intervalo. Caso contrário, o equipamento emitirá 3 bipes curtos, cancelando a operação;
e) Escolha um dos botões de posição (1, 2 ou 3) para gravar a posição ajustada. O equipamento emitirá 2 bipes curtos confirmando que a posição foi gravada.

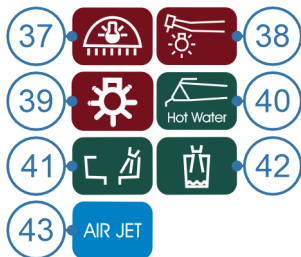

PAINEL DE INSTRUMENTOS

- (37) Liga/Desliga Refletor;
 (38) Liga/Desliga Luz da Fibra Óptica;
 (39) Liga/Desliga Negatoscópio;
 (40) Liga/Desliga Thermo Comfort;
 (41) Água na Cuba;
 (42) Água no Porta-Copo;
 (43) Liga/Desliga Air Jet.

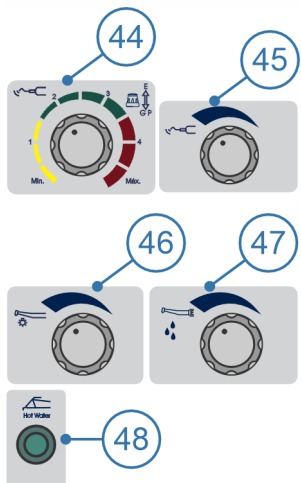

- (44) Ultrassom - Ajuste de Potência e Seletor de Funções;
 (45) Ultrassom - Ajuste de Água;
 (46) Fibras Ópticas - Ajuste de Água;
 (47) Micromotor Brushless - Ajuste de Água;
 (48) Thermo Comfort - Indicador Liga/Desligado.

THERMO COMFORT

Sistema que oferece água quente para todos os instrumentos que utilizam água, com saída entre 35° C e 45° C. Pode apresentar controle de temperatura, de acordo com o modelo.

Ativar/Desativar: toque no botão *Liga/Desliga Thermo Comfort* (49) no sistema e-tech.

Características técnicas:

- Tempo de sangria: ~6 segundos;
- Temperatura máxima: 45° C;
- Capacidade do reservatório: 100 mL;
- Tempo para aquecimento inicial: ~14 min.



SISTEMA AIR JET

O sistema Air Jet proporciona agilidade nos procedimentos com turbina de alta rotação. Consiste na liberação de jato contínuo de ar pela própria turbina, dispensando o uso da seringa para esta função.


Ativar/Desativar: pressione botão *Liga/Desliga Air Jet* (50) no sistema e-tech. Quando o Air Jet está ativado, o jato de ar contínuo inicia logo que a peça de mão é retirada do suporte. Ao pressionar o *Pedal de Propulsão* (51), o jato de ar é interrompido, e a peça de mão funciona normalmente. Ao liberar o *Pedal de Propulsão* (51), o jato de ar é acionado novamente até que o sistema Air Jet seja desligado ou a peça de mão seja colocada em seu suporte.



NEGATOSCÓPIO

Com visor iluminado por LED, permite a visualização de radiografias sem se distanciar do paciente.

Ativar/Desativar: pressione o botão *Liga/Desliga Negatoscópio* (52).

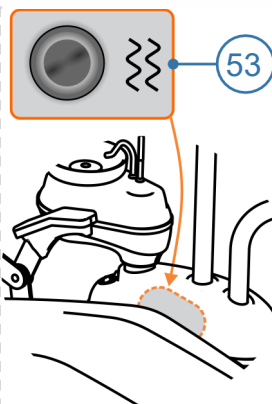

SISTEMA ANTI-STRESS

Sistema desenvolvido para proporcionar maior conforto aos pacientes. Consiste em quatro massageadores posicionados no interior dos estofamentos para atuar na região da lombar e coxas.

Acionados através de botão, estes massageadores aumentam o bem-estar do paciente durante os procedimentos odontológicos.

Ativar/Desativar: utilize o botão *Liga/Desliga* (53) localizado na lateral esquerda do equipamento.

SISTEMA CHRONOLUB


Este sistema dispõe da função *ChronoLub*, que é um cronômetro eletrônico utilizado para monitorar o tempo de uso dos instrumentos rotativos do equipamento e indicar o momento correto para lubrificação, através de mensagem no painel e aviso sonoro. Também é disponibilizado pelo *Sistema ChronoLub* o ajuste digital de dispositivos opcionais como o *Ultrassom* e o *Micromotor Elétrico*, informações de *Data e Hora*, lembrete de data de *Aniversário*, ajuste de temperatura do sistema *Thermo Comfort*, *Versão de Software* e *Monitor Cardíaco*.

54 - Decréscimo;

55 - Acréscimo;

56 - Adjust/Enter;

57 - Reset/Esc.

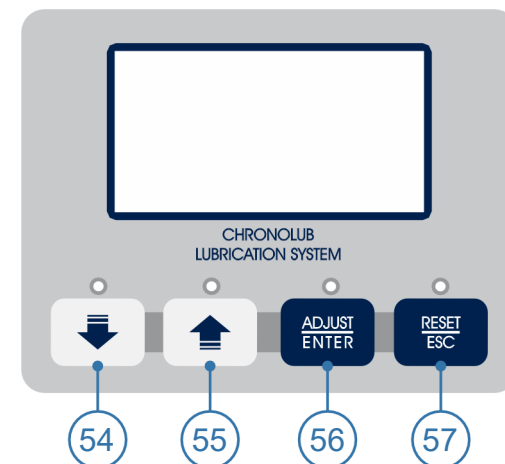

• CHRONOLUB



Ao remover a peça de mão do suporte, o *Sistema ChronoLub* identificará se o acoplamento é para baixa ou alta rotação, mostrará o número de sua posição na mesa odontológica, e um círculo segmentado que representa o tempo de uso da peça de mão. Quando o último segmento começar a piscar, significa que a peça de mão pode ser usada por mais 2 minutos.

Ao esgotar o tempo de uso, emitirá 3 bipes e exibirá na tela uma lata de spray. A partir deste momento sempre que a peça de mão for

retirada do suporte, o sistema emitirá aviso sonoro, repetindo o aviso a cada 2 minutos enquanto a peça de mão estiver em uso ou fora do suporte.

Após a lubrificação da peça de mão, com ela fora do suporte, pressione o botão *Reset/Esc* (57) por 3 segundos para reiniciar a contagem do tempo. Este procedimento pode ser feito a qualquer momento.

• RELÓGIO - DATA E HORA



Acessar função Relógio: pressione a botão *Adjust/Enter* (56) por 3 segundos para acessar a tela *AJUSTE*. Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para selecionar a opção 1. *RELÓGIO*.

Ajustar data/hora: pressione a botão *Adjust/Enter* (56) para acessar a tela *AJUSTAR O RELÓGIO*. Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para mudar o valor selecionado. Utilize o botão *Adjust/Enter* (56) alternar a seleção.

Salvar as alterações: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) por 3 segundos.

Voltar ao menu principal ou cancelar: pressione o botão *Reset/Esc* (57).

• ANIVERSÁRIO




Acessar função Aniversário: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) por 3 segundos para acessar a tela "AJUSTE". Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para selecionar a opção 2. *ANIVERSÁRIO*.

Alterar data de aniversário: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) para acessar a tela "AJUSTE ANIVERSÁRIO". Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para mudar o valor selecionado. Utilize o botão *Adjust/Enter* (56) alternar a seleção.

Salvar alterações: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) por 3 segundos.

Voltar ao menu principal ou cancelar: pressione o botão *Reset/Esc* (57).

• IDIOMA

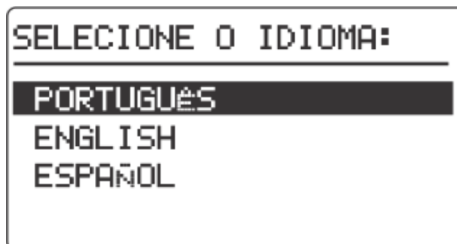

Acessar função idioma: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) por 3 segundos para acessar a tela *AJUSTE*. Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para selecionar a opção 3. *IDIOMA*.

Alterar idioma: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) para acessar a tela *SELECIONE O IDIOMA*. Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para selecionar o idioma desejado.

Salvar alterações: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) por 3 segundos.

Voltar ao menu principal ou cancelar: pressione o botão *Reset/Esc* (57).

• THERMO COMFORT




Ativar/Desativar: pressione o botão *Liga/Desliga Thermo Comfort* (49) no painel de comandos.

Ajustar temperatura da água: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) por 3 segundos para acessar a tela *AJUSTE*. Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para selecionar a opção 4. *THERMO COMFORT*. Pressione o botão *Adjust/Enter* (56) para acessar a tela *AJUSTE TEMPERATURA*. Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para mudar a temperatura.

Salvar temperatura ajustada: pressione o botão *Adjust/Enter* (56).

Voltar ao menu principal ou cancelar: pressione o botão *Reset/Esc* (57).

• MONITOR CARDÍACO

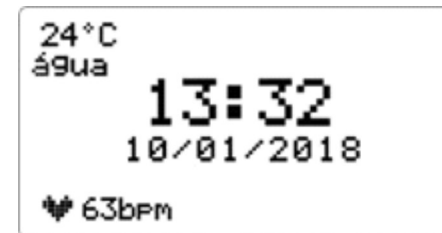

O monitor cardíaco é dispositivo suplementar para o monitoramento de frequência cardíaca do paciente. A leitura desse dispositivo deve ser considerada apenas como um indicador.

Ativar monitor cardíaco: identifique a conexão de entrada (59), localizada na lateral na mesa e sinalizada pelo símbolo (58), e insira o plugue (60). Prenda o sensor (61) na ponta de qualquer um dos dedos da mão do paciente. O monitoramento cardíaco do paciente irá aparecer automaticamente após 8 segundos no canto inferior esquerdo do display.



Visualizar somente o monitor cardíaco: pressione o botão *Adjust/Enter* (56) por 3 segundos para acessar a tela *AJUSTE*. Utilize os botões de ajuste (54 e 55) para selecionar a opção 5. *BATIMENTO* e pressione o botão *Adjust/Enter* (56).

Voltar ao menu principal: pressione o botão *Reset/Esc* (57).

