

Guia Rápido

Performance




Antes de utilizar o equipamento, leia com atenção as *Instruções de Uso*. Para acessar documentos complementares e informações adicionais relacionadas ao equipamento, utilize o QR Code fornecido ao lado ou acesse: olsen.odo.br.




LIGANDO O EQUIPAMENTO

Nota: Em modelos sem unidade de água, desconsidere os passos **A**, **D** e **E**.

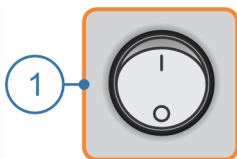

a) Ligue o compressor e abra o registro de água.

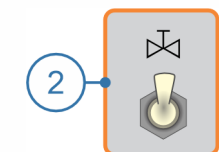

b) Conecte o cabo de alimentação em uma tomada de uso exclusivo e ligue o disjuntor.

c) Ligue o botão Liga/Desliga (1) na parte posterior da base.


d) Feche a Válvula de Pressurização (2) no equipo e encha o Reservatório de Água (até a marca) com água filtrada ou mineral.

e) Acople o reservatório e depois reabra a válvula (2) para pressurizar.

f) Teste todos os comandos e instrumentos antes do atendimento.

MOVIMENTANDO A CADEIRA

Utilize os botões de movimentação presentes no pedal para executar as operações descritas abaixo.

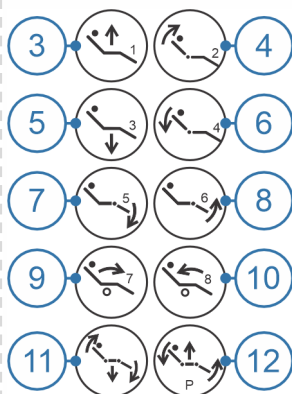

(3) Sobe Assento / Posição 1;

(4) Sobe Encosto / Posição 2;

(5) Desce Assento / Posição 3;

(6) Desce Encosto / Posição 4;

(7) Desce Apoio de Pernas / Posição 5;

(8) Sobe Apoio de Pernas / Posição 6;

(9) Inclina Assento para Frente / Posição 7;

(10) Inclina Assento para Trás / Posição 8 (Posição de Maca);

(11) Volta à Zero;

(12) Posição de Trabalho.

Volta à Zero e Posição de Desembarque: comando em dois estágios. Pressione uma vez para a Posição de Desembarque (encosto a 60°, assento e pernas baixos). Pressione novamente para a Posição Volta à Zero (encosto elevado).

Posição de Trabalho: para facilitar a movimentação simultânea do assento, encosto e apoio de pernas, existem 7 posições que podem ser gravadas e acionadas. O número da posição está indicado na região (A).

Executar uma Posição de Trabalho (B):

a) Pressione o botão Posição de Trabalho (12). O equipamento emitirá 1 bipe curto;

b) Pressione o botão da Posição desejada (3 a 10). O equipamento emitirá 2 bipes confirmando a operação. O tempo para seleção da posição é de 4 segundos. Caso não seja pressionado nenhum botão dentro deste período, a

operação é cancelada.

Gravar uma Posição de Trabalho (C):

a) Pressione o botão Volta à Zero (11);

b) Ajuste o encosto na posição desejada;

c) Ajuste o assento na posição desejada;

d) Ajuste o apoio de pernas na posição desejada;

e) Pressione por 5 segundos o botão Posição de Trabalho (12). O equipamento entrará em modo de gravação pelos próximos 2 segundos, emitindo 2 bipes longos. Escolha um dos botões de Posição (3 a 10) para gravar a posição ajustada nesse intervalo. O equipamento emitirá 2 bipes curtos confirmando que a posição foi gravada. Caso contrário, o equipamento emitirá 3 bipes curtos, cancelando a operação.




INTERRUPÇÃO DE MOVIMENTOS

Cadeiras que apresentam comandos automáticos como Posição de Trabalho e Volta à Zero têm o movimento interrompido imediatamente com a execução de qualquer comando de movimento no pedal da cadeira. Ao cancelar um movimento automático, o equipamento emitirá 3 bipes.

Caso o operador verifique qualquer situação que possa gerar algum tipo de risco ao paciente, deverá interromper o movimento do equipamento imediatamente.


POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA

O comando Desce Encosto na sua posição máxima de reclinção proporciona a irrigação cerebral por gravidade. A reclinção máxima é de -5° graus em relação a horizontal.

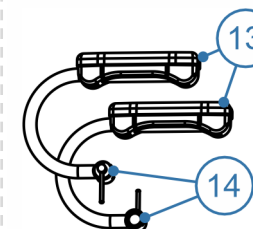

APOIO PARA BRAÇOS


O apoio para braços (13) possui ajuste de profundidade. Para ajustar, gire a haste (14) no sentido anti-horário para soltar, posicione o apoio e, para fixar, gire a haste (14) no sentido horário.

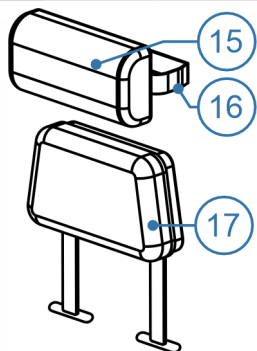

CABECEIRA


• CABECEIRA SEM RECORTE E TRAVESEIRO AUXILIAR

Para ajustar a altura, puxe ou empurre a cabeceira (17), sem ultrapassar 10 cm de distância do encosto. O traveseiro auxiliar (15) possui alças com elástico (16) para facilitar o uso e a limpeza.

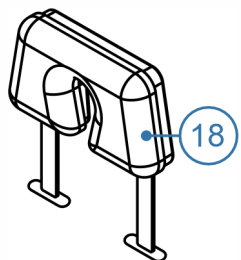

• CABECEIRA COM RECORTE

Esta cabeceira (18) permite o posicionamento do paciente em decúbito ventral, com um recorte para o rosto. Para ajustar a altura, puxe ou empurre-a, mantendo a distância máxima de 10 cm do encosto.

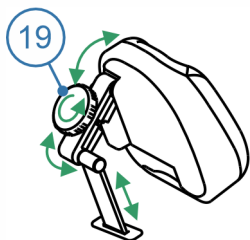

• CABECEIRA MULTIARTICULADA


Esta cabeceira possui dois eixos de articulação. Para ajustar o ângulo, gire o manípulo (19) no sentido anti-horário para soltar, posicione a cabeceira e gire-o no sentido horário para travar. Para ajustar a altura, puxe ou empurre-a, sem ultrapassar os 10 cm de distância do encosto.

REFLETOR

• FOCO PARA DIAGNÓSTICO

Sempre movimente o refletor através das alças laterais (21). Recomenda-se que as alças laterais (21) sejam embaladas com material descartável para evitar contaminação cruzada.

Ligar/Desligar: use o interruptor (20) ou o botão no pedal (22).

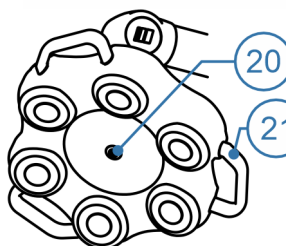

Refletor **Foco para Diagnóstico:** o comando pelo pedal (22) funciona somente quando o interruptor no cabeçote (20) estiver ligado.



Refletores **LED Premium, Dual Color e VARI8:** os comandos no cabeçote são habilitados somente quando o botão no pedal (22) estiver ligado.



Em modelos com quatro motores (com função de inclinação do assento), o pedal não possui o botão Liga/Desliga do refletor (22).




• LED PREMIUM

Sempre movimente o refletor através das Alças Laterais (24). As Alças podem ser retiradas para limpeza através da remoção dos Parafusos de Fixação (23).

Ligar/Desligar: pressione o botão Liga/Desliga Refletor (22), ou o botão de Controle (26), ou passe a mão na frente do Sensor (25) a aproximadamente 5 cm de distância.

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do Sensor (25) ou gire o botão de Controle (26) até que o refletor alcance a intensidade desejada.

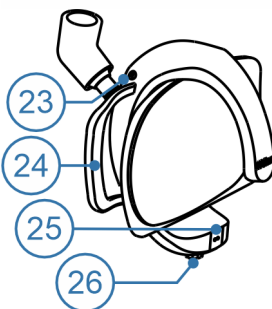


• DUAL COLOR

Este refletor possui iluminação indireta, controle de intensidade e ajuste de temperatura de cor (branca/amarela).

Ligar/Desligar: use o botão (22), ou passe a mão na frente do sensor a 5 cm (29), ou use o interruptor (27).

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente sensor a 5 cm (29) ou segure lateralmente o Interruptor (27) para direita ou esquerda, até que o refletor alcance a intensidade desejada.

Ajuste de temperatura de cor: deslize o botão (28) para direita (luz branca) ou esquerda (luz amarela) para selecionar a cor desejada. Nunca use materiais foto-ativados sem selecionar a luz amarela.

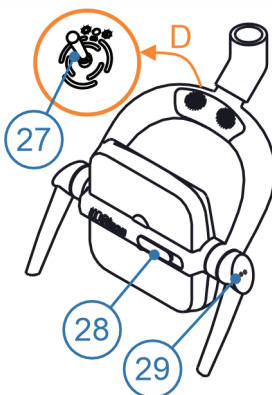


• VARI8

Este refletor tem iluminação direta com 8 LEDs e controle por toque ou sensor.

Ligar/Desligar: use o botão (22), ou passe a mão na frente do sensor a 5 cm (30), ou toque no botão de liga/desliga (31).

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente sensor a 5 cm (30) ou toque nos botões de mais/menos (33).

Ajuste de temperatura de cor: toque no botão (32) para alternar ciclicamente entre as opções (2000K a 6000K). Para materiais fotoativados, selecione 2000K (luz amarela). Nunca use materiais foto-ativados sem selecionar a luz amarela.

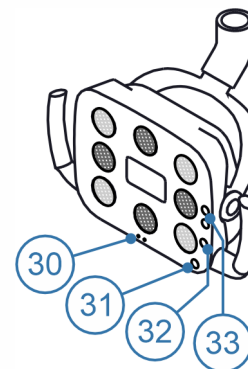


SISTEMA ANTI-STRESS

O Sistema Anti-Stress proporciona maior conforto através de quatro massagedores na região lombar e das coxas.

Ligar/Desligar: utilize o botão Liga/Desliga (35) indicado com o símbolo (34) localizado na lateral direita da estrutura do assento.

Interrupção Automática: o sistema desligará automaticamente após 15 minutos ligado, devendo ser respeitado o tempo de 10 minutos desligado afim de evitar superaquecimento.

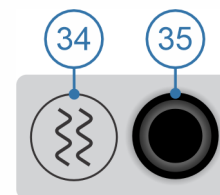


SERINGA TRÍPLICE

Antes de iniciar o uso da Seringa Tríplíce, conecte o Bico da Seringa (37) pressionando o Anel de Travamento (36) para o encaixe correto.

Jato de ar: pressione o botão de ar (38).

Jato de água: pressione o botão de água (39).

Jato de spray: pressione simultaneamente os botões de ar (23) e água (24).

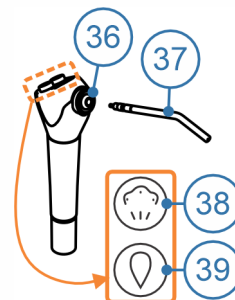

SUGADOR

Pode ser aplicado à mangueira do sugador Venturi e Vórtice, como opcional, o sistema de Engate Rápido que facilita a remoção do dispositivo para limpeza.

Os Adaptadores (E) permitem o acoplamento de cânulas de Ø 6,3, 9,5 e 11 mm. Antes de iniciar a operação, encaixe a cânula no Adaptador. Os Adaptadores são removíveis, facilitando a troca e a limpeza.

SUGADOR VENTURI

Compatível com adaptador de cânula de Ø 6,3 e 9,5 mm.

O dispositivo Venturi (40) usa o ar comprimido do compressor para gerar sucção.

Ativar/Desativar sucção: retire o sugador do seu suporte (41) para ativar ou coloque-o novamente para desativar.

SUGADOR VÓRTICE

Compatível com adaptador de cânula de Ø 6,3 e 9,5 mm.

Utiliza o sistema Venturi para sucção, porém sua capacidade em volume é superior, chegando a alcançar até 385 mm/Hg. O sugador Vórtice (42) pode ser utilizado para sucção em pequenos procedimentos cirúrgicos e de profilaxia.

Ativar/Desativar sucção: retire o sugador do seu suporte (43) para ativar ou coloque-o novamente para desativar.

SUGADOR BOMBA À VÁCUO

Compatível com cânula de Ø 11 mm.

Disponibiliza a utilização de bomba de vácuo como sucção na unidade de água. O suporte deste sugador é provido de dispositivo para ignição e desligamento

automático da bomba. Além disso, os sugadores possuem controle de fluxo de sucção.

Ativar/Desativar sucção: retire o sugador (45) do seu suporte (46) para ativar ou coloque-o novamente para desativar.

Ajustar fluxo de sucção: para diminuir ou aumentar o fluxo de sucção, aproxime ou afaste a alça (44) do sugador.

UNIDADE DE ÁGUA

A unidade de água tem como função principal disponibilizar ponto de água e conexão para desague para auxiliar na realização de procedimentos.

A unidade de água é rebatível em até 90°, disponibilizando uma Cuba (49) de fácil remoção para limpeza.

Os Dutos de Água da Cuba (48) e do Porta-Copo (47) são destacáveis para facilitar no processo de higienização da unidade.

Nas unidades de água podem ser disponibilizados Suportes para Instrumentos (50) opcionais.

Acionar água na cuba: abra o registro da Água na Cuba (51).

Acionar água no porta-copo: pressione o botão Água no Porta-Copo (52).

BANDEJA AUXILIAR

A bandeja (53), fabricada em aço inox e autoclavável, permanece estável durante os movimentos da mesa.

Para ajustar sua altura, afrouxe o manípulo do suporte para acessórios (55), posicione o braço (54) e aperte o manípulo novamente. A bandeja também tem giro livre sobre seu eixo.

SUPORTE DE ROLO DE LENÇOL DESCARTÁVEL

Este suporte, posicionado atrás do encosto, aceita rolos de até 100 mm de diâmetro.

Para colocar o rolo, gire o eixo do suporte (56) no sentido anti-horário, puxando-o para fora.

SUPORTE PARA ACESSÓRIOS ESQUERDO E DIREITO











Estes suportes, identificados com L (esquerdo) e R (direito) no local (59), fixam acessórios nos trilhos laterais e podem ser simples (57) ou duplo (61).


Para ajustar a altura ou o giro de um acessório, solte o manípulo (60) no sentido anti-horário, posicione-o e aperte-o no sentido horário. Para ajustar a posição nos trilhos, gire a haste metálica (58) no sentido anti-horário, posicione o suporte e gire a haste no sentido horário.

Os acessórios compatíveis são o Suporte Lateral para Braços/Apoio para Coleta, o Suporte Estofado para Pernas/Braços e o Suporte de Soro, permitindo ajustes de altura, profundidade e giro.

SUPORTE LATERAL PARA BRAÇOS E APOIO PARA COLETA


Estes acessórios de ABS, de formato côncavo, são usados para posicionar braços para procedimentos ou para facilitar coleta e administração endovenosa. O suporte lateral para braços (62) tem uma haste de 15 cm (63) e o apoio para coleta tem uma haste de 36 cm (64).

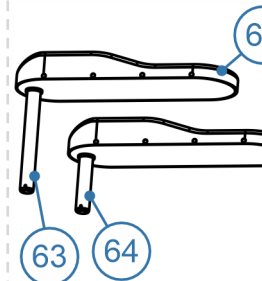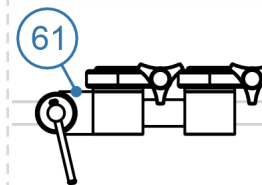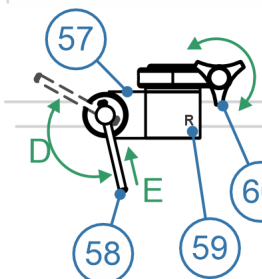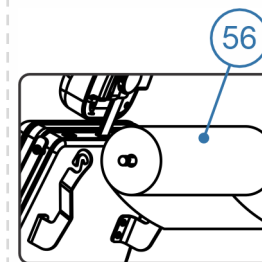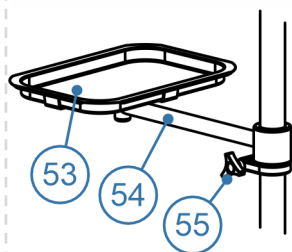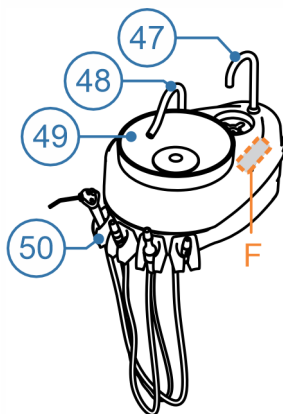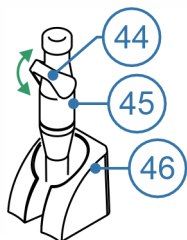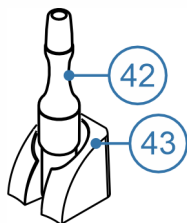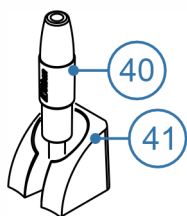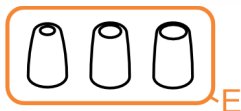

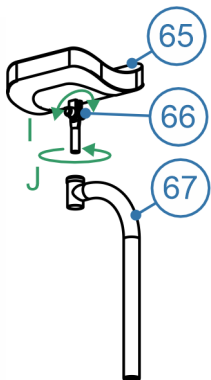


SUPORTE ESTOFADO PARA PERNAS OU BRAÇOS

Este suporte versátil pode apoiar pernas ou braços. O estofamento (65) é removível por encaixe e permite giro sobre o eixo (J). A articulação do eixo (66) permite o ajuste da inclinação (I) do estofamento.

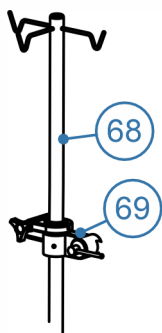

SUPORTE DE SORO

O suporte de soro (68) pode ser instalado nos trilhos laterais através do suporte para acessórios (69), permitindo ajuste de altura.

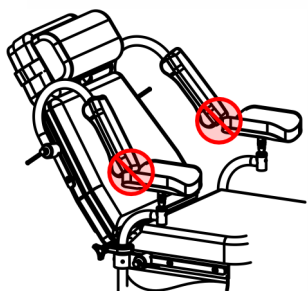

INTERAÇÃO ENTRE ACESSÓRIOS

A mesa permite o atendimento de pacientes deitados ou sentados, exigindo cuidado na instalação dos acessórios nos trilhos laterais para evitar danos ao equipamento, procedimentos ou desconforto do paciente. Ao movimentar o equipamento, evite que os acessórios se choquem entre si ou com outras partes. A escolha do posicionamento dos acessórios deve atender às necessidades do procedimento, sendo de total responsabilidade do operador gerenciar a interação entre eles durante qualquer movimentação da mesa.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Consulte as *Instruções de Uso* para obter orientações detalhadas sobre os procedimentos adequados de limpeza e desinfecção.



Desligar o equipamento antes de iniciar a limpeza e desinfecção.



Todo o processo de higienização deve ser realizado com uso de luvas próprias para proteção, além de máscara e óculos de proteção, conforme padrões de biossegurança.



A limpeza e desinfecção deve ser realizada antes do atendimento de cada paciente e ao final do dia de trabalho.



Nunca utilize palha de aço ou esponjas e / ou produtos abrasivos, para não danificar os componentes do equipamento.