

ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA ANTI-STRESS – AJUSTE DE INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO

O sistema anti-stress, que anteriormente era ativado com uma **intensidade de vibração fixa e pré-definida**, agora permite o ajuste de **três níveis de intensidade**, conforme a interação com a tecla de acionamento.


Para ligar o sistema e selecionar a intensidade desejada, **mantenha a tecla do anti-stress pressionada**. A cada estágio, um **bip sonoro** é emitido, com intervalo de aproximadamente 1 segundo entre eles:

- **1 bip:** vibração leve
- **2 bipes:** vibração média
- **3 bipes:** vibração forte

Solte a tecla imediatamente após ouvir o bip correspondente à intensidade desejada. O sistema iniciará automaticamente com a vibração selecionada.

Essa atualização oferece maior controle e personalização, adaptando-se melhor ao conforto do usuário.

Alteração no manual:

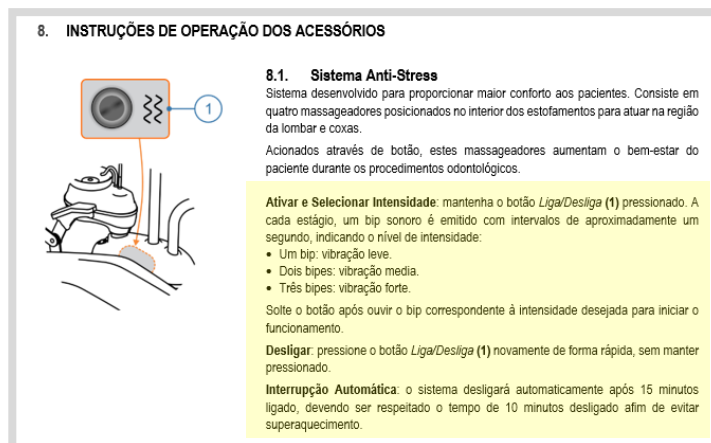

Botão Anti-Stress:

