

## MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERFORMANCE E HARMONIZE

Este informativo tem como objetivo orientar os técnicos quanto ao **lado correto do equipamento que pode ser erguido** com segurança para **pequenas movimentações** (ex.: elevadores, transposição de pequenos obstáculos, rotação para manobra), utilizando como referência o apoio das pernas. Esta orientação é **válida exclusivamente para os equipamentos Performance e Harmonize**.

### Identificação do lado com apoio das pernas:

Para determinar qual lado do equipamento pode ser erguido, siga os passos abaixo:

1. Observe a caixa de papelão original do equipamento (Performance ou Harmonize).
2. Localize os recortes laterais existentes na caixa – aberturas projetadas para inserção das mãos durante o manuseio (*Fig. 1*).
3. Olhe através desses recortes para o interior da embalagem. Você visualizará a estrutura interna do equipamento.
4. Identifique o apoio das pernas (a parte do estofamento do apoio das pernas estará voltado para o recorte). Esse apoio corresponde ao lado que pode ser erguido (*Fig. 2*).

### Procedimento para pequena movimentação

Após identificar o lado correto (com apoio das pernas):


- Posicione-se ao lado desse apoio.
- Erga suavemente apenas esse lado, mantendo o outro lado apoiado no chão ou superfície estável (*Fig. 2*).
- Realize o transporte em curtas distâncias (ex.: entrada no elevador, rotação para manobra).
- Nunca levante o equipamento completamente – trata-se de movimentação parcial e controlada.

### Precauções obrigatórias

- Não erguer o lado oposto ao apoio de pernas – risco de danificar o equipamento ou causar acidentes.
- Não utilizar esse método para transportes longos ou subir escadas.
- Use EPI adequado (luvas de proteção e calçado antiderrapante).



*Fig. 1 - Identificação do recorte na caixa*

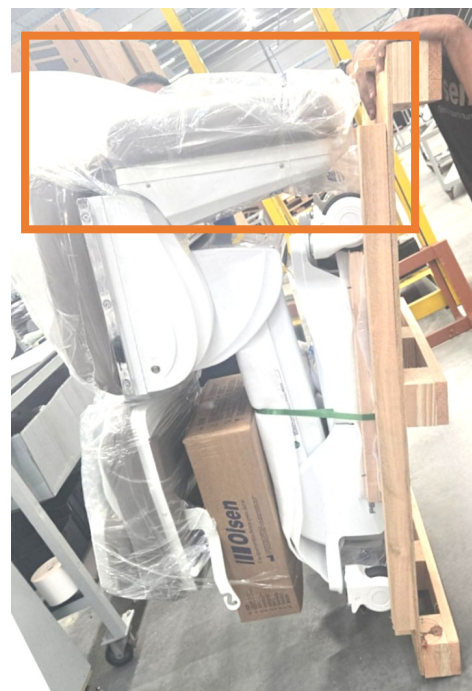

*Fig. 2 - Apoio das pernas erguido para cima*