


Guia Rápido

Harmonize

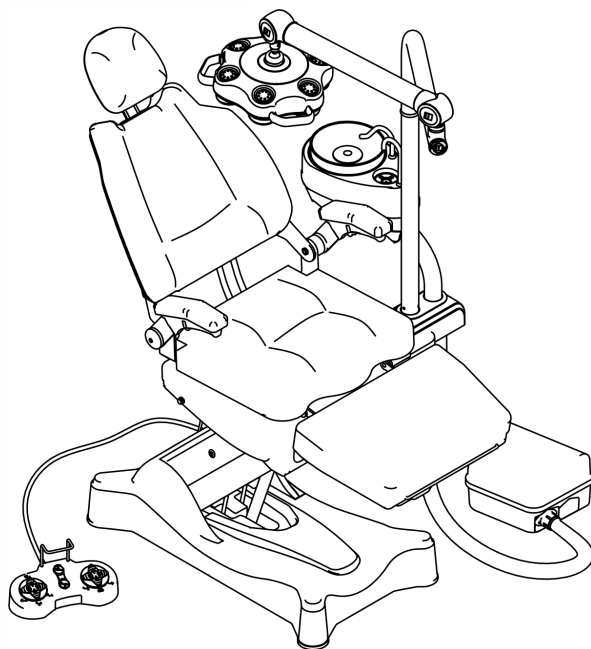


Antes de utilizar o equipamento, leia com atenção as *Instruções de Uso*. Para acessar documentos complementares e informações adicionais relacionadas ao equipamento, utilize o QR Code fornecido ao lado ou acesse: olsen.odo.br.



1

1. LIGANDO O EQUIPAMENTO


Ligue o Botão Liga/Desliga (1) localizado na lateral direita do pantógrafo.

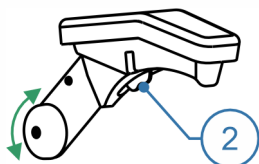

2

2. BRAÇO

Para destravar e movimentar o braço escamoteável, pressione a alavanca (2) localizada na parte inferior.

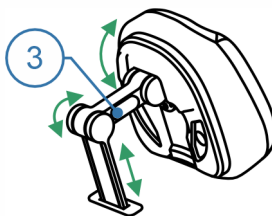


3

3. CABECEIRA

Ajustar ângulo: mantenha pressionado o botão (3) enquanto faz o ajuste. Solte o botão (3) para travar na posição.

Ajustar altura: puxe ou empurre a cabeceira afastando ou aproximando-a do encosto. Não ultrapasse a distância de 10 cm entre a cabeceira e o encosto.

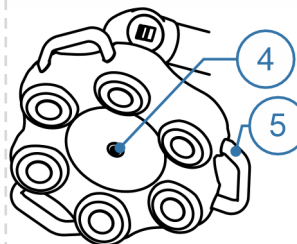

4


5

4. REFLETOR

FOCO PARA DIAGNÓSTICO

Sempre movimente o refletor através das alças laterais (5). Recomenda-se que as alças laterais (5) sejam embaladas com material descartável para evitar contaminação cruzada.

Ligar/Desligar: use o interruptor (4) ou o botão no Pedal (10). Para usar o pedal, o interruptor (4) deve estar ligado.

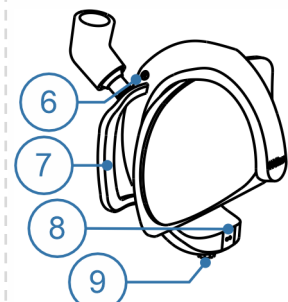

6

7

8

9




10

5. REFLETOR LED PREMIUM

Sempre movimente o refletor através das Alças Laterais (7). As Alças podem ser retiradas para limpeza através da remoção dos Parafusos de Fixação (6).


Ligar/Desligar: pressione o botão Liga/Desliga Refletor no Pedal (10), ou o botão de Controle (9), ou passe a mão na frente do Sensor (8) a aproximadamente 5 cm de distância. No primeiro uso após ligar o equipamento, para habilitar o Sensor e o botão de Controle, utilize primeiro o botão Liga/Desliga Refletor do Pedal (10).

Alterar intensidade de iluminação: mantenha a mão na frente do Sensor (8) ou gire o botão de Controle (9) até que o refletor alcance a intensidade desejada.

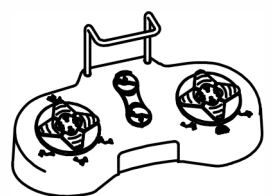

6. MOVIMENTANDO A CADEIRA

Utilize os botões de movimentação presentes no pedal para executar as operações descritas abaixo.

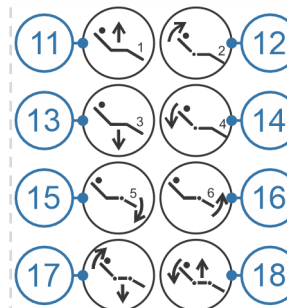

- (11) Sobe Assento / Posição 1;
- (12) Sobe Encosto / Posição 2;
- (13) Desce Assento / Posição 3;
- (14) Desce Encosto / Posição 4;
- (15) Desce Apoio de Pernas / Posição 5;
- (16) Sobe Apoio de Pernas / Posição 6;
- (17) Volta à Zero;
- (18) Posição de Trabalho.

Volta à Zero: pressione o botão Volta à Zero (17) para ajustar automaticamente o assento na posição mais baixa e encosto na posição mais elevada.

Posição de Trabalho: para facilitar a movimentação simultânea do assento, encosto e apoio de pernas, existem 6 posições que podem ser gravadas e acionadas. O número da posição está indicado na região (A).

Executar uma Posição de Trabalho (B):

- a) Pressione o botão Posição de Trabalho (18). O equipamento emitirá 1 bipe curto;
- b) Pressione o botão da Posição desejada (1 a 6). O equipamento emitirá 2 bipes confirmando a operação. O tempo para seleção da posição é de 4 segundos. Caso não seja pressionado nenhum botão dentro deste período, o equipamento cancela a operação.

Gravar uma Posição de Trabalho (C):

- a) Pressione o botão Volta à Zero (17);
- b) Ajuste o encosto na posição desejada;
- c) Ajuste o assento na posição desejada;
- d) Ajuste o apoio de pernas na posição desejada;
- e) Pressione por 5 segundos o botão Posição de Trabalho (18). O equipamento entrará em modo de gravação pelos próximos 2 segundos, emitindo 2 bipes longos. Escolha um dos botões de Posição (1 a 6) para gravar a posição ajustada nesse intervalo. O equipamento emitirá 2 bipes curtos confirmando que a posição foi gravada. Caso contrário, o equipamento emitirá 3 bipes curtos, cancelando a operação;



A



B



C

7. INTERRUPTÃO DE MOVIMENTOS

Cadeiras que apresentam comandos automáticos como Posição de Trabalho e Volta à Zero têm o movimento interrompido imediatamente com a execução de qualquer comando de movimento no pedal da cadeira. Ao cancelar um movimento automático, o equipamento emite 3 bipes.

Caso o operador verifique qualquer situação que possa gerar algum tipo de risco ao paciente, deverá interromper o movimento do equipamento imediatamente.

8. POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA

O comando Desce Encosto na sua posição máxima de reclinção proporciona a irrigação cerebral por gravidade. A reclinção máxima é de -5° graus em relação a horizontal.

9. SISTEMA ANTI-STRESS

Sistema desenvolvido para proporcionar maior conforto aos pacientes. Consiste em quatro massageadores posicionados no interior dos estofamentos para atuar na região da lombar e coxas.

1. Operação:

Ativar/Desativar: utilize o botão Liga/Desliga (20) indicado com o símbolo (19) localizado na lateral direita da estrutura do assento.

Interrupção Automática: o sistema desligará automaticamente após 15 minutos ligado, devendo ser respeitado o tempo de 10 minutos desligado afim de evitar superaquecimento.




10. SERINGA TRÍPLICE

Antes de iniciar o uso da Seringa Tríplíce, conecte o Bico da Seringa (22) pressionando o Anel de Travamento (21) para o encaixe correto.

Jato de ar: pressione o botão de ar (23).

Jato de água: pressione o botão de água (24).

Jato de spray: pressione simultaneamente os botões de ar (23) e água (24).

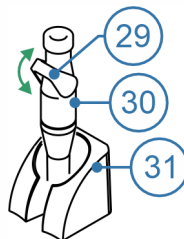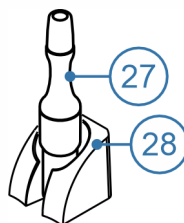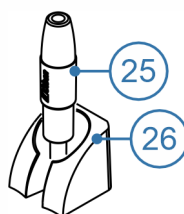

11. SUGADOR

Pode ser aplicado à mangueira do sugador Venturi e Vórtice, como opcional, o sistema de Engate Rápido que facilita a remoção do dispositivo para limpeza.

Os Adaptadores (E) permitem o acoplamento de cânulas de Ø 6,3, 9,5 e 11 mm. Antes de iniciar a operação, encaixe a cânula no Adaptador. Os Adaptadores são removíveis, facilitando a troca e a limpeza.

12. SUGADOR VENTURI

Compatível com adaptador de cânula de Ø 6,3 e 9,5 mm.

O dispositivo Venturi (25) usa o ar comprimido do compressor para gerar sucção.

Ativar/Desativar sucção: retire o sugador do seu suporte (26) para ativar ou coloque-o novamente para desativar.

13. SUGADOR VÓRTICE

Compatível com adaptador de cânula de Ø 6,3 e 9,5 mm.

Utiliza o sistema Venturi para sucção, porém sua capacidade em volume é superior, chegando a alcançar até 385 mm/Hg. O sugador Vórtice (27) pode ser utilizado para sucção em pequenos procedimentos cirúrgicos e de profilaxia.

Ativar/Desativar sucção: retire o sugador do seu suporte (28) para ativar ou coloque-o novamente para desativar.

14. SUGADOR BOMBA À VÁCUO


Compatível com cânula de Ø 11 mm.

Disponibiliza a utilização de bomba de vácuo como sucção na unidade de água. O suporte deste sugador é provido de dispositivo para ignição e desligamento automático da bomba. Além disso, os

sugadores possuem controle de fluxo de sucção.

Ativar/Desativar sucção: retire o sugador (30) do seu suporte (31) para ativar ou coloque-o novamente para desativar.

Ajustar fluxo de sucção: para diminuir ou aumentar o fluxo de sucção, aproxime ou afaste a alça (29) do sugador.

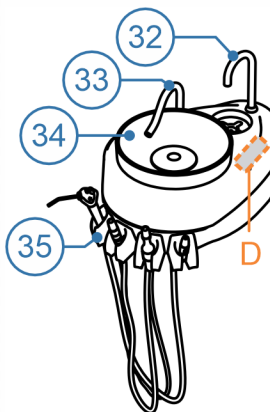

15. UNIDADE DE ÁGUA

A unidade de água tem como função principal disponibilizar ponto de água e conexão para desaguar para auxiliar na realização de procedimentos.


A unidade de água é rebatível em até 90°, disponibilizando uma Cuba (34) de fácil remoção para limpeza.

Os Dutos de Água da Cuba (33) e do Porta-Copo (32) são destacáveis para facilitar no processo de higienização da unidade.

Nas unidades de água podem ser disponibilizados Suportes para Instrumentos (35) opcionais.

Acionar água na cuba: abra o registro da Água na Cuba (36).

Acionar água no porta-copo: pressione o botão Água no Porta-Copo (37).

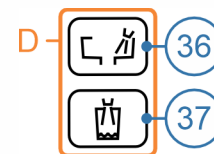

16. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Consulte o Manual de Instruções ou o Guia de Limpeza e Desinfecção para obter orientações detalhadas sobre os procedimentos adequados de limpeza e desinfecção.



Desligar o equipamento antes de iniciar a limpeza e desinfecção.



Todo o processo de higienização deve ser realizado com uso de luvas próprias para proteção, além de máscara e óculos de proteção, conforme padrões de biossegurança.



A limpeza e desinfecção deve ser realizada antes do atendimento de cada paciente e ao final do dia de trabalho.



Nunca utilize palha de aço ou esponjas e / ou produtos abrasivos, para não danificar os componentes do equipamento.