

NOVA MONTAGEM DO MÓDULO AUXILIAR

A partir de hoje, informamos que o processo de montagem do **Módulo Auxiliar** utilizado nos equipamentos **Siena** e **Logic** foi atualizado. Esta mudança visa otimizar a fixação do conjunto.



NOVO PROCEDIMENTO DE MONTAGEM


Todos os equipamentos Siena e Logic que acompanham este módulo a partir desta data já devem seguir o novo procedimento descrito abaixo.

Materiais Necessários:


- Kit de Instalação (contendo Parafuso (5201805) e Tampa de Acabamento Ø16mm (8101758).
- Chave Philips.

Passo a passo:


1. **PREPARAÇÃO:** Retire o Parafuso e Tampa do interior do kit de instalação.
2. **POSICIONAMENTO:** Encaixe o Módulo Auxiliar no braço de sustentação, alinhando corretamente os encaixes.
3. **FIXAÇÃO:** Utilizando uma chave Philips, fixe firmemente o módulo ao braço com o Parafuso.
4. **ACABAMENTO:** Por fim, encaixe a Tampa de acabamento sobre o parafuso para garantir o visual final do produto.

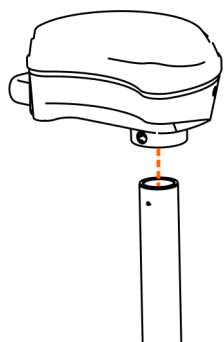

POSICIONAMENTO

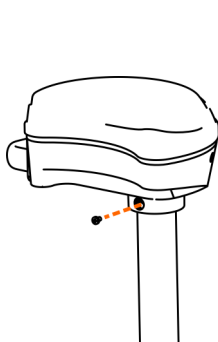

FIXAÇÃO

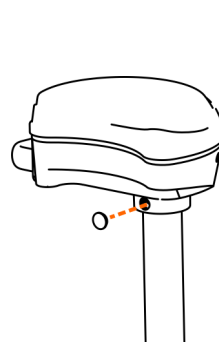

ACABAMENTO